

# Brilliant work in practice.

KaVo ロンドフレックス プラス360



## 注水機能

パウダーが飛び散りにくい  
ため、隣存歯  
や口腔粘膜が傷つき  
にくい

## 簡単操作


KaVoマルチフレックス  
カップリングに接続  
するだけで使用可能

## 軽量

本体はわずか200g

## サンドブラスト処理

CAD/CAM冠を  
確実に接着し、  
患者さんの満足度  
を向上させます。

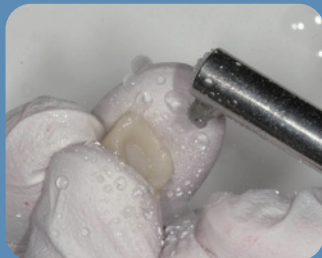

画像提供：内田歯科医院 内田昌徳先生

## エアアブレーションシステム

不快な音や  
振動が少なく、  
MIコンセプトによる  
窩洞形成が  
可能です。



Hard.  
Strong.


KaVo RONDOflex Plus 360




専用のパウダー粒子を高速(20m/秒)の空気流で  
歯面やCAD/CAM冠などの補綴物に吹き付け、  
すばやく処理します。

サンドブラスト処理を行うことで、CAD/CAM冠などの補綴物の接着力を強化し、  
脱離などのトラブルを軽減させます。また、タービン特有の音や切削時の振動がなく、  
MIコンセプトによる初期のう蝕の窩洞形成が可能です。

- ◎切削時の不快な音や振動がなく、快適な窩洞形成
- ◎チェアサイドでのCAD/CAM冠のサンドブラスト処理
- ◎KaVoマルチフレックスカップリングに接続するだけで使用が可能
- ◎注水機能により、パウダーが飛び散らず、隣在歯や口腔粘膜が傷つきにくい

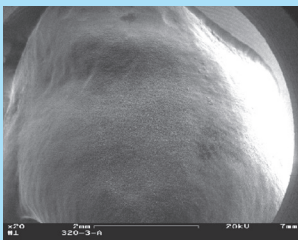

50µmのパウダーを60秒間吹き  
付けた後の歯面

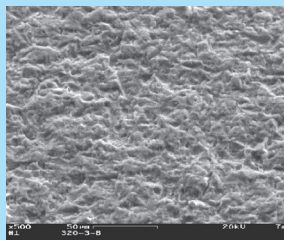

500倍に拡大された歯面  
全体にわたって均一な粗面に仕上がる



27µmと50µmの酸化アルミナ



2種類のノズル径(0.46mm、0.64mm)  
と2種類の噴射口の角度(90°、110°)  
があり、臼歯部への困難な部位でも確実に  
アクセス

※90°のノズル(0.46mm、0.64mm)はオプション品です。

【本体・付属品】



Rondoflex Plus 360 本体	×1
ノズル110° 0.64mm	×1
ノズル110° 0.46mm	×1
キー	×1
クリーニングドリル	×1
クリーニングニードル	×1
アブラシパウダー 27µm 75g	×1
アブラシパウダー 50µm 75g	×1
パウダーコンテナ 27µm	×1
パウダーコンテナ 50µm	×1
パウダーコンテナ用カバー	×2



本体まるごと熱水消毒  
または、135°Cまでの  
オートクレーブ滅菌可能

※使用ユニットにより、規程空気圧にセットできない場合、  
規程の処理能力が得られない場合があります。

販売名: ロンドフレックス プラス 360 一般名: 歯科用噴射式切削器 歯科用研削器材 認証番号: 21500BZY00390000 管理医療機器・特定保守管理医療機器

**KAVO**  
Dental Excellence

**カボ プランメカ ジャパン株式会社**

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481

お問い合わせ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール)

<https://www.kavo.jp>

VICPJ2410V4 INS-029