

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000
オーソス チタニウム システム



再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状:

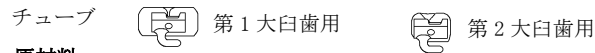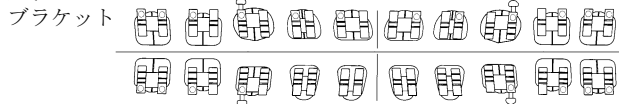

原材料:

- ・ブラケット: チタン合金
Al 5.5~6.75%, V 3.5~4.5%, その他(N, C, H, Fe, O)1%以下, Ti 残余
- ・チューブ、パッド: 純チタン
- ・コーティング: 窒化クロムコーティング

スロット: 0.46mm(.018インチ)/0.56mm(.022インチ)

部位	トルク	傾斜角	CIS/DO	フック	IDマーク右/左
上顎					
中切歯用	+22°	+5°	0°	無	タ/ビソク
	+15°	+5°	0°	無	ブル/ブラック
側切歯用	+14°	+9°	-4.5°	無	タ/ビソク
	+14°	+9°	0°	無	タ/ビソク
	+9°	+9°	-4.5°	無/有(D)	ブル/ブラック
	+9°	+9°	0°	無	ブル/ブラック
犬歯用	+7°	+10°	0°	無 ¹⁾ /有(M)	タ/ビソク
	0°	+10°	0°	有(M) ²⁾	タ/ビソク
	-3°	+10°	0°	無/有(D)	ブル/ブラック
第1小臼歯用 G/O	-6°	0°	0°	無/有(D)	ブル/ブラック
第2小臼歯用 G/O	-8°	+4°	0°	無/有(D)	ブル/ブラック
第1大臼歯用	-10°	0°	10°	有(D)	ブル/ブラック
	-10°	0°	15°	有(D)	ブル/ブラック
第1大臼歯用 ²⁾	-18°	0°	12°	有(D)	ブル/ブラック
	-10°	0°	15°	有(D)	ブル/ブラック
第2大臼歯用	-27°	0°	6°	有(D)	ブル/ブラック
下顎					
中切歯用	-5°	+2°	0°	無	レッド/イエロー
	-10°	+2°	0°	無	パ-ブル/オレンジ
側切歯用	-5°	+4°	-4.5°	無	レッド/イエロー
	-5°	+4°	0°	無	レッド/イエロー
	-10°	+4°	0°	無	パ-ブル/オレンジ
犬歯用	-7°	+6°	-4.5°	無 ¹⁾ /有(D) ²⁾ (M) ¹⁾	レッド/イエロー
	-6°	+6°	-4.5°	無/有(D)	レッド/イエロー
第1小臼歯用 G/O	-7°	+3°	0°	無/有(D)	レッド/イエロー
第2小臼歯用 G/O	-9°	+3°	0°	無/有(D)	レッド/イエロー
	-17°	+3°	0°	無/有(D)	レッド/イエロー
第1大臼歯用	-10°	0°	0°	有(D)	レッド/イエロー
	-22°	0°	0°	有(D)	レッド/イエロー
	-22°	0°	5°	有(D)	レッド/イエロー
第1大臼歯用 ²⁾	-28°	2°	2°	有(D)	レッド/イエロー
第2大臼歯用	-10°	0°	5°	有(D)	レッド/イエロー
	-22°	0°	5°	有(D)	レッド/イエロー

CIS: コンベンション イン スロット DO: ディスタル オフセット
G/O: ジンジバル オフセット フック: D-Distal, M-Mesial
¹⁾0.46mmスロット(.018インチ)のみ ²⁾0.56mm(.022インチ)のみ

【使用目的又は効果】

歯列矯正用のブラケット及びパッカルチューブである。

【操作方法又は使用方法等】

1. 患者に合ったブラケット及びチューブを選択する。
2. 使用する接着材の使用 방법에従い、歯面に接着する。
3. 接着材が十分に硬化した後、ワイヤーを装着する。
4. 金属製結紮線、エラスティックモジュール等を用い、ワイヤーを固定する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 油脂等により、適切な接着力が得られなくなるので、ボンディングベースを直接手でさわらないこと。
2. 接着材が十分に硬化してからワイヤーを装着すること。
3. 本製品の使用中に酸性のフッ素治療材を塗布すると、表面が変色(チタニウム本来の暗い銀色)するので、変色を防ぐためには中性のフッ素治療材を使用すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 使用されるダイレクトボンド用接着材の種類、接着手順の不備等によっては接着中に脱落することがあるので、脱落した場合は、直ちに医師の診断を受けさせること。
- 3) 接着の前に、エナメル質の状態、接着材及び接着位置を十分に確認すること。

【不具合・有害事象】

有害事象
掌跖膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【耐用期間】

製造から5年間[自己認証(製造元データ)による]

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名: カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先: 03-6859-0065
製造業者: オームコ社(Ormco Corporation)
国名: アメリカ(U.S.A.)