

## アクセントチューブ


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・ 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 形状：

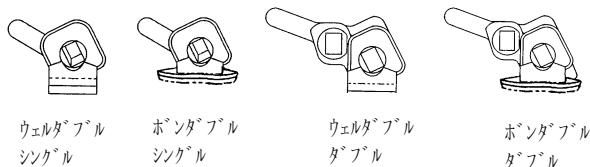

スロット：0.46mm(.018インチ)、0.56mm(.022インチ)

	トルク	テイスタル オフセット	ウェルダブル		ホンダブル	
			.018	.022	.018	.022
<b>上顎第1大臼歯</b>						
シングル	-10°	15°	○	○	○	○
ダブル	-10°	15°	○	○	○	○
<b>上顎第2大臼歯</b>						
シングル	-10°	5°	○	○	○	○
シングル	0°	5°	○	○	○	○
シングル (テイスタル エクステンション)	-10°	15°	○	○	○	○
	-10°	5°	○	○	○	○
<b>下顎第1大臼歯</b>						
シングル	-10°	0°	○	○	○	○
	-22°	5°	○	○	○	○
ダブル	-10°	0°	○	○	○	○
	-27°	5°	○	○	○	○
<b>下顎第2大臼歯</b>						
シングル	-10°	5°	○	○	○	○
	-22°	5°	-	-	○	○
	-27°	5°	○	○	○	○
シングル (テイスタル エクステンション)	0°	5°	○	○	○	○
	-10°	5°	○	○	○	○
	-27°	5°	○	○	○	○

#### 原材料：ステンレス鋼

- ・ チューブ：Cr 18.0～21.0%, Ni 9.0～12.0%, Mo 2.0～3.0%, その他(C, Mn, P, S, Si, Nb+Ta, Ti)5% 以下, Fe 残余
- ・ パット：Cr 16.0～18.0%, Ni 10.0～14.0%, Mo 2.0～3.0%, その他(C, Mn, P, S, Si, Cu)5% 以下, Fe 残余

#### 【使用目的又は効果】

歯列矯正用ワイヤ等をはめ込み、歯の正しい配列状態の確保に用いる。

#### 【使用方法等】

1. ウェルダブルタイプ(帯環用)
  - ① 患者に合ったバンド(帯環)を選択する。
  - ② 患者に合ったチューブを選択し、バンドに溶接する。
  - ③ 歯科用セメントの使用 방법에従い、バンドを歯牙に接着固定する。
  - ④ スロット部にワイヤー(矯正用線)を通す。
  - ⑤ 金属製結紮線、エラスチックモジュール等を用いチューブにワイヤーを固定する。
2. ボンダブルタイプ(ダイレクトボンド用)
  - ① 患者に合ったチューブを選択する。
  - ② ダイレクトボンド用接着材の使用 방법에従い、チューブを歯面に接着固定する。
  - ③ スロット部にワイヤー(矯正用線)を通す。
  - ④ 金属製結紮線、エラスチックモジュール等を用いチューブにワイヤーを固定する。

#### 【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 油脂等により、適切な接着力が得られなくなるので、ボンディングベースを直接手でさわらないこと。
2. 接着材あるいはセメントが十分に硬化してからワイヤーを装着すること。
3. プラケット本体のブレース部位が、700℃以上になると、物性の低下を招くことがある。

#### 【使用上の注意】

##### 【重要な基本的注意】

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 使用されるダイレクトボンド用接着材の種類、接着手順の不備等によっては装着中に脱落することがあるので、脱落した場合は、直ちに医師の診断を受けさせること。
- 3) 接着の前に、エナメル質の状態、接着材及び接着位置を十分に確認すること。

##### 【不具合・有害事象】

- 有害事象  
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 【保管方法】

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

##### 【耐用期間】

製造から5年間[自己認証(製造元データ)による]

#### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先：03-6859-0065  
製造業者：オーム公社(Ormco Corporation)  
国名：アメリカ(U.S.A.)