

# Brilliant work in practice.

KaVo ロンドフレックス プラス 360  
Air Ablation System with spray



**New**

**注水機能が追加**

**パウダーが飛び散らず**

**より快適な治療ができます。**

## 用途

- MIコンセプトによる窩洞形成
- 裂溝シーリングの処理
- 接着面の粗面化
- クラウンやブリッジの  
残留セメントや接着性残留物の除去

専用のパウダー粒子を高速(20m/秒)の空気流で治療対象歯牙表面に吹き付け  
歯牙表面をすばやく処理します。正確な照準作業によって驚く程簡単に歯面を研削  
します。接着面をやさしくブラッシングを行うような動きで処置します。



Hard.  
Strong.

KaVo RONDOflex Plus 360




いやな音がしない、痛くない、振動を感じない。  
さらに注水機能が追加されました。

KaVo ロンドフレックス プラス 360は、KaVo マルチフレックスカプリングへ接続するだけで使用できます。他の付属機器やコネクタは不要で、手間のかかる組み立て作業もありません。


軽量で負担なく利用でき、健全な歯牙組織を傷めずに高精度の効果が得られます。患者さんはタービン特有の音や切削時の振動がない快適な治療を受けることができます。

本体はわずか  
200gの  
軽量タイプ


## 強力なパワーが的確に処置

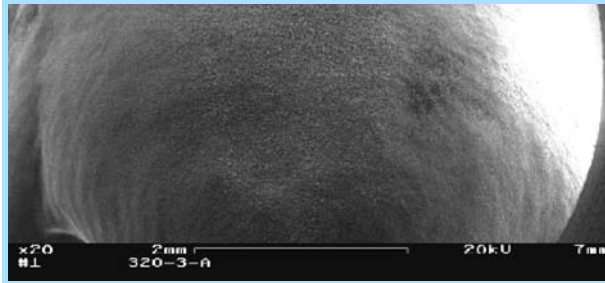

50 $\mu$ mのパウダーを60秒間吹き付けた後の歯面。

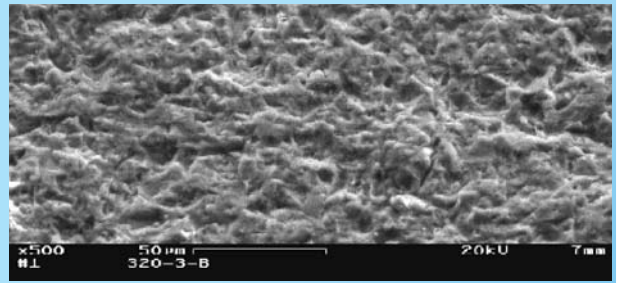

500倍に拡大された歯面は全体にわたり均一な粗面に仕上がります。

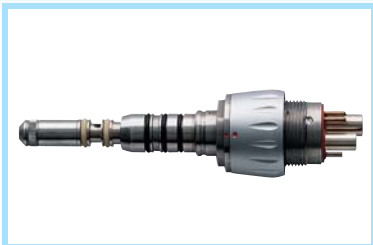

KaVo ロンドフレックス プラス 360は、KaVo マルチフレックスカプリングに接続するだけで使用できます。他社のユニットでも、KaVo マルチフレックスカプリングが接続可能なユニットであれば使用できます。



パウダーは27 $\mu$ mと50 $\mu$ mのコランダム粒子で色分けした容器でご提供します。



2種類のノズル径(0.46mm、0.64mm)と2種類の噴射口の角度(90°、110°)があり、困難な部位にもアクセス可能です。

### 【本体・付属品】



ロンドフレックス プラス 360 本体	×1
ノズル90° 0.64mm	×1
ノズル110° 0.64mm	×1
ノズル90° 0.46mm	×1
ノズル110° 0.46mm	×1
キー	×1
クリーニングドリル	×1
クリーニングニードル	×2
アブラシパウダー 27 $\mu$ m 75g	×1
アブラシパウダー 50 $\mu$ m 75g	×1
パウダーコンテナ 27 $\mu$ m	×1
パウダーコンテナ 50 $\mu$ m	×1
パウダーコンテナ用カバー	×2
アルミケース入り	



本体まるごと熱消毒  
または、135°Cまでの  
オートクレープ滅菌可能

※使用ユニットにより、規程空気圧にセットできない場合、規程の処理能力を得られない場合があります。

販売名：ロンドフレックス プラス 360 一般的名称：歯科用噴射式切削器 製品番号：1.002.2179  
認証番号：21500BZY00390000

お問い合わせディーラー名

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。  
※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。



KaVo. Dental Excellence.

## カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ●〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481  
大阪本社 ●〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451  
札幌営業所 ●Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ・仙台営業所 ●Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376  
名古屋営業所 ●Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ・福岡営業所 ●Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

H014ALAL201209