

マルチカプリングのメンテナンス

① 止水バルブ

マルチカプリングの水が出ない場合、止水バルブが閉じている場合があります。

止水バルブの2つの赤い印を合わせるとバルブが開になります。赤い印が離れている場合、バルブが閉まっている可能性がありますのでマルチカプリングを回して赤い印位置を合わせてください



② ライトバルブ交換

マルチカプリング先端のライトバルブケースを回し、このケースを取るとライトバルブが外れます。

新しいライトバルブの2本の端子とマルチカプリング側の電極の向きを合わせ挿入してください。

LEDの場合は端子に+-の極性がありますので、交換後に点灯しない場合は、再度、LEDを外し、180°向きを変えて(極性を反対にし)取り付けてください。



③ O-リング交換

マルチカプリングのO-リングをチェックします。


傷や破損があれば交換します。

マルチカプリングのO-リング交換は、O-リングを指でつまみ、図の様に力をかけ、ゴムを伸ばし、転がすように丁寧に外します。

O-リングを外した後は、その溝をティッシュペーパーなどで清掃します。

新しいO-リングを装着します。

装着後は、カボスプレーを少量指に取りO-リングを潤滑します。

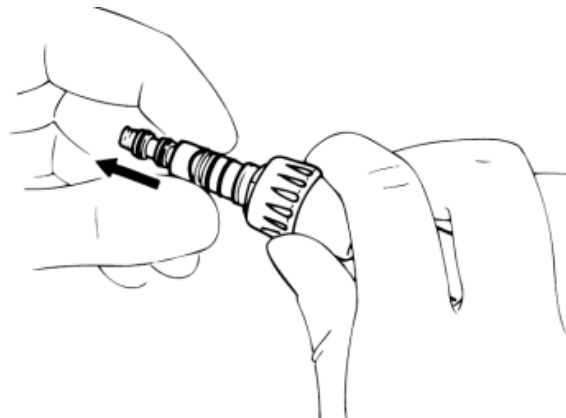

注意

カッター等でゴムを切らないでください。刃先がマルチカプリングの金属表面を傷つけ、致命的な損傷を与える場合があります