


## モーターのメンテナンス

### ① 止水バルブ

モーターの水が出ない場合、止水バルブが閉じている場合があります。

止水バルブを反時計回転に回し、バルブを開いてください

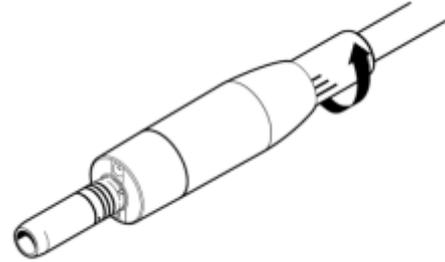

### ② O-リング交換

カプリングのO-リングをチェックします。  
傷や破損があれば交換します。

マルチカプリングのO-リング交換は、O-リングを指でつまみ、図の様に力をかけ、ゴムを伸ばし、転がすように丁寧に外します。

O-リングを外した後は、その溝をティッシュペーパーなどで清掃します。

新しいO-リングを装着します。

装着後は、カボスプレーを少量指に取りO-リングを潤滑します。



**注意**


カッター等でゴムを切らないでください。刃先がインサートの金属表面を傷つけ、致命的な損傷を与える場合があります

### ③ ライトバルブ交換

ケースを外し、古いライトバルブを取り外します。

新しいライトバルブを2本の端子とマルチカプリング側の電極の向きを合わせ挿入してください。

LEDの場合は端子に+-の極性がありますので、交換後に点灯しない場合は、再度、LEDを外し、180°向きを変えて(極性を反対にし)取り付けてください。

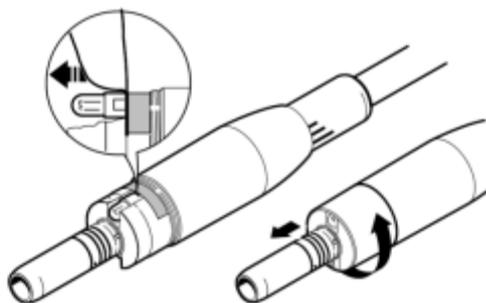

701, 702モーター

703モーター