

インストルメントのお手入れ

KaVo製ハンドピース・インストルメントのお手入れには次の製品をご使用ください。

- ・ カボスプレー
スプレーノズル
(タービン用 ・コントラ類用 ・他社タービン用)



- ・ クアトロケア
- ・ クアトロケアプラス



- ・ ステイティム900J



注意

上記製品の取り扱いについては、各取扱い説明書を参照してください。

KaVo製ハンドピース・インストルメントのお手入れ作業には以下のものが必要ですのでご準備ください。

- ・ グローブ
- ・ ブラシ
- ・ 保護メガネ
- ・ 消毒用アルコール又は専用消毒剤
- ・ ワイプ
- ・ 滅菌パック
- ・ 滅菌パック用専用シーラー

Durr社「FD322」など
毛羽立たないもの

● ハンドピース・インストルメントのお手入れと点検項目

項目	内容	毎朝	患者毎	診療後	外科診療毎	必要に応じて
マルチカプリング	O-リングのチェック・交換	●	●		●	●
	水、エアーのチェック	●			●	
	清掃、消毒		●	●	●	
	点検(変形・照明・水量調整)	●				●
モーター	O-リングのチェック・交換	●	●		●	
	水、エアー、回転のチェック	●			●	
	外ケースの清掃、消毒、(滅菌)		●	●	●	
	点検(変形・照明・水量調整)	●				●
タービン	流水による洗浄		●	●	●	
	カボスプレー、クアトロケアによるスプレー洗浄		●	●	●	
	滅菌		●	●	●	
	点検					●
コントラ	流水による洗浄				●	
	カボスプレー、クアトロケアによるスプレー洗浄		●	●	●	
	滅菌		●	●	●	
	点検					●
エアースケーラー	チップの取り外し、消毒、滅菌		●	●	●	
	流水による洗浄		●	●	●	
	カボスプレー、クアトロケアによるスプレー洗浄		●	●	●	
	滅菌		●	●	●	
	点検					●
電気スケラー	チップの取り外し、消毒、滅菌		●	●	●	
	本体、スリーブの清掃、消毒		●	●	●	
プロフィール	ノズルの取り外し、清掃、消毒、滅菌		●			
	本体清掃、滅菌		●			
	点検					●
光重合器	清掃、消毒		●	●		
	リング、ファイバーの清掃、点検		●	●		
電気メス	チップの取り外し、洗浄、滅菌		●	●	●	
	本体清掃、滅菌		●	●	●	

● 外科用治療機器のお手入れと点検項目

項目	内容	毎朝	患者毎	昼休み	診療後	毎週	外科診療毎	必要に応じて	1年毎
外科治療機器	治療前チェック(モーター、生食等)						●		
	治療前モーターキャリブレーション						●		
	ホース清掃、消毒、滅菌						●		
	モーター清掃、洗浄、滅菌						●		
	電気メス清掃、滅菌						●		
	チップ等清掃、滅菌						●		
	インストルメント洗浄、注油、滅菌						●		
	キャリブレーションツール交換								●
	モーター点検							●	●
	インストルメント点検							●	●