

マルチカプリングのお手入れ

- ・マルチカプリングは滅菌できません。
表面をワイプで消毒します。
- ・マルチカプリングのOリングをチェックします。
傷や破損があれば交換してください。



注意

- ・Oリングの取り外しは、図の様にOリングを指で押し出してから、転がして外します。
(探針やカッター等使用しないでください。刃先がマルチカプリングの金属表面を傷つけ、損傷を与える場合があります。)
- ・Oリングを取り外したカプリングの溝の汚れをティッシュペーパーなどで取り除きます。
- ・新しいOリングを転がして装着します。
- ・カボスプレーを少量指に取り、Oリングを潤滑します。