


● HF Surgery unit (電気メス)のお手入れ

* HF Surgery unit (電気メス)の販売は終了しました



チップ

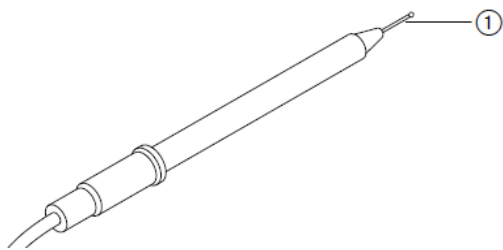

チップの絶縁部①を持って電気メス本体から取り外してください。


電気メス本体は、ワイプで丁寧に拭き上げ、滅菌パックに入れ、その後、135°Cまでの滅菌処理を行います。

滅菌処理が終わったインストルメントは次に使用するまで滅菌パックに入れて保管してください。



チップは水につけて、堆積物や汚れを丁寧に取り除きます。その後、135°Cによる滅菌を実施します。

チップは、先端の破損等を防止する為、専用ケースで保管してください。

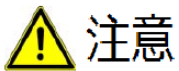

注意

チップは薬液洗浄を行わないでください。薬液に浸しますと隙間に薬液が浸透し、チップの寿命が短くなります。必ず、水のみで汚れを落として下さい

