



# KaVo プロフィーフレックス 3 2018 製品ラインナップ

KaVo プロフィーフレックス 3 2018	製品番号	
KaVo プロフィーフレックス 3 2018 ブラック	1.000.4672	
KaVo プロフィーフレックス 3 2018 バイオレット	1.006.9926	
KaVo プロフィーフレックス 3 2018M (モリタαカプリング接続用)	1.001.5066	

プロフィーパール (主成分: 炭酸カルシウム)	製品番号	
プロフィーパール ニュートラル ボトルタイプ (250 g×4 本)	1.010.1798	
プロフィーパール ニュートラル スティックタイプ (15 g×80 袋)	1.010.1826	
プロフィーパール ミント スティックタイプ (15 g×80 袋)	1.010.1828	
プロフィーパール ピーチ スティックタイプ (15 g×80 袋)	1.010.1829	
プロフィーパール オレンジ スティックタイプ (15 g×80 袋)	1.010.1830	
プロフィーパール カシス スティックタイプ (15 g×80 袋)	1.010.1831	
プロフィーパウダー (主成分: 重炭酸ナトリウム)	製品番号	
プロフィーパウダー オレンジ (15 g×80 袋)	1.007.0014	
プロフィーパウダー ベリー (15 g×80 袋)	1.007.0015	
プロフィーパウダー チェリー (15 g×80 袋)	1.007.0016	
プロフィーパウダー ミント (15 g×80 袋)	1.007.0017	

販売名: カボ プロフィーフレックス 3 2018  
 一般的名称: 能動型機器接続歯面清掃用器具  
 承認番号: 21900BZX00151000  
 管理医療機器

販売名: プロフィーフレックス3/ハンドピース 2018M  
 一般的名称: 能動型機器接続歯面清掃用器具  
 承認番号: 21900BZX00152000  
 管理医療機器

販売名: プロフィーパール  
 一般的名称: 歯面研磨剤  
 届出番号: 27B1X00039000011  
 一般医療機器

販売名: プロフィーパウダー  
 一般的名称: 歯面研磨剤  
 届出番号: 27B1X00039000057  
 一般医療機器

# FUN, FRESH AND EFFECTIVE.

健康な歯と明るい笑顔のために  
 簡単で効果的なクリーニング  
 KaVo プロフィーフレックス3 2018



**NEW!**



KaVo. Dental Excellence.



KaVo. Dental Excellence.

## カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481  
 大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451  
 札幌営業所 ● Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ● 仙台営業所 ● Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376  
 名古屋営業所 ● Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ● 福岡営業所 ● Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844  
<http://www.kavo.jp>  
 VICPJB1402V1 INS-046

※ 本カタログに掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合がございます。  
 ※ 製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございます。

# プロフェッショナルなKaVoの予防治療システム 患者さんの快適さと満足を実現

健康な歯と明るい笑顔のためには定期的な予防治療が必要です。快適でやさしい予防治療は患者さんの安心と満足、そして予防治療の定着をもたらします。

KaVoは快適でやさしい予防治療に向けた最高のサポートを提供します。歯のクリーニングやポリッシング、虫歯の発見まで、KaVoのソリューションは使いやすさと患者さんには快適でやさしい治療を実現します。

歯肉炎、歯周病および虫歯の予防は歯のクリーニングが特に重要です。歯面清掃器のKaVoプロフィーフレックス3、そして低刺激性の歯面清掃用パウダーのプロフィーパールとプロフィーパウダーは、術者と患者さんにやさしい治療を実現します。

# 簡単かつ効率的な予防治療

## 簡単かつ効率的な治療

KaVoプロフィーフレックス3は、お使いのトリートメントユニットに接続されたフットスイッチで操作ができ、予防治療を無理なく継続できます。

## 最適な効果を実現する高い性能

KaVoプロフィーフレックス3のノズルは、パウダーを効果的かつ効率的に噴霧できるよう設計されています。グリップスリーブは360°回転するため、たとえアクセスが困難な部位でも優れたクリーニング効果が得られます。

## 優れた安全性

KaVoプロフィーフレックス3は熱消毒ならびにオートクレーブ滅菌が可能です。衛生基準(RKIガイダンスなど)に準拠しています。

## 時間も節約

KaVoプロフィーフレックス3を使えば、効果的なクリーニングを短時間で行うことができます。パウダーの充填や本体の清掃もいたって簡単で、貴重な時間を節約できます。短時間での治療は、患者さんや術者にとって大きなメリットです。

## KaVoプロフィーフレックス3 特長とメリット

- 360°回転のグリップスリーブ  
- 臼歯部への処置も容易
- 迅速かつ容易なパウダー充填と清掃
- パウダーの噴霧量を患者さんごとに選択  
- 痛みに敏感な患者さんにも快適な治療を実現
- 人間工学に基づいたデザイン  
- 操作はストレスフリーで快適
- 熱消毒、またはオートクレーブ滅菌(135°Cまで)
- KaVoマルチフレックスカプリングに接続
- さまざまな用途に対応  
- 専門歯科医ならびに一般歯科医にとって効率的





# プロフェッショナルな KaVo の予防治療システム 多様な製品ラインナップ

collection

## 楽しく予防治療

多くの患者さんが健康な歯と笑顔のために、日常から予防が重要であると考えようになりました。患者さんは快適でやさしい治療を望んでいます。KaVo は、専門的な予防関連製品のブランドとして、患者さんにも術者にもご満足いただける製品をご提供します。

KaVo の予防治療システム

- 使い方、操作が簡単
- 患者さんに喜ばれる治療
- システム的で効率の良いワークフロー

**KaVo 製品を使った予防治療  
術者にとってシンプル  
患者さんにとって快適な治療**



## 10年の実績 KaVo プロフィーパール さわやかなフレーバーで新しく

KaVo プロフィーパールは、10年にわたる信頼と実績のもと、刺激の少ない球状の粒子を使用したクリーニングの価値を証明してきました。滑らかな表面で、歯を効果的にやさしく清掃します。KaVo プロフィーパールにフレーバーが新たに加わり、製品ラインナップが豊富になりました。

## KaVo の歯面清掃用パウダーは、 多くの用途に使用できます。

### ステイン・ブランク:

- お茶やコーヒーによる着色
- 喫煙による着色
- バイオフィルム

### シーラント:

- シーラント前の溝のクリーニング

### 歯列矯正:

- ブリッジのクリーニング
- 装着前の表面処理
- 残留接着剤の除去

### 歯科保存治療:

- 修復材料(合成樹脂)、セラミックインレー  
およびベニアの接着向上

### 補綴治療:

- ブリッジ、クラウン、インレー、オンレーの色調に  
近づけるための健康な歯のクリーニング

### 審美歯科治療:

- ホワイトニング前のクリーニング  
(歯本来の色/色調を正確に確認)
- ホワイトニング剤の効果を最大限に得るための  
歯組織の処理



## KaVo の歯面清掃用パウダー 製品ラインナップ

- 新しいフレーバーが追加され、  
豊富なパウダー製品ラインナップ



## KaVo プロフィーパウダー(重炭酸ナトリウム) さまざまな用途に対応

KaVo プロフィーパウダーは水溶性の重炭酸ナトリウムを主成分とし、粒子径は 60 ~ 70 μm です。フルーティーなフレーバーを楽しみながら、ブランクを簡単かつ効率的に除去できます。KaVo プロフィーパウダーのフレーバーは、チェリー、ベリー、ミント、オレンジから選べます。





# KaVo プロフィーパール 低研磨性でクリーニング力の高い球状粒子

## 10年にわたる実績

KaVo プロフィーパールは球状のパウダー粒子により、最適のクリーニング能力を実現します。球状のパウダー粒子の表面は従来のパウダーよりも接触点が多く、より効率的に作用します。しかも、とがった部分がないため、歯を傷めることはありません。やさしく歯面に当たり、多くの患者さんに好まれています。KaVo プロフィーパールは、ミント、ピーチ、オレンジ、カシス、ニュートラル（無味）の5種のフレーバーから選べます。

KaVo プロフィーパールは多くの用途があります。

- 着色、プラーク、バイオフィルムの除去
- 裂溝の充填前の歯のクリーニング
- プリーチ前の歯のクリーニング



KaVo プロフィーパールには角やエッジがありません（粒子径：60～70μ）。



KaVo プロフィーパールは優れたクリーニング効果を発揮し、歯肉を傷めません（150倍拡大図）。



無限の接触点で歯の表面をなめるようにクリーニングし、効率的に作用します。



KaVo プロフィーパール：角度は歯面に対して10～60°。角度が高くなっても無限の接触点で歯の表面を転がり続けるため、高いクリーニング効果を発揮します。

### KaVo プロフィーパール

- 主成分は炭酸カルシウム  
— 生体適合性のある成分
- 球形のパウダー粒子  
— 歯にやさしい治療
- 低研磨性  
— 簡単かつ効率的なクリーニング
- pH値を上げて酸を抑え、口腔細菌叢に効果的にクリーニング
- 選べるフレーバー  
— ミント、ピーチ、オレンジ、カシス

※ ミント/ピーチ/オレンジ（シトラス）/カシスにアレルギーがある方には使用しないでください。  
※ 補綴金属物には直接噴射させないでください。補綴金属物が曇る可能性があります。

PEARLS



# KaVo プロフィーパウダー 効果的なクリーニング力とフルーティーなフレーバー

## 汚れを簡単かつ効果的に除去、さまざまな用途に柔軟な対応

KaVo プロフィーパウダーは、充填前の裂溝をやさしくクリーニングすることができます。また、虫歯や歯周炎の予防のために、プラークやバイオフィルム、着色を簡単かつ効果的に除去できます。KaVo プロフィーパウダーは、審美補綴などの用途にも最適でブリッジ、インレー、クラウン、プリーチ前の状態を健康な歯の色に適合させます。




洗浄前



KaVoプロフィーフレックス3での洗浄後



KaVoのPROPHYflex 3で洗浄後の走査型電子顕微鏡画像（20倍および200倍の拡大図）

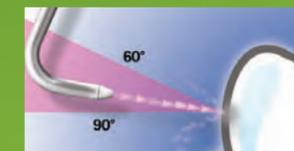

重炭酸ナトリウム：歯面に対して60～90°パウダー粒子が歯の表面に当たり、すぐに跳ね返ります。

## KaVo プロフィーパウダーで 患者さんの好みに合わせた快適な治療を

KaVo プロフィーパウダーは、チェリー、ベリー、ミント、オレンジの4つのフルーティーなフレーバーから選べます。

KaVo プロフィーパウダーは水溶性の重炭酸ナトリウムを主成分とし、粒子径は60～70μです。プラークを簡単かつ効率的に除去でき、同時にフルーティーなフレーバーをお楽しみいただけます。

### KaVo プロフィーパウダー

- 主成分は重炭酸ナトリウム（炭酸水素ナトリウム）  
— 生体適合性のある成分
- 水に素早く溶解
- 微粒子パウダーにより効果的かつやさしく洗浄
- 使用方法が簡単で効率的
- 選べるフレーバー  
— オレンジ、ベリー、ミント、チェリー

※ オレンジ（シトラス）/ベリー/ミント/チェリーにアレルギーがある方には使用しないでください。  
※ 無塩食、減塩食の患者さんや腎障害の患者さん、慢性下痢の患者さんには使用しないでください。  
※ 補綴金属物には直接噴射させないでください。



POWDER

