


KaVo ESTETICA® E70

快適な操作性  
快適な診療空間

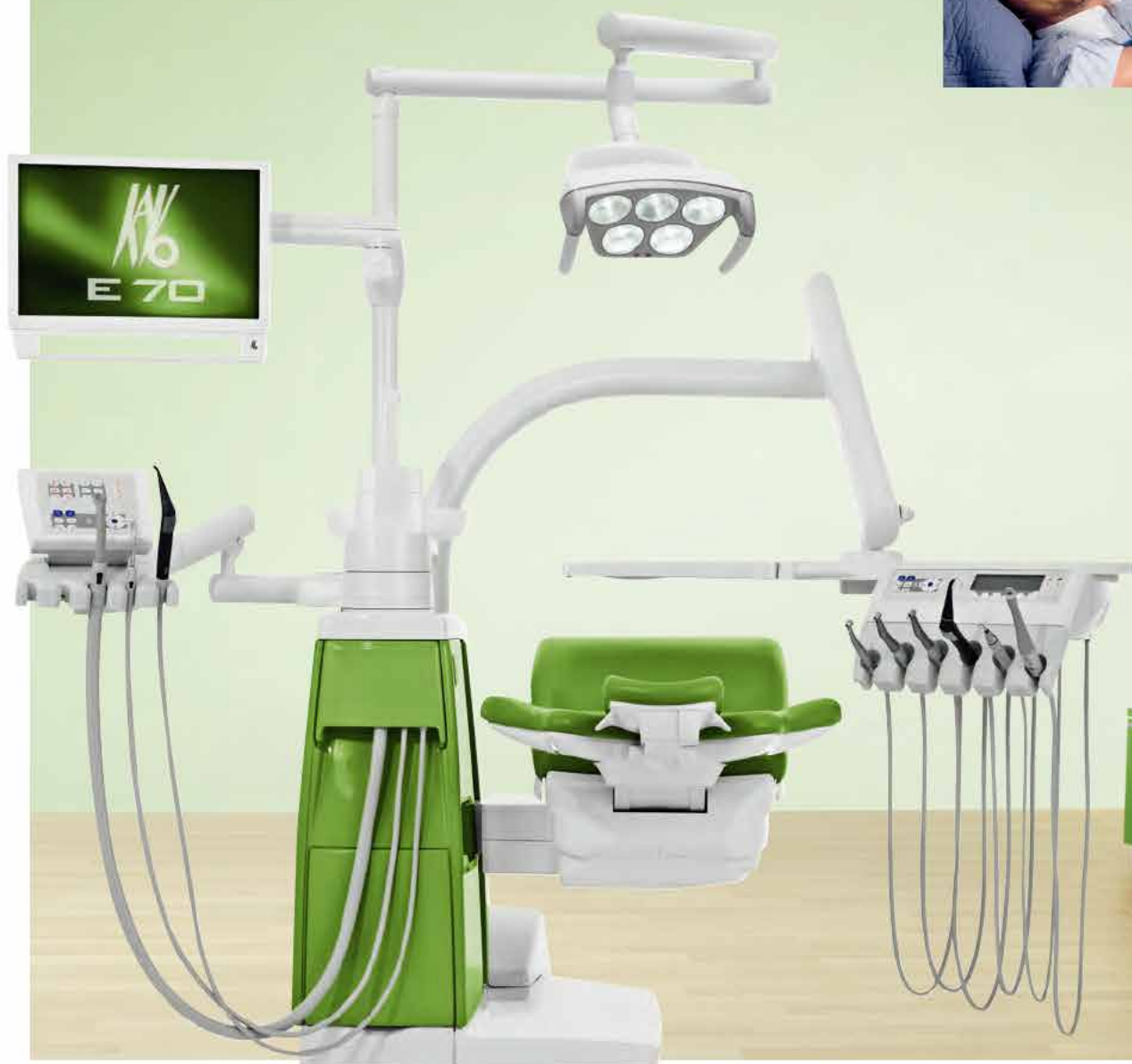

KaVo. Dental Excellence.

# KaVo ESTETICA® E70 実用性に快適性をプラス

## 快適で実用的な診療空間

エステチカシリーズは快適な診療空間を実現する理想のトリートメントユニットとして世界中の先生に絶賛されています。なかでもエステチカ E70 は、その快適性を追求しつつ実用性を実現したトリートメントユニットです。快適で人間工学に優れ、さらにインテリジェントで効率よく個々の診療スタイルに対応できるコンポーネントや機能により最適な空間を創出します。

開放的なサスペンド式チェアを採用し、チェア下にすっきりしたフリースペースも確保しています。

## 現在だけでなく将来にも快適なシステム

あらゆるご要望にお応えするために、エステチカ E70 は診療スタイルやニーズに合わせてカスタマイズできます。治療中のワークフローをシンプルにし時間を節約してストレスを軽減する新開発のオペレーションシステムです。また、自動衛生機能の搭載により先生やアシスタントの貴重な時間を大幅に節約し、治療に集中することができます。

機器を追加したい場合も後から搭載できる、将来を見据えた設計です。





## 求められるインテリジェントなシステム

自然なポーズで快適操作 - よりスムーズで安全な操作を実施します -

### 簡単にスピーディなオペレーション

エステチカ E70 のコントロールロジックは、操作に慣れる時間や操作中に思いがけないミスが起きるといった不安を解消しました。治療に必要なすべての機能に素早くアクセスできるオペレーションを実現します。

### 足元にゆとりを生むチェアデザイン

患者さん用チェア下のフリースペースにより、先生やアシスタントの不自然な姿勢を解消するため、かつてないレベルの足元の快適さを可能にし最適なポジションでの治療を実現しました。最適化されたエルゴノミクスが生み出す心地よさが、すべての作業をさらに快適にします。

### 多様性から生まれる本物の快適さ

次ページから、ドクターエレメント、アシスタントエレメント、サスペンド式チェア、フットコントローラなど、診療空間に実用的な快適さをもたらすテクノロジーをご紹介します。





## すべてが簡単で思いのままに

分かりやすい操作パネル  
治療ごとの設定が保存可能

操作パネルはすべての機能が一目瞭然です。大切な機能はダイレクトにアクセスでき貴重な時間を節約できます。

例えば、ドクターエレメントの設定保存機能は、治療ごとにモーターの速度やトルクを設定すれば治療に応じてワンタッチで設定を呼び出すことができます。どのような治療手順でも高い効率性を維持できます。

インスツルメントの組合せを自在に変更  
USB 対応も可能

インスツルメントホルダーは5本または6本(オプション)のインスツルメント(口腔内カメラを含む)をそのまま収納できます。インスツルメントが6本でもテーブルの幅は変わりません。組合せを変更しても簡単に対応でき、テーブルサイズが同じなので、いつでも必要に応じて変更できます。また、ご希望に応じてUSBインターフェースも内蔵可能です。

5本用または6本用のインスツルメントホルダーをお選びいただき、必要に応じて簡単に変更できます。

## エンド治療にも対応可能

統合型のエンド機能パッケージがオプションとしてインストールでき、エンド治療用の装備を追加する必要がありません。人間工学的な診療の最適化と動線の大幅な短縮でワークフローの円滑化ができます。

## 主な特徴

## ドクターエレメントとインスツルメント

1. 自由な組合せとレイアウトが可能なモジュール式のインスツルメントホルダー
2. 100回転から高トルクで利用できる小型・軽量のブラシレスマイクロモーター イントラ LUX KL703 LED (新開発のスマートドライブテクノロジーで制御)
3. ER60cam 口腔内カメラ接続可能 (オプション)
4. エンドモードでエンド用のトルクコントロールが可能 (オプション)
5. センサー付きエアブレーキ
6. USB インターフェース
7. 広くて使いやすいダブルノームトレイ

## ドクターエレメントが最適なポジションに

## 診療スタイルに応じて選べる3タイプ

常に最適なポジションにドクターエレメントを置くことができるので立位でも座位でも、アシスタントがいなくても常にコントロールできます。これはエステチカE70のテーブルタイプ(T)、スイングアームタイプ(S)、カートタイプ(C)のどのタイプでも同様です。お好みに合わせて人間工学的な3つのタイプの中からお選びください。

## 主な特徴

## トリートメントセンター


1. シンプルな操作による直観的で効率的なワークフロー
2. 主な機能ボタンをダイレクトに操作
3. 拡張可能なモジュール
4. 正しい位置にハンドピースを戻すことができるゆったりした配列

## スイングアームタイプ

ドクターエレメントは常に最も使いやすい位置に配置できます。ハンドピースのホースは90 cmまで伸ばすことができ、人間工学的に最適かつ最も効率の良いポジションで治療を進めることができます。テーブルの高さをできるだけ低く抑えているため、先生も患者さんも疲れにくくリラックスした治療を行えます。また、無影灯、マイクロスコープ、ヘッドランプ、サージカルルーペなどと干渉しないように位置が工夫されています。アーム部はバランスが良く、スプリングの強さは個別に調節できます。治療時に2段階のロック位置を使用することができ、スプリングによる引き戻しの力がなく重さを感じません。



ドクターエレメントのスイングアームは、最適な場所に配置することができます。

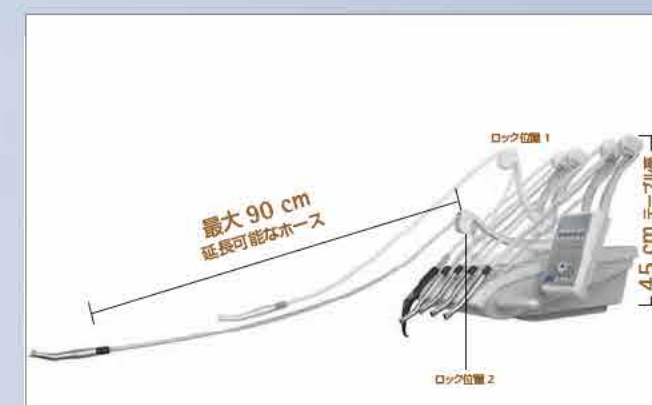

高さを45 cmに抑えたテーブルや最適なバランスを保ちスプリングの強さを個別に調節できるアーム部など、人間工学的な機能を備えています。ハンドピースのホースは最大90 cmまで伸びるので治療ポジションを選びません。



## 最適な診療環境を実現する アシスタントエレメント

### アシスタントのモチベーションも向上

アシスタントにとっての最適な診療環境は、診療効率の向上につながります。アシスタントエレメントは、ご希望に合わせてきめ細かな調整ができます。重要なツールや機能はすべて人間工学に基づいて配置しています。

LED 光重合器や外科用吸引システムの追加など、必要に応じてアシスタントエレメントを選択できます。

### 主な特徴

#### アシスタントエレメント

1. ダイレクトキーによる簡単操作
2. LED 光重合器などのインスツルメントを追加可能
3. USB インターフェース (オプション)
4. 柔軟性な高さ調節、広範囲な操作角度

ダイレクト機能による簡単操作で常に素早くチェア、消毒、インスツルメントなどの機能にアクセスできます。

## ハンズフリーで治療に集中できる フットコントローラ

### ハンズフリーシステム

フットコントローラのペダルを軽く踏むだけで、すべてのインスツルメント、チェア機能、マルチメディア機能(\*)を操作できます。繰り返し行う治療ステップもメモリー機能と連動してフットコントローラで操作できるほか、特別な制御システムにより落ち着いて正確に操作でき、安全かつ衛生的に治療できます。

(\*) モーター回路だけでなくエアー回路 (タービンなど) の回転数やスプレーなどの設定をメモリー機能で呼び出しフットコントローラで制御できます。

### 衛生面の向上は当然の結果

交差感染を防止する上で接触を避けることは大変重要です。ハンズフリーマルチフットコントローラが診療中の感染リスクの防止に役立ちます。

### ワイヤレスフットコントローラ

ワイヤレスフットコントローラは配線を必要とせず安全で清潔です。高性能な充電式バッテリーは3時間の充電で約2ヵ月間使用できます。自然放電や充電池のメモリー効果\*もないため、いつも安心してフットコントローラをお使いいただけます。(オプション)

\*メモリー効果: 充電を繰り返すとフル充電ができなくなることを指します。

### スライド式により自然な姿勢で 足元からリラックス

フットコントローラの大変なポイントは先生の足の動きです。エステチカ E70 のフットコントローラは、足首の上下の曲げ伸ばしではなく、かかとを支点に足を左右に動かして操作するスライド式のフットコントローラです。つまり、筋肉の緊張度を変えるのではなく、足をリラックスさせたままそっと左右に動かすことでハンドピースの速度を正確に調節します。長い診療の一日を終えた後も、脚の筋肉はリラックスした状態に保たれています。また、フットコントローラは立位の治療時でも人間工学的にストレスフリーで使いやすくなっています。

### 主な特徴

#### マルチフットコントローラ

1. チェアとインスツルメントの2つの機能をコントロール
2. 足の疲労が少ない操作性
3. 正確で簡単な速度コントロール
4. ハンズフリーによる感染防止をコンセプトとした衛生面の向上
5. 置き場所を選ばないデザイン  
(ワイヤレスフットコントローラ — オプション)

アクセルやブレーキを踏むよりも疲れの少ない操作です。足を左右にそっと動かすことで速度を正確にコントロールできます。長時間にわたる筋肉の緊張もなく、リラックスして操作できます。ワイヤレスタイプはコードがないため、より自由に配置でき衛生面でも優れています。



KaVo. Dental Excellence.



## イメージどおりの診療空間を実現

### 豊富なカラーバリエーションと機能

診療スタイルに合わせてあらゆる選択肢をご用意しました。治療の内容やお好みに合わせて必要な機能やお好きなカラーをお選びください。さまざまなコンポーネントが1台のトリートメントユニットにシームレスに統合され、導入後の変更や治療内容の変更にもスムーズに対応できます。

### さまざまな形で個性を表現

次のページでは日々の診療に彩りを添える新しいカラーや機能、さらには先生、アシスタント、患者さんのニーズに合わせて自由にカスタマイズできるエステチカ E70 についてご紹介します。





## 豊富なカラーバリエーションとデザイン

### インテリアやイメージに合わせて選択

クラシックな落ち着いたテイストから、斬新なアクセントを効かせたテイストまで治療室の雰囲気に合わせてお選びいただけます。先生のお好みに合わせてエстетика E70 をカスタマイズできます。いつまでも色褪せることのないカラーデザインと豊富なカラーバリエーションであらゆるご要望にお応えし、細部に至るまで診療空間に合わせたトリートメントユニットを実現します。

#### 主な特徴

##### カラーとデザイン


1. 豊富なカラーバリエーション
2. 劣化の少ない高品質な素材と飽きのこないデザイン

#### 塗装カラー



オレンジ アップルグリーン リードグリーン デンタルホワイト

#### シートカラー

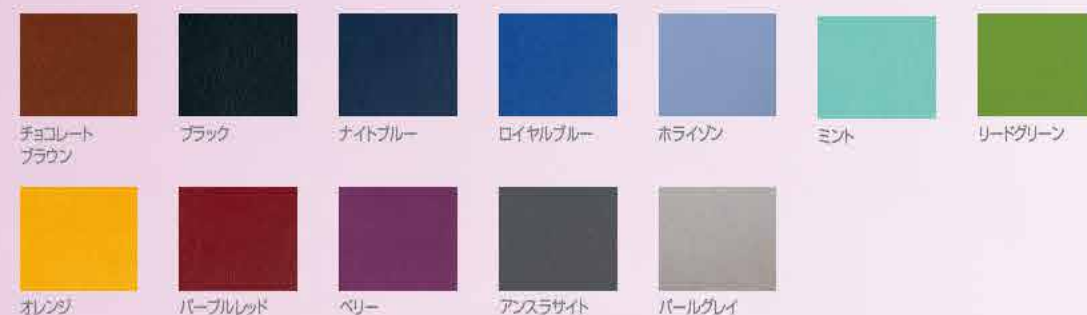

## 治療スタイルの進化にも対応

### 優れた柔軟性

ドクターエレメントとアシスタントエレメントは共に、オプションを追加できるので先生やアシスタントのワークスタイルに最適な装備をお選びいただけます。先生のご要望やチーム全体のニーズに合わせてカスタマイズできるだけでなく、将来的なインスツルメントの追加に対応できる拡張性も備えています。

### 常に将来に目を向けて

外科用、エンド治療用、インプラント用、口腔内カメラなど、各種装備を取り揃えて先生やアシスタントのご要望にお応えします。ドクターエレメントのカプリングシステムは、すべての KaVo インスツルメントに対応しています。また、トリートメントユニットとインスツルメント間のインターフェースとして将来の拡張に対応しています。

#### 主な特徴

##### 装備

1. 拡張性に優れたドクターエレメントとアシスタントエレメント
2. 外科用、エンド治療用、インプラント用、口腔内カメラなどの各種装備



KaVo. Dental Excellence.

## 足元の自由度を高めるサスペンド式

### 自然な姿勢で治療に専念

サスペンド式チェアの採用で足元の動きが自在になります。患者さん用チェア下のスペースがフリーなので、先生もアシスタントも治療の流れに合わせて無理のない姿勢で作業しやすいポジションを選ぶことができ、より効率的な治療を行うことができます。

### 主な特徴

#### サスペンド式チェア

1. サスペンド式チェアにより足元のスペースを大きく確保
2. チェアの高さを 350 mm ~ 900 mm の間で調節でき  
座位や立位で治療が可能
3. チェアの始動・停止が静かな静音設計
4. 緊急時の自動トレンデレンブルグ体位（ショック体位）ポジション

### 座位でも立位でも治療が可能

体格に合わせた調節やお好みの姿勢での治療ができます。チェアの高さは 350 mm ~ 900 mm の間で調節できます。900 mm にセットすると、身長 180 cm を超える長身の先生でも、チェアに仰向けに寝た患者さんを立位で治療できます。最も低い 350 mm は高齢者でも安全に乗り降りできます。

### 患者に快適なチェア

高齢の患者さんには、若年層や小児の患者さんとは異なるニーズがあります。エステチカ E70 は優れた柔軟性を備え、すべての患者さんが治療を快適に受けられるようにサポートします。あらゆる体型および体格の患者さんに対応できます。また、トレンデレンブルグ機能により緊急時に速やかに自動的にトレンデレンブルグ体位のポジションをとることができます。

トリートメントユニットの動作に対する患者さんの不安を軽減できるように、静音スローモードも利用できます。また、テンピュールクッションの使用により治療が長時間に及んでも患者さんの姿勢を快適に保つことができます。



歯科業界で初めて「背中に優しい作業環境を提供する」として AGR 認定を取得しました。（背健健康推進協会）



最低作業ポジション 350 mm  
座位の患者さんも自然な姿勢で治療できます。

最高作業ポジション 900 mm  
身長 180 cm を超える長身の先生でもチェアに  
仰向けに寝た患者さんを立位で治療できます。

## カスタマイズ可能な患者さん用チェア

### 患者さんに快適な診療環境

バックレストは患者さんの年齢や体格を問わない人間工学的に優れたデザインです。

コンフォートバックレストは、患者さんにできるだけ快適な状態で治療を受けていただくためのバックレストです。幅広いバックレストが患者さんの身体をしっかりと支え快適にサポートします。この特殊なバックレストにより、長時間の治療も患者さんは仰向けの姿勢で快適に治療を受けることができます。

オプションのプログレスバックレストは、患者さんがリラックスした状態で治療を受けられるので、特に小児の治療では大きなメリットになります。

### 主な特徴

#### 患者さんのポジショニング

1. 2 種類のバックレスト（プログレスタイプ — オプション）
2. ヘッドレストは、電動または手動で調節可能なヘッドレスト（電動 — オプション）
3. 必要に応じて右側に取り付け可能なアームレスト（オプション）



コンフォートバックレスト  
最良の座り心地をもたらす幅広いバックレストが患者さんの肩をしっかりとサポートします。



プログレスバックレスト（オプション）  
治療中の姿勢を補正することにより、特に小児の治療の際に患者さんにアクセスしやすくなります。



## 効率的なシステムでゆとりの診療

### 効率が生み出す本当の「快適性」

貴重な時間を節約し診療効率を向上します。時間に追われるのは患者さんにとっても理想的ではありません。KaVoのトリートメントユニットは、衛生面などのさまざまな作業を自動化することで、先生やアシスタントの診療の効率アップに貢献します。

### 緻密な作業に慌たしは禁物

すべての機能が統合され最適なバランスで配置されているので、自然な動きや操作を行えます。人間工学的に最適化された作業プロセス、時間を節約するワークフローはよりリラックスしたアプローチを実現するためのものであり高い効率性はその結果として自然に生まれました。

### より短時間で、より高い信頼性を実現

次のページでは、先生、アシスタント、患者さんに衛生面でのより大きな安全性と日々の作業の迅速化を実現する機能についてご紹介します。また、スムーズで効率の良いワークフローと将来に対応する優れた拡張性がもたらす快適性と高品質のメリットについてもご紹介します。





# スタンダードプリコーションの実践 患者さんに信頼される衛生管理

## 自動衛生機能による簡単で確実な衛生対応



集中水消毒システム



ハイドロクリーン

## 水消毒システムによる水路管の衛生管理

オキシゲナル®6を使用した集中水消毒システムと常時水消毒システムの両システムにより、水路管内を衛生的に保ちます。集中水消毒システムは高温度の過酸化水素水を用いて水路管を約30分間漬け置き処理します。

常時水消毒は低濃度の過酸化水素水を用いて、常に水路管を清潔にするシステムです。トリートメントユニットに流れる水が不衛生になるのを防ぎます。さらに、トリートメントユニット内を流れる水は行き止まりがないように設計されており、常に流動的で溜り水になって不衛生な状態になることを防止しています。

## ハイドロクリーン機能

自動水洗浄機能（ハイドロクリーン）により、バキューム等の吸引回路や排水回路全体が水洗いされ、デカセプトルゲルにより自動的に洗浄が行われます。手作業が不要なためスタッフが洗浄剤に直接触れることなく、簡単に排水回路を清潔に保つ作業を行うことができます。



オキシゲナル（過酸化水素水6%溶液）とデカセプトルゲルの両方をユニットにビルトインしています。オキシゲナルは、必要な濃度に自動的に希釈され集中水消毒と常時水消毒に使用されます。デカセプトルゲルは、バキューム・排水回路の洗浄に使用されます（ハイドロクリーン機能）。すべての作業が自動的に処理されるため簡単に短時間の作業で衛生管理ができます。



患者さんの軟組織を吸引してカニューレが詰まっても、カニューレ接続部周囲に標準装備されているサブエアーチャンネルから必要なバイパスエアーが供給されます。吸引が継続することで汚染された液体の逆流を防ぎ汚染をほぼ完全に排除します。この機能は現在、KaVoトリートメントユニットのすべてに標準装備されています。

## 洗浄・消毒が可能なスピットンとハンドル



先生やアシスタントの手が触れる部分にも十分な配慮がされています。頻繁に手を触れるハンドル、インスツルメントホルダー、スピットンボウルなどのパーツは取り外しが可能です。交差汚染防止のために必要に応じて洗浄、消毒、または滅菌できます。

## 汚染防止対策


給水系はKaVoのインスツルメントとモーターに組み込まれたサックバック防止システムにより汚染から保護されています。このシステムにより汚染した水のユニットへの逆流を防止し、患者さんの安全を守ります。

## モーター駆動の自動スピットンボウルでより快適に

うかい位置にスピットンボウルの位置を記憶させておくと、スピットンボウルが患者さんの方へ自動的に移動し簡単にうがいができます。患者さんが治療ポジションに戻るとスピットンボウルも自動的に元の位置に戻ります。（オプション）

ポーセレンスピットンボウルとカバーなどの重要な部分は、熱消毒が可能です。

水消毒システムにより水路を衛生的に保ちます。

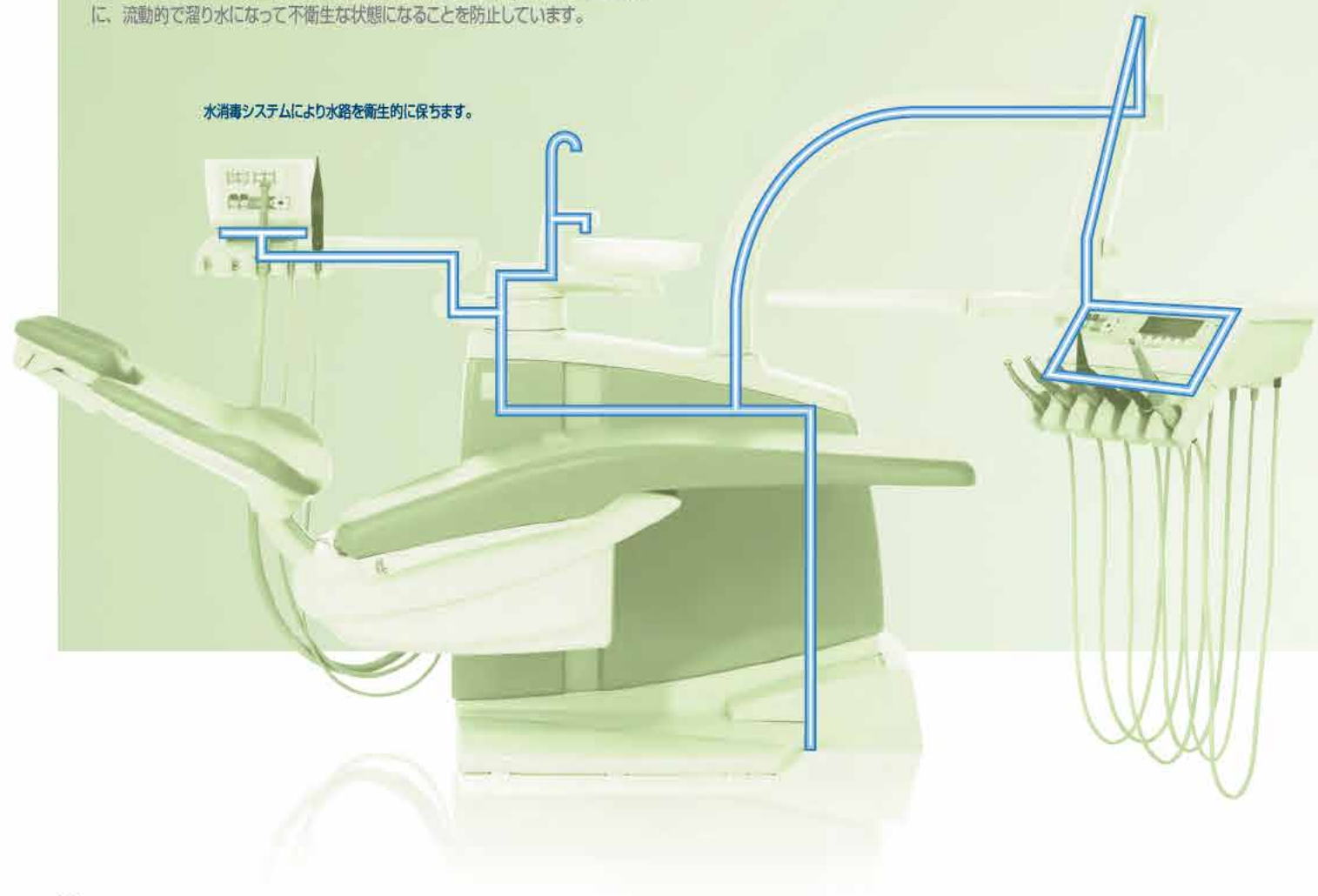

## 主な特徴

### 短時間で簡単にできる秀れた衛生管理

1. 自動化された衛生管理
2. シンプルな操作
3. 取り外し可能なパーツ
4. 自動スピットンボウル（オプション）



## 最適なワークフローを実現するシステム

### 手技のスピードアップを実現するドクターエレメント

スピードが重要になることが多い治療にて、KaVo のドクターエレメントは迅速に情報を提供し、重要な機能をすべてコントロールします。

例えば、患者さんを迅速に無理なくポジショニングし、センサー付きエアブレーキ（オプション）はハンドルを握ると即座に解除され、放すと再び作動します。サービステーブルも必要に応じて左右に旋回させることができます。

### チーム全体の効率をアップ

診療にもチームワークが大切です。そのために、アシスタントエレメントも柔軟なインスツルメントの配置、旋回、高さ調節が可能で、操作パネルにはドクターエレメントと同じように色分けされたボタンを採用しています。診療に不可欠なコミュニケーションのために、アシスタントエレメント、ドクターエレメント、患者さん用チェアの全体的な調和により、すべてのインスツルメントの操作が最適に行われます。


#### 主な特徴

##### 効率化されたワークフロー


1. すべてのコンポーネントを統合（エンド用機能、外科用機能）
2. 各コンポーネントの連動性
3. センサー付きエアブレーキ

ワークフローの最適化により治療中の動線が短縮されます。エンドモーターの内蔵などテクノロジーの統合と最適な人間工学に基づくコンポーネントの配置により無駄な動きを減らします。

従来のトリートメントユニットにおける動線

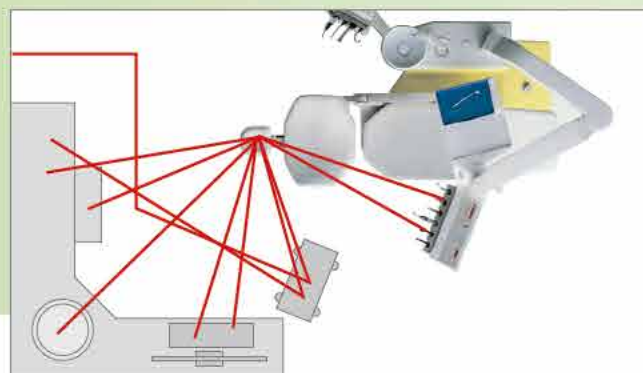

エステチカ E70 における動線

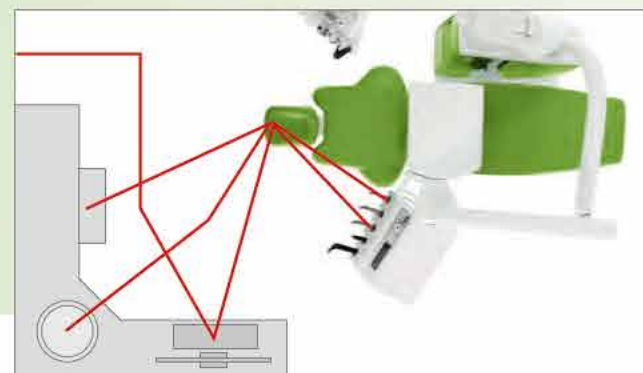

## 「最高峰」を目指すKaVoの品質

### 実証された安全性、語り継がれる信頼性

エステチカ E70 は、継続的なリサーチ、品質管理、徹底的な試験に基づいた製品です。KaVo はこのようなテストやリサーチを繰り返し、最高水準の安全性を確保しています。

極端に体重の重い患者さんを想定したシミュレーションもクリアし、人間工学については優れた臨床歯科医による厳しいレビューを経ています。開発段階でこのような先生のご協力が得られ、日々の歯科診療における幅広いニーズにお応えすることができ、より良い製品のための改良を重ねることができました。

### すべてのコンポーネントが備えた最高レベルの品質

コンポーネント間の全体の相互作用のみならず細部に及ぶ高い機能性を実感していただけます。また、設計面では調和のあるシームレスなワークフローに重点を置いています。最適な状態で淀みなくワークフローを処理できるトリートメントユニットを生み出すのは、優れた製造技術にほかなりません。エステチカ E70 はこのような高い品質基準を満たす製品です。

#### 主な特徴

##### 卓越した品質

1. 高い品質基準に基づく緻密な製造プロセス
2. 高品質な原材料を使用した堅牢な構造
3. すべての機能がシームレスに調和
4. 総合的な長期試験を経た最大級の信頼性



KaVo の定評ある高品質な塗装面と材質



KaVo. Dental Excellence.



お客様の「ニーズ」をお客様の「満足」に

|                                                      | ESTETICA®<br>E70 T | ESTETICA®<br>E70 C | ESTETICA®<br>E70 S |                      | ESTETICA®<br>E70 T | ESTETICA®<br>E70 C | ESTETICA®<br>E70 S |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 患者さん用チェア<br>ソフトシート                                   | ●                  | ●                  | ●                  | サリバイジェクター（排唾管）       | ●                  | ●                  | ●                  |
| バックレスト<br>コンフォート<br>プログレス                            | ●<br>○             | ●<br>○             | ●<br>○             | 第2サリバイジェクター          | ○                  | ○                  | ○                  |
| ヘッドレスト<br>ダブルジョイント式<br>電動式（SOMATIC E）<br>デンビュールクッション | ●<br>○<br>○        | ●<br>○<br>○        | ●<br>○<br>○        | 3F シリンジ              | ●                  | ●                  | ●                  |
| アームレスト<br>右<br>左                                     | ○<br>●             | ○<br>●             | ○<br>●             | MF シリンジ              | ○                  | ○                  | ○                  |
| ドクターエレメント<br>タービンホース（マルチフレックスカプリング 465 LED）          | ●                  | ●                  | ●                  | サデレックミニ LED 光重合器     | ○                  | ○                  | ○                  |
| 追加タービンホース                                            | ○                  | ○                  | ○                  | ハイドロコロイド接続           | ○                  | ○                  | ○                  |
| KL 703 LED マイクロモーター                                  | ●                  | ●                  | ●                  | ERGO Cam4            | ○                  | ○                  | ○                  |
| 追加 KL 703 LED マイクロモーター                               | ○                  | ○                  | ○                  | USB インターフェース         | ○                  | ○                  | ○                  |
| 3F シリンジ                                              | ○                  | ○                  | ○                  | トレイホルダー用サポート         | ○                  | ○                  | ○                  |
| MF シリンジ                                              | ○                  | ○                  | ○                  | 高さ調節式アーム             | ●                  | ●                  | ●                  |
| 5 本用インスツルメントホルダー                                     | ●                  | ●                  | ●                  | ダイアグノデントホルダー         | ○                  | ○                  | ○                  |
| 6 本用インスツルメントホルダー                                     | ○                  | ○                  | ○                  |                      |                    |                    |                    |
| メモデント多機能ディスプレイ                                       | ●                  | ●                  | ●                  | ボディ                  |                    |                    |                    |
| トルクコントロール                                            | ○                  | ○                  | ○                  | ボーセレンスピットンボウル        | ●                  | ●                  | ●                  |
| ERGOcam 4/5                                          | ○                  | ○                  | ○                  | ガラススピットンボウル          | ○                  | ○                  | ○                  |
| ビエソ LED                                              | ○                  | ○                  | ○                  | モーター駆動式スピットンボウル      | ○                  | ○                  | ○                  |
| デンタル X 線ビューア                                         | ○                  | ○                  | ○                  | 常時水消毒システム            | ●                  | ●                  | ●                  |
| パノラマ X 線ビューア                                         | ○                  | ○                  | ○※1                | 集中水消毒システム            | ●                  | ●                  | ●                  |
| インスツルメントスプレーヒーター                                     | ●                  | ●                  | ●                  | ハイドロクリーン             | ●                  | ●                  | ●                  |
| USB インターフェース                                         | ○                  | ○                  | ○                  | 温水ボイラー               | ●                  | ●                  | ●                  |
| 外科用モーターセット                                           | -                  | -                  | ○                  | バキューストップ             | ●                  | ●                  | ●                  |
| ・ SL 550 外科用モーター                                     |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| ・ 外科用モーターホース                                         |                    |                    |                    | 供給システム               |                    |                    |                    |
| ・ 生理食塩水用ポンプ                                          |                    |                    |                    | DVGW ウォーターブロック       | ●                  | ●                  | ●                  |
| アームシステムブレーキ                                          | ○                  | -                  | ○                  |                      |                    |                    |                    |
| 調整式サービステーブル（スタンダードトレイ×2 台用）                          | ●                  | -                  | ●                  | 廃棄処理システム             |                    |                    |                    |
| トレイホルダー（スタンダードトレイ×2 台用）                              | -                  | ○                  | -                  | ソリッドコレクター（重金属回収）     | ●                  | ●                  | ●                  |
| トレイホルダー（スタンダードトレイ×1 台用）                              | -                  | ○                  | -                  | デュール アマルガムセパレーター CAS | ○                  | ○                  | ○                  |
| アシスタントエレメント<br>バキュームホース                              | ●                  | ●                  | ●                  | デュールセパレーター CS1       | ○                  | ○                  | ○                  |
|                                                      |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
|                                                      |                    |                    |                    | その他                  |                    |                    |                    |
|                                                      |                    |                    |                    | サービステーブル 1568        | -                  | ○                  | -                  |
|                                                      |                    |                    |                    | カボ LUX 无影灯 1410      | ●                  | ●                  | ●                  |
|                                                      |                    |                    |                    | カボ LUX 540 LED       | ○                  | ○                  | ○                  |
|                                                      |                    |                    |                    | 无影灯ライトボール            | ●                  | ●                  | ●                  |
|                                                      |                    |                    |                    | ERGOcam フラットディスプレイ   | ○                  | ○                  | ○                  |
|                                                      |                    |                    |                    | デカセプトルベージックセット       | ●                  | ●                  | ●                  |
|                                                      |                    |                    |                    | ジェントルサイレンス LUX 8000B | ●                  | ●                  | ●                  |
|                                                      |                    |                    |                    | マルチフレックスカプリング 465LED | ●                  | ●                  | ●                  |
|                                                      |                    |                    |                    | ジェントルパワー LUX 10LP    | ●                  | ●                  | ●                  |
|                                                      |                    |                    |                    | ジェントルパワー LUX 20LP    | ●                  | ●                  | ●                  |
|                                                      |                    |                    |                    | イントラ LUX ヘッド 68LH    | ●                  | ●                  | ●                  |

● 標準装備 ○ オプション装備 - 使用不可  
※ 1 ボール取り付け。マルチメディアとは併用可能。



サデレックミニ LED 光重合器



ビエソ LED  
超音波スケーラー



PHYSIO 5007



カボ LUX 无影灯 1410



カボ LUX 540 LED



アシスタントエレメント用  
ダイアグノデントホルダー



Centra マウンティング  
システム



パノラマ X 線ビューア  
（ドクターエレメントまたは  
サービステーブルに配置可能）



ダブルジョイント式  
ヘッドレスト（マニュアル）



電動ヘッドレスト



デンビュールクッション



ワイヤレスフットコントローラ

製品ラインナップ



E70T テーブルタイプ



E70S スイングアームタイプ



E70C カートタイプ





販 売 名 : エステチカ E70  
一般的名称 : 歯科用ユニット  
認 証 番 号 : 222AIBZX00013000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器



KaVo, Dental Excellence.

## カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481

大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451

札幌営業所 ● Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ・ 仙台営業所 ● Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376

名古屋営業所 ● Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ・ 福岡営業所 ● Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

E013ALAL201209

※ 本カタログに掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合がございます。

※ 製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございます。