

マックスセム エリート

接着性レジンセメント

Kerr[™]
RESTORATIVES




接着力90%向上、安定した長期的な修復を


国内外ロングセラー製品である「マックスセム エリート」の接着力を改良いたしました。長期的な修復の成功の要はセメントによる基盤作りです。是非一度、新しい「マックスセム エリート」をお試ください。

接着力90%向上

最適化したレジンマトリックスと増粘剤に合わせて調整されたフィラー粒子サイズにより、流動性が最適化され、歯質との濡れ性が向上、弊社従来品と比べて接着力が90%向上しました（特に象牙質）。

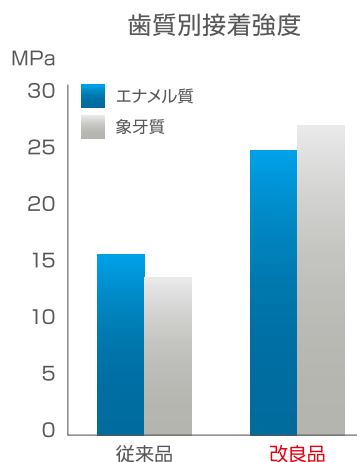

出典：タフツ大学 (Data on file)

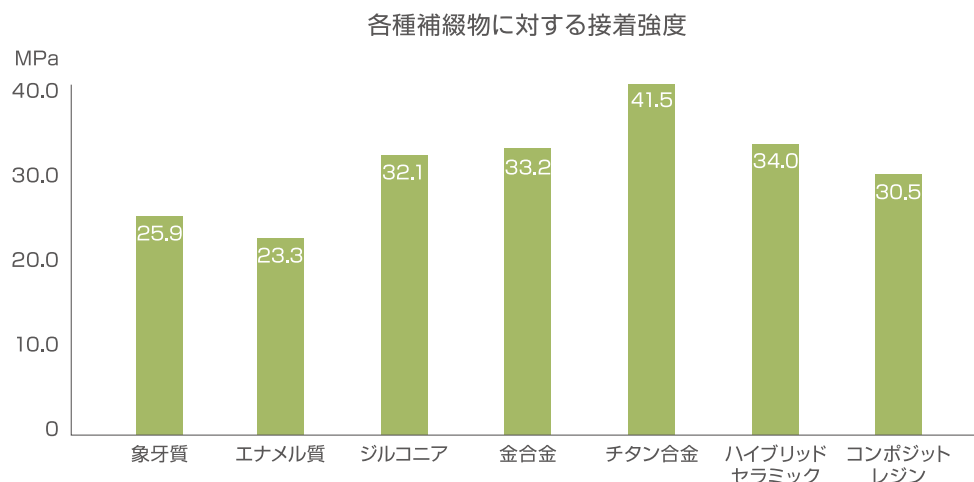

出典：カー社内データ

臨床例



補綴物内面にサンドブラスト処理を行い、水洗、乾燥する。



マックスセム エリートを補綴物内面に十分満たす。



口腔内へセット。マックスセム エリートがマージンから溢れ出るよう、ゆっくり圧接する。



補綴物から2～3cm離し、光照射を1～2秒行う。



余剰セメントの除去。セメントの取り残しが無いよう、一塊として除去する。



余剰セメント除去後、多方向から光照射し最終重合を行う。

写真提供：静岡県 鷲野 崇 先生

従来品「マックスセム エリート」の高性能、操作性を踏襲

歯質との強固で耐久性のある化学結合


全てのKerrボンディングシステム（接着材、接着性レジンセメント）同様に、20年以上の実績を有する接着性モノマーであるKerr特許「GPDM」を採用しています。歯質に対するエッチング効果を発揮すると共に、化学的な接着力を示します。

長期の色調安定性

デュアルキュアの接着性レジンセメントの多くがBPO及びアミンを含有し、重合反応を開始します。アミンは経時的に黄変が起こりますが、これは審美修復では避けなければならない課題です。

弊社セメント製品に使用されている、Kerr特許「**レドックス重合開始剤**」はアミンフリーで、色調安定性と高い透明性を実現し、審美修復を可能にします。

60℃に4週間（37℃で最長1.5年）浸した後

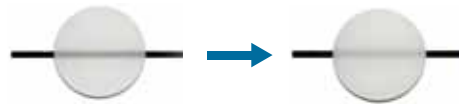

改良品4色の比較



クリアーは透過性、ホワイトオパークは遮蔽性に優れています。



症例写真

- Dr. Sam Halabo, DMD - Chula Vista, CA . January 2015

One-Peel™ クリーンアップ

弊社セメント製品に適用されている独自のチクソトロピー技術により、余剰セメントの除去が簡単にできます。

簡便性


冷蔵保存不要、練和操作不要（オートミックスタイプ）

選べる3種のチップ形状

3種類のチップを症例に合わせ、選択できます。

根管内への注入は、必ずルートキャナルチップをご使用願います。

先端外径：1.05mm

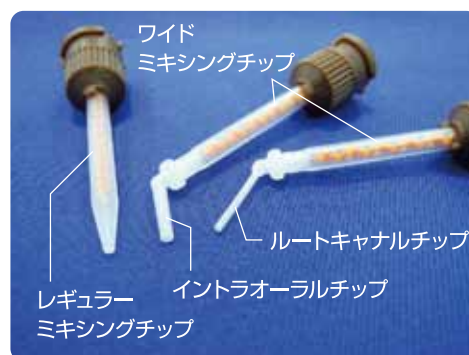

全ての補綴物との接着

前歯・臼歯セラミックス、ジルコニア、メタル、CAD/CAM材料

マックスセム エリート リフィル

標準価格

13,600円

シリンジ2本と2種類のチップをセットにした導入向けセットです。
充実のシェードは5色のラインナップです。



セット内容

シリンジ5g	2本
セメント用ミキシングチップ Aタイプ レギュラー	8本
セメント用ミキシングチップ Aタイプ ワイド	8本
セメント用ミキシングチップ イントラオーラルチップ	8本

シェード	品目コード	伝票記載コード
クリアー	33872	0.808.0258
ホワイト	33873	0.808.0259
ホワイトオパール	33874	0.808.0260
イエロー	33875	0.808.0261
ブラウン※	33876	0.808.0262

※ブラウンは従来品より変更ありません。

マックスセム エリート 8本パック

標準価格

28,000円 1本あたり3,500円

2本入のリフィルを
4個まとめた、お得な
8本パックです。

※同色8本のセットです。



シェード	クリアー	ホワイト	ホワイトオパール	イエロー	ブラウン※
伝票記載コード	0.808.0307	0.808.0308	0.808.0309	0.808.0310	0.808.0311

※ブラウンは従来品より変更ありません。

マックスセム エリート 4本パック

標準価格

18,000円

1本あたり4,500円

クリアー4本のお得な
パックです。
ルートキャナルチップ付



セット内容

シリンジ5g クリアー	4本
セメント用ミキシングチップ Aタイプレギュラー	16本
セメント用ミキシングチップ Aタイプワイド	8本
セメント用ミキシングチップ イントラオーラルチップ	8本
セメント用ミキシングチップ ルートキャナルチップ	8本

シェード	品目コード	伝票記載コード
クリアー	34418	0.808.0276

マックスセム エリート

標準価格

18,000円

イントロキット

クリアー2本、
ホワイト1本のセットです。
ルートキャナルチップ付





セット内容

シリンジ5g クリアー	2本
シリンジ5g ホワイト	1本
セメント用ミキシングチップ Aタイプレギュラー	16本
セメント用ミキシングチップ Aタイプワイド	8本
セメント用ミキシングチップ イントラオーラルチップ	8本
セメント用ミキシングチップ ルートキャナルチップ	8本

シェード	品目コード	伝票記載コード
クリアー/ホワイト	34417	0.808.0275

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号: 224ADBZX00283000

セメント用ミキシングチップ

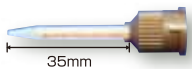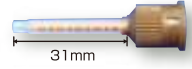商品名	デザイン	品目コード	伝票記載コード	人数(本)	標準価格
Aタイプ レギュラー	 35mm オートミックスで補綴物に 塗布しやすい長さで先端形状です。	32862	0.808.0183	50	6,000円
Aタイプ ワイド	 31mm イントラオーラルチップ、ルートキャナル チップと組み合わせて使用します。	33879	0.808.0263	8	1,980円
イントラオーラルチップ	 先端外径 1.86mm 10mm 口腔内で使いやすい角度のチップです。	33880	0.808.0264	8	980円
ルートキャナルチップ	 先端外径 1.05mm 13mm 根管内への注入を容易にします。	33881	0.808.0265	8	980円

一般医療機器 歯科用練成器具 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039111200

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

Kerr
RESTORATIVES

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F
カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273
http://www.sds-japan.com

KKSAJB1504VI KR-0028