

● PIEZOLED(電気スケーラー)のお手入れ



トルクレンチで、チップを注意して取り外します



チップと本体の汚れをチェックし、ワイプで清掃します。



本体をケースから取り外します。



PIEZOLED本体は135°Cによる滅菌を実施します。

スケーラーチップも135°Cによる滅菌を実施します。




チップ着脱用のトルクレンチも135°Cによる滅菌を実施します。

滅菌処理が終わったチップとチップ着脱用レンチは、滅菌パックに入れ保管してください。

<p>注意</p>	<p>スケーラーチップは薬液洗浄を行わないでください。薬液に浸しますとネジの溝部分に薬液が浸透し、強度が弱くなり、ネジ部の折れが起こりやすくなりますので、必ず水のみで汚れを落として下さい</p>	
------------------	---	--

● Sonosoft LUX（電気スケーラー）のお手入れ

* Sonosoft LUX（電気スケーラー）の販売は終了しました


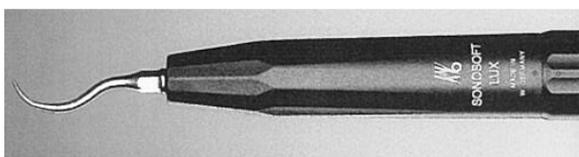


トルクレンチで、チップを注意して取り外します

チップと本体の汚れをチェックし、ワイプで清掃します。

Sonosoft LUX本体は滅菌できません。

スケーラーチップとチップ着脱用のトルクレンチは135°Cによる滅菌を実施します。

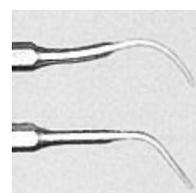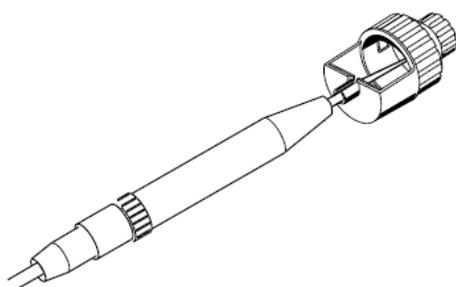

滅菌処理が終わったチップとチップ着脱用レンチは、滅菌パックに入れ保管してください。

<p>注意</p>	<p>スケーラーチップは薬液洗浄を行わないでください。薬液に浸しますとネジの溝部分に薬液が浸透し、強度が弱くなり、ネジ部の折れが起こりやすくなりますので、必ず水のみで汚れを落として下さい</p>	
------------------	---	--



KaVo. Dental Excellence.

日常のお手入れ
