


● インストルメントのお手入れに必要なもの

KaVo製ハンドピース・インストルメントのお手入れには次の製品をご使用ください。

- ・ カボスプレー



- ・ クワトロケア
- ・ クワトロケア プラス

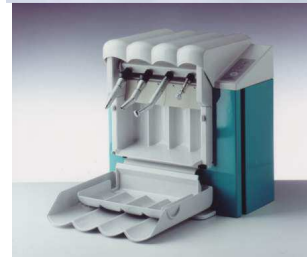

滅菌器

- ・ ステイティム900J 等




注意

上記機器の取扱いは各製品の取扱い説明書を参照してください。

KaVo製ハンドピース・インストルメントのお手入れ作業には以下のものが必要ですのでご準備ください。

- ・ ゴム手袋
- ・ ブラシ
- ・ 消毒用アルコール又は専用消毒剤
- ・ ワイプ
- ・ インストルメンツスタンド

Durr社「FD322」など

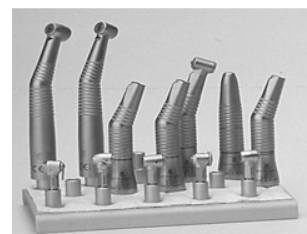

- ・ 滅菌パック
- ・ 滅菌パック用専用シーラー



ユーロシール等

● ハンドピース・インストルメントのお手入れと点検のタイミング

項目	内容	毎朝	患者毎	診療後	外科診療毎	必要に応じて
マルチカプリング	O-リングのチェック・交換	●	●		●	●
	水、エアーのチェック	●			●	
	清掃、消毒		●	●	●	
	点検(変形・照明・水量調整)	●				●
モーター	O-リングのチェック・交換	●	●		●	
	水、エアー、回転のチェック	●			●	
	外ケースの清掃、消毒、(滅菌)		●	●	●	
	点検(変形・照明・水量調整)	●				●
タービン	流水による洗浄		●	●	●	
	カボスプレー、クワトロケアーによるスプレー洗浄		●	●	●	
	滅菌		●	●	●	
	点検					●
コントラ	流水による洗浄				●	
	カボスプレー、クワトロケアーによるスプレー洗浄		●	●	●	
	滅菌		●	●	●	
	点検					●
エアスケーラー	チップの取り外し、消毒、滅菌		●	●	●	
	流水による洗浄		●	●	●	
	カボスプレー、クワトロケアーによるスプレー洗浄		●	●	●	
	滅菌		●	●	●	
	点検					●
電気スケーラー	チップの取り外し、消毒、滅菌		●	●	●	
	本体、スリーブの清掃、消毒		●	●	●	
プロフィール	ノズルの取り外し、清掃、消毒、滅菌		●			
	本体清掃、滅菌		●			
	点検					●
光重合器	清掃、消毒		●	●		
	リング、ファイバーの清掃、点検		●	●		
電気メス	チップの取り外し、洗浄、滅菌		●	●	●	
	本体清掃、滅菌		●	●	●	

● 外科用治療機器のお手入れと点検のタイミング

項目	内容	毎朝	患者毎	昼休み	診療後	毎週	外科診療毎	必要に応じて	1年毎
外科治療機器	治療前チェック(モーター、生食等)						●		
	治療前モーターキャリブレーション						●		
	ホース清掃、消毒、滅菌						●		
	モーター清掃、洗浄、滅菌						●		
	電気メス清掃、滅菌						●		
	チップ等清掃、滅菌						●		
	インストルメント洗浄、注油、滅菌						●		
	キャリブレーションツール交換								●
	モーター点検							●	●
	インストルメント点検							●	●