

橋口歯科医院 院長 橋口朋典

当院は父の代より約30年、東京、埼玉にて地域医療の貢献を目指し診療してまいりました。当院では開業時より国産の某メーカーを導入してきており、今回 KaVo のトリートメントユニットを導入するまでそのメーカーを使用してまいりました。私も大学卒業後、当院に入るまでは非常勤として大学の医局に所属しつつ、いくつかの医院で仕事をさせていただいてきており、6社ほどのメーカーを使用してきました。その使用経験から KaVo のトリートメントユニットの優位性について書かせていただこうと思います。

患者さん・ドクター共に快適 - 人間工学に基づいたチェア的设计

トリートメントユニット選定にあたり、私が決めていたいくつかの条件があり、その一つが快適性でした。国内外問わずいくつかのメーカーのトリートメントユニットを見にショールームに行き、実際に自分が座り治療される体位を試しました。個人的にはやや堅めな感じが好きなのですが KaVo のトリートメントユニットはヘッドレスト、バックレストの調整の自由度が大きいため他のメーカーに比べ、座った状態でも快適に感じ、寝かせた状態でも腰に一番負担が少ないように感じました。



腰が沈み込まない高反発のシート構造
患者さん (体重 60 kg)



前後にも可動し
個々の体形にフィット

背中丸いお年よりの場合でもヘッドレストを前に出すことでフィットさせることができます。昨年ドイツの本社で腰、背中への保護に基づき立位を基本として設計しているとの説明を受けました。

ドイツの開業医の先生のクリニックを見学しましたが、その先生が立位で行っていることが多かったので、治療の内容によりますが形成など私もなるべく立位で行うようにしています。立位で行うことで、座ったまま同じ姿勢での治療が少なくなり腰の負担を軽減します。KaVo のトリートメントユニットは、最高位が高く立位での治療にも適しています。



立位でもか屈みこまず自然な姿勢で治療ができ、腰の負担を軽減
(先生の身長 171 cm)



足元の広いスペース

フィジオに座った時の足元の位置

また、術者として実際に使用し、ポジショニングを取ってみるとカタログの記載にもありましたが足元のスペースが広いいため楽な姿勢を取ることが可能です。当然座位で医療を行うことも多いのですが、ドクターチェアの併用も楽に行えている理由なのだと思います。

医院経営に大切な条件 – 衛生管理面の優位性

いくつかの選定条件のなかで私が最も重きをおいた条件が衛生管理です。これは口腔外科医でもある父の要望もありました。昨今、某新聞社でのタービン類の滅菌について記事が出て患者さんの関心も高くなっており、当院でも問い合わせが数件ありました。このことから患者さんの医院の使用機材の衛生管理に対する意識が高くなっていることが伺えます。



患者さん毎に排水ホースを水で洗浄



ボタン一つで集中水消毒システムを実施




オキシゲナル6とデカセプトルゲルがビルトイン

KaVo のトリートメントユニットの特徴の一つでもある給排水の消毒管理システムは非常に有効です。給水では消毒された安全な水が使用でき、排水では洗浄消毒が自動で行ってもらえる。この二つは医院運営において非常に魅力的でした。患者さんの治療を安全、安心に行えるだけでなく、日々これらの器具を掃除、管理してくれるスタッフの安全も確保できるからです。また、排水系ホースが簡易洗浄ができるアクアマットも KaVo ならではの機能です。

以上が私が感じたトリートメントユニットの優位性です。タービンやエンジンなども以前使用していたメーカーに比べ、細かい回転速度の調整が可能であり、かつトルクもあるので形成時の細かい調節もやりやすく感じております。導入してまだ3か月程ですので、今後使用を重ねていくうえで、さらに色々なことがわかってくると思います。

Customer Information

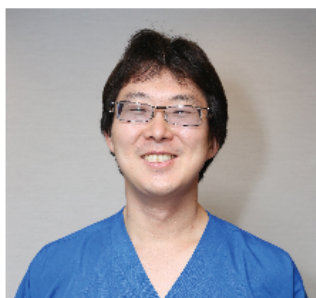

橋口歯科医院
Hashiguchi Dental Clinic

東京都文京区白山 1-33-27
TEL 03-5615-8320
URL <http://www.hashiguchishika-tokyo.com/>

白山診療所

院長 橋口朋典

2006年 鶴見大学歯学部 卒業
鶴見大学歯学部付属病院研修医

2007年 歯科麻酔学教室入局

日本歯科麻酔学会会員

日本歯周病学会会員

Product Information

KaVo ESTETICA® E70

カボ エステチカ E70

高い実用性と快適性

人間工学的なサスペンド式チェア採用

- トルクコントロールによるエンドモードをインストール可能
- 術者の腰への負担も軽減、ワイドなフットスペースのサスペンド式チェア
- 最低ポジション 350mm、最高作業ポジション 900mm で、立位での治療が可能
- 過酸化水素水による自動常時水消毒システム/集中水消毒システム
- 排水管の洗浄機能を自動化したハイドロクリーン機能
- ダブルジョイント式の使いやすいヘッドレストまたは電動ヘッドレストの選択が可能
- モーター駆動式のスピットンボウル
- ちらつきがなく高品質の自然な照明を提供する KaVoLUX 540 LED 搭載可能

販売タイプ：テーブルタイプ (T) スイングアームタイプ (S) カートタイプ (C)

標準価格：テーブルタイプ/カートタイプ 6,500,000円 (税別)

スイングアームタイプ 6,800,000円 (税別)

販売名：エステチカ E70 認証番号：222AIBZX00013000



背中にやさしい機器として歯科業界で初めて「AGR 認定」マークを取得しています。



AGR認定マーク

KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481
大阪本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
札幌営業所 Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692・仙台営業所 Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376
名古屋営業所 Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567・福岡営業所 Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。

※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。

<http://www.kavo.jp>