


● モーターのメンテナンス

① 止水バルブ

モーターの水が出ない場合、止水バルブが閉じている場合があります。

止水バルブを反時計回転に回し、バルブを開にしてください

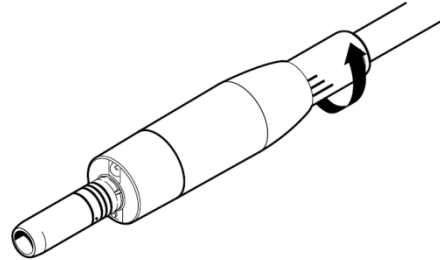


② O-リング交換

カプリングのO-リングをチェックします。

傷や破損があれば交換します。

マルチカプリングのO-リング交換は、O-リングを指でつまみ、図の様に力をかけ、ゴムを伸ばし、丁寧に外します。

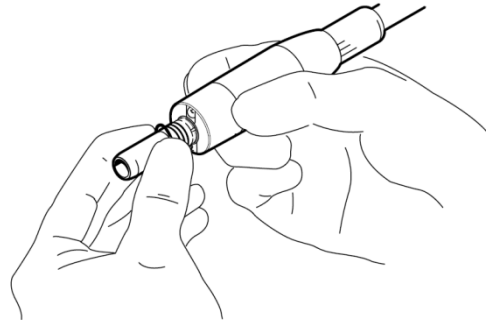

注意


カッター等でゴムを切らないでください。刃先がマルチカプリング表面を傷つけ、致命的な損傷を与える場合があります

③ ライトバルブ交換


ケースを外し、古いライトバルブを取り外します。

新しいライトバルブを2本の端子とマルチカプリング側の電極の向きを合わせ挿入してください。

LEDの場合は端子に+の極性がありますので、交換後に点灯しない場合は、再度、LEDを外し、180° 向きを変えて(極性を反対にし)取り付けてください。

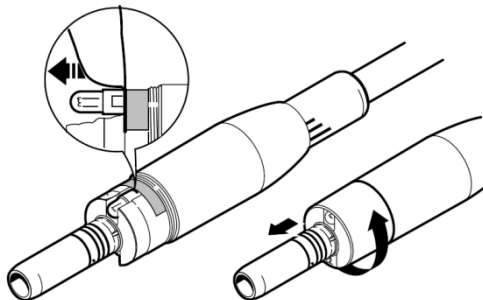

701, 702モーター

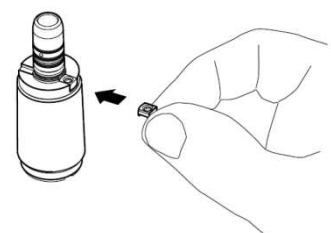

703モーター