


● HF Surgery unit (電気メス)のお手入れ

* HF Surgery unit (電気メス)の販売は終了しました



チップ

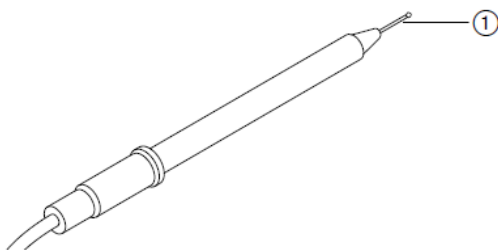

チップの絶縁部①を持って電気メス本体から取り外してください。

電気メス本体は、ワイプで丁寧に拭き上げ、その後、135℃までの滅菌処理を行います。

滅菌処理が終わったインストルメントは、滅菌パックに入れ保管してください。



チップは水につけて、堆積物や汚れを丁寧に取り除きます。その後、135℃による滅菌を実施します。

滅菌処理が終わったチップは、専用ケースで保管するか、滅菌パックに入れ保管してください。



注意

チップは薬液洗浄を行わないでください。薬液に浸しますと隙間に薬液が浸透し、チップの寿命が短くなります。必ず、水のみで汚れを落として下さい

