



東京都
西巣鴨歯科医院

小田桐 峰子
さん

今回のアイテム

オプチビュー／樹脂製開口器

素材が柔らかく、患者さんに優しい樹脂製開口器

前歯部のCR充填、
口腔内写真、PMTIC、
矯正ブラケット装着時
等、患者さんに長時間
開口して頂く際の開口
器として、当医院では

Kerr社のオプチビ
ューを多用していま
す。過去に使用してい
た開口器は口角のみを
開口するものでした
が、オプチビューは口

角及び、上下唇4点で
開口し、広い視野での
処置が可能です。

また、長時間の使用
でも患者さんの不快
感、疲労感は少なく、簡
単な言葉話す事も

苦にならない様です。

サイズはスタンダ
ードとスモールの2
種類があり、患者さん

に合わせて使用しま
す。最初は少し大きい

のではと懸念しました
が、実際は成人男女に
使用してもこの2サイ
ズで問題ありません。

子供に関してはスモ
ールでも大きいので、
より小さい子供用の開
発を希望します。

オプチビューは柔軟

な樹脂製で、患者さん
に優しく、オートクレ
ーブ可能という点も気
に入っています。

尚、シリコン製のク
ッションはオートクレ
ーブを繰り返すと硬く
なるので、その場合は
患者さんの苦痛を軽減
する為にもクッション
を交換します。



装着面観



柔軟性に優れ、
開閉運動可能



樹脂製で口唇を
優しく保持