



愛知県
小野寺歯科

鷲野 崇
先生

今回のアイテム

オプチビュー／樹脂製開口器

口唇が被らず、1人で写真撮影が可能

オプチビューは、口角のみならず上下唇を優しく押し拡げてくれるという点に大きな利点があります。

例えばシェードガイドを歯に合わせて写真撮影を行う際、通常の口角開口器を使用した場合は口唇が歯に被って

しまう為、どうしてもアシスタントの手で口角開口器を上を持ち上げる必要がありました。

しかし、オプチビューを用いれば、一人で撮影をする(左手でシェードガイドを持ち、右手でカメラのシャッターを押す)事が可能で、非

常に有用であると感じています。

また、写真撮影時のみならず、矯正ブラケットの装着時やラバーダムがかからない前歯楔状欠損へのCR充填時、PMT C時などに於いても、オプチビューを用いれば非常に効率良く

作業を行う事ができます。

スタンダードサイズとスモールサイズの2種類が選択できる為、患者さん個々の口の大きさに合わせて適用でき、また、フレームが柔軟性に優れたPPSU樹脂でできている為、ある程

度長時間使用しても患者さんの苦痛、不快感が少ない様です。

また、134℃のオートクレーブが可能である事、クッションが交換可能な製品である為あらゆる意味で患者さんに優しく、秀逸な開口器であると思います。



一般的な口角開口器の装着面観



オプチビュー装着面観。上唇が被らず、歯頸部まで綺麗に写真が撮影できる。



撮影の様子



アシスタントの介助がなくても、1人で撮影が可能に。