

Product Information

KaVo プロフィーフレックス3 2018

健康な歯と明るい笑顔のために
簡単に効果的なクリーニング

KaVoプロフィーフレックス3 2018はカリエスや歯周病などの病変の
主な原因(バイオフィルム、喫煙による付着物、コーヒーや紅茶などの着色など)を
簡単かつ効果的にクリーニングします。

- 360°回転のグリップスリーパー臼歯部への処置も容易
- 迅速かつ容易なパウダー充填と清掃
- パウダーの噴霧量を患者さんごとに選択
ー痛みに敏感な患者さんにも快適な治療
- 人間工学に基づいたデザインストレスフリーで快適
- 他社カプリング接続対応(モリタαカプリング接続用)



カボ プロフィーフレックス3 2018
能動型機器接続歯面清掃用器具 管理医療機器 認証番号:21900BZX00151000


選べるフレーバー

プロフィーパール

- 主成分:炭酸カルシウム
- 低研磨性で、汚れを簡単かつ効果的にクリーニング
- 球形のパウダー粒子:歯面に優しい清掃
- 選べるフレーバー:ミント・ピーチ・オレンジ・カシス・ニュートラル(無味)
- 経済的なボトルタイプ(ニュートラル(無味)のみ)



KaVo プロフィーパールには角やエッジがありません。(粒子径:60~70μ)

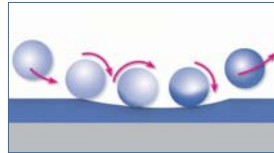

無限の接触点で歯の表面をなめるように
洗浄し効率的に作用します。




プロフィーパール
歯面研磨剤 一般医療機器 届出番号:27B1X00039000011

選べるフレーバー

プロフィーパウダー

- 主成分:重炭酸ナトリウム(炭酸水素ナトリウム)
- 水に素早く溶解
- 微粒子パウダーで、より効果的かつやさしくクリーニング
- 選べるフレーバー:オレンジ・ベリー・ミント・チェリー

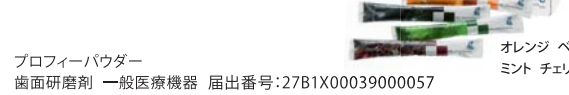

プロフィーパウダー
歯面研磨剤 一般医療機器 届出番号:27B1X00039000057

Customer Information

今井 歯科 クリニック

埼玉県秩父市上宮地町10-3
TEL.0494-25-0255
<http://www.imaidc.jp/>

院長 今井 美行



【略 歴】
1984年 日本歯科大学歯学部卒業
同大学補綴学第2講座入局
1987年 秩父市上宮地町にて開業
2012年までにフィンランドにおける
予防歯科研修に12回参加
現 在 日本歯科大学臨床講師

【所 属】
日本フィンランドむし歯予防研究会専務理事
日本顎咬合学会会員
IPSG包括歯科医療研究会会員
日本母乳の会会員

【著書】
ママになる前に知っておきたい
「おっぱいとお口の話」メディカ出版



KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社●〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481
大阪本社●〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
札幌営業所●Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692・仙台営業所●Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376
名古屋営業所●Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567・福岡営業所●Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

VCPJB1405V1 INS-050

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。
※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。

KaVo PROPHYflex 3 Customer's voice

「痛くない! 気持ち良い! カッコいい!」
患者さんに喜ばれています。

スピーディー・確実・快適
さまざまな症例への活用性が高い予防・メンテナンスの必需品
KaVo プロフィーフレックス 3



KaVo エステチカ E70Sの前にて

今井 歯科 クリニック
院長 今井 美行

カボ製品を愛して27年。特に使いやすさと精度の良さは抜群です。中でも
歯面清掃器「KaVo プロフィーフレックス3」は私たち術者だけでなく、
患者さんにも大変喜ばれています。発売当初より使用していますが、
「KaVo プロフィーフレックス3」や「プロフィーパール」、「プロフィー
パウダー」の効果に大変満足しています。予防やメンテナンスには
KaVoのプロフィーシステムは必需品と言っても過言ではありません。
「スピーディー・確実・快適」に歯の汚れを落とすことができます。患者さん
にも好評なプロフィーフレックスの使い方を皆さんにご紹介します。
皆さんの臨床に少しでもお役に立てていただければ幸いです。

今井 歯科 クリニック 歯科衛生士



ポリッシングブラシなどでは
落ちない深い溝のプラークも
楽々クリーニング!

患者さんに
「形状がカッコいい」と
言われます。

しつこいステインも
あっという間に綺麗になります!

患者さんだけでなく、
歯科衛生士にとっても
満足な歯面清掃!

(左から)小泉D.H 丸山D.H 葦原D.H

院長、買って♡

患者さんへの負担が少なく
痛くありません。
「さっぱりして気持ち良い」と
大変好評です。

着色—長年付着したしつこいステインも簡単・きれいに！



クリーニング前



プロフィーフレックス3でクリーニング



プロフィーフレックス3でクリーニング



クリーニング後

歯面をクリーニングする際に事前にペーストやブラシ、ハンドピースなどを準備する煩雑さがなく、準備に時間がかかりません。プロフィーフレックスが1台あれば、きれいに歯面を清掃することができます。本体のグリップが360°回転するので、アクセスしづらい部位にも簡単に処置ができ、効果を実感することができます。「プロフィーパール」を使用する際は、金属部に当たると曇ってしまう可能性があるため、注意して処置します。当院ではカシス味やピーチ味が好評です。患者さんだけでなく、私たち術者にとっても、ほのかな香りのアロマ効果で、リラックスした診療が行えます。

フレーバー付きパウダー 患者さんの好みで選んでいただいています。



患者さんの好みに合わせて
フレーバーを選ぶことができます。

患者さんに
いつも喜んで帰っていただけるので
私たちも
うれしいです!!

アロマ効果で
私たちも処置しながら
癒やされています。

こんなにたくさんのフレーバーがあります。
個包装なので、湿気る心配ありません。
プロフィーパール(ミント・ピーチ・オレンジ・カシス・ニュートラル(無味))
プロフィーパウダー(オレンジ・ベリー・チェリー・ミント)

〈衛生士専用チェア KaVoエステチカ1065Sの前にて〉

着色—歯列不正



クリーニング前



クリーニング後

歯列不正の着色にもプロフィーフレックスは十分活用できます。

患者さん：「引込んだ歯の汚れはなかなか歯磨きでは取れないんです。」
先生：「そうですか。でも、あっという間にきれいになりますよ。」
「ほら！」
患者さん：「わー、ほんとだ!!」

着色—下顎舌側のしつこい着色も短時間にクリーニング



クリーニング前

たった30秒間クリーニング

さらに2分間
こんなにきれいになります

初めの30秒は2+2を中心に歯面清掃を行いました。その後、3+3を2分間クリーニングしました。
プロフィーフレックスでたった30秒間クリーニングしただけでも、しつこい着色を簡単に落とすことができます。

初めて使用した歯科衛生士さんのコメント
「えっ!!こんなに早く汚れが落ちちゃうの!!」

着色—クリーニング後シーラント処置


クリーニング前
ステインが付着


クリーニング後



クリーニング後にシーラント処置

前歯舌側部の溝の着色汚れが取れて、シーラント処置が確実に行えます。
探針やブラシでも落ちにくい着色も、プロフィーフレックスを使えば、簡単に汚れを落とすことができます。

萌出したての第2大臼歯における予防処置



萌出したての第2大臼歯




臼歯の溝はプラークでいっぱい


ブラッシング後の染め出し
ブラッシングだけでは溝のプラークは完全に落とせません。

プロフィーフレックス3で
隅々までクリーニング


プラークを完全に除去

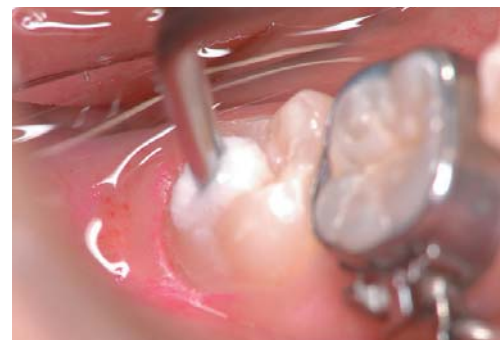

乾燥させた後、フッ素を塗布



あっ、ちょっと付け過ぎ。(笑)

先生：「奥歯の溝って
上手に磨けていますか？
生えたての歯は実は
危険がいっぱいなんですよ。」

自分でブラッシング後のプラークの染め出し(小児)



自分で歯磨きした後



染め出しをすると真っ赤



プロフィーフレックス3でクリーニング



クリーニング後

自分では磨けているつもりでも染め出しをするとこんなに真っ赤になります。
今井歯科クリニックに通っている子供たち全員が歯ブラシが上手な訳ではありません。
歯ブラシを強制することで、歯医者嫌いになる子供もいるんですね。
今井歯科クリニックの予防は、「無理なく、楽しく、確実に」をモットーに診療しています。

今井歯科クリニック 施術風景



タオルを使用すれば、
患者さんのお顔にパウダーが
飛び散る心配がありません。



プロフィーフレックス3は
操作がしやすいので、
1人でも簡単・スマートに
処置ができます。

矯正患者さんの染め出し

全 顎



クリーニング前

下顎前歯



クリーニング前



染め出し



染め出し


プロフィーフレックス3で
クリーニング

患者さん：「先生、ブラケットをしていると
歯磨きがしにくいんです。
お口も臭いと言われるんです。」



クリーニング後



クリーニング後

矯正の患者さんが来院される際は、プロフィーフレックス3を使用して隅々までクリーニングします。

CR(コンポジットレジン)充填前の処置 — 楔形欠損



歯面清掃を確実に行うことにより、CR(コンポジットレジン)の接着力を増す効果があります。

口腔外でも大活躍！ 仮着したインプラント上部構造の内部を清掃


脱落したインプラント上部構造の
汚れた内面

プロフィーフレックス3でクリーニング後
再仮着

脱落したインプラント上部構造の汚れた内面にもプロフィーフレックスを使用すれば、簡単かつ確実にクリーニング
することができます。クリーニング後に再仮着します。

ポーセレン破折に対する前処置



クリーニング前


プロフィーフレックス3で
クリーニング


クリーニング後



CR充填

ポーセレン破折に対する前処置のクリーニングにも、プロフィーフレックス3があれば、楽々簡単・スピーディーに行えます。

使いやすさと快適性を追求したKaVoの予防治療システム 「患者さんにやさしい」をテーマに効果的なワークフローを提案します。

ステップ 1 頑固な歯石も簡単に除去	ステップ 2 見た目ですぐわかるクリーニング	ステップ 3 スムーズな回転による優しいポリッシング	ステップ 4 簡単かつ信頼性の高いレーザー光でカリエスチェック
頑固な歯石も簡単に除去して、問題解決患者さんに優しく、効果的な治療 予防治療システムに必要なのは、難しい症例でも効果的に無理なく処置することです。頑固な歯石は、徹底的に、しかも優しく除去する必要があります。パワフルさと静音設計を兼ね備えたKaVo ソニックフレックス エアースケーラーなら、難しい症例にも容易に処置できます。 ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック ソニックフレックス エアースケーラー 2003L	輝く笑顔のために 見た目ですぐわかるクリーニングの効果 次のステップは、カリエス、歯周病、歯肉炎の予防です。KaVo プロフィーフレックス 3 2018は、病変の主な原因(バイオフィルム、喫煙による付着物、コーヒーや紅茶などによる変色など)を容易に除去できます。 プロフィーフレックス3 2018 プロフィーパール プロフィーパウダー	ポリッシングで締めくくり 優しく効果的なポリッシング 歯科医院でのデンタルクリーニングの仕上げには、エナメル質のポリッシングとシーリングが欠かせません。KaVoでは、PMTCのステップに合わせたツールをご提供します。 ジェントルパワー LUX 減速シャंक 29LP イントラヘッド L31 プロフィー エキスパートマティック E31C	簡単かつ信頼性の高い方法でカリエスを発見 危険をいち早く見つける。ダイアグノデント 2095J スピーディさと高い信頼性を両立した高い検出率を誇るダイアグノデントのレーザー光は、裂溝部、平滑面のカリエス、歯周ポケットの堆積物の特定に効果的です。 ダイアグノデント 2095 J