



岡山県  
モモデンタルクリニック

佐藤 毅  
先生

今回のアイテム

## テイク1 アドバンス

# 歯肉溝内への流れ込みを実感できる印象材

歯科補綴臨床において、最も頻度高く行われる処置が印象採得であることは言うまでもありません。印象材の選択は、支台歯を正確に模型上に再現するための大きな鍵になると考えられます。

今回、紹介させていただく付加重合型シリコーン印象材テイク1アドバンスは、その優れた流動性、寸法安定性により多くの臨床家から支持を得ており、私も多くの補綴治療において、本材料を選択しています。

特に歯肉縁下の再現性を求められる症例では、テイク1アドバンスのLBウォッシュを選択します。

口腔内に抽出し、エアードでなじませる際に、支台歯、歯肉に張り付くように広がり、歯肉溝内への流れ込みを実感できます。これは、優れた親水性を持つ本材料の大きな特色です。LBウォッシュの水との接触角は低いため馴染みが良く、完全防湿が不可能な口腔内で高い流動性を保ちます。細部まで正確に流れることで、支台歯の詳細を印象面に印記することが可能です。

また、石膏との馴染みもよく、滑沢な根面形態、支台歯表面性状、そしてシャープなマージンを模型上に再現します。

日常臨床の多くの場面で選択を迫られる印象材は、ストレスなく精密なものを選ぶことが重要と考えます。テイク1アドバンスは、その選択肢の一つです。



3. テイク1 アドバンスのLBウォッシュを抽出。歯肉溝内への流れ込みも良好。



2. プレパレーション後。印象採得の準備。



6. 印象面の様子。歯肉縁下までしっかり印記されている。



5. LBウォッシュの抽出完了。トレー材と共に連合印象を行う。



1. 処置前の状態。



4. 支台歯が連続する場合は気泡迷入に注意する。



8. 補綴物の装着完了。



7. 補綴物の準備。