

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000
クリニーク チューブ

【禁忌・禁止】

本品の成分に対し、過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本製品はペーストで、色、香料の違いにより5種類ある。

種類	ペパーミント		ライト	グリーンアップル	ベリー
	フッ素入り	フッ素無し	フッ素入り	フッ素入り	フッ素入り
ペースト色	青		白	緑	紫

原材料:

ペパーミント	パーライト、グリセリン、水、ソルビトール、メチルパラベン、エタノール、プロピルパラベン注1)、色素、香料(メントールを含む)、フッ化ナトリウム注2)、その他 注1) フッ素入りには含まない。 注2) フッ素無しには含まない
ライト	パーライト、グリセリン、水、ソルビトール、メチルパラベン、エタノール、プロピルパラベン、二酸化チタン、フッ化ナトリウム、その他
グリーンアップル/ベリー	パーライト、グリセリン、水、ソルビトール、メチルパラベン、エタノール、色素、香料(メントールを含まない)、フッ化ナトリウム、その他

【使用目的又は効果】

歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。歯科予防治療用ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面を研磨する。

*【使用方法等】

- ペーストをチューブから押し出して少量取り出す。
- 歯科予防治療用ブラシ、又は歯磨カップ等に適量を付着させ、1回分のペーストで2~3歯を目安に清掃、研磨する。
回転数:3,000回転/分以下

RDA(Relative Dentin Abrasion 相対的象牙質研磨効率): 21

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 熱の発生やペーストの飛散を避けるために、低速度(3,000回転/分以下)で使用すること。
- 歯面に被膜が残った場合は、新たにペーストを取り、処置すること。
- 象牙質が露出している場合は、はじめにエナメル質を、次に象牙質を処置すること。
- 分取したペーストは、容器に戻さないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

・本材は、高温多湿を避けて室温で保管し直射日光、デンタルライト等の強い光があたる場所に置かないこと。

[有効期間]

ペパーミント フッ素入り、グリーンアップル:36ヶ月

ペパーミント フッ素無し、ライト、ベリー:30ヶ月

[自己認証(製造元データ)による]

使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社

連絡先 : 03-6866-7272

製造業者 : カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)

国名 : スイス(Switzerland)