


機械器具 49 医療用穿孔器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用根管リーマ 31875001
リーマ

【禁忌・禁止】

- ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。
- 本品に変形、損傷、劣化等の異常が見られた場合は、使用しないこと。

*** 【形状、構造及び原理等】**

本品は、針部、ハンドル、エンドストップから構成され、針部の全長、及び刃部の外形寸法の違いにより複数の種類がある。ハンドルには、種類を示す数字が表示され、色別されている。エンドストップは針部全長毎に色別されている。単品あるいは数種類を組み合わせたアソートで製造販売される。

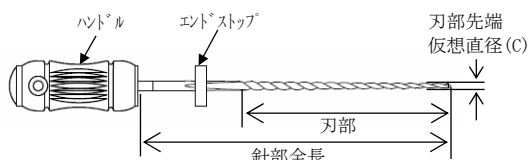

ハンドル		製品番号		C(mm)
表示	色別			
08	灰	14133	14134	0.08
10	紫	06029	06110	0.10
15	白	06030	06111	0.15
20	黄	06031	06112	0.20
25	赤	06032	06120	0.25
30	青	06033	06126	0.30
35	緑	06034	06127	0.35
40	黒	06038	06131	0.40
45	白	06040	06132	0.45
針部全長		21mm	25mm	
エンドストップ色別		緑	青	

材質

針部: ステンレス鋼、ハンドル: ポリエチレンイミド樹脂、エンドストップ: シロン

【使用目的又は効果】

本品は、サイドカットによる根管の創傷清拭又は拡大のために用いる。

【使用方法等】

1. 滅菌、あるいは消毒済のリーマから治療する根管に合わせて適切な種類を選択する。
2. 手動による回転運動により、根管壁を拡大する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 再使用可能な回数は、根管の状態やリーマの使用状態により異なるので、必ず使用前後に点検を行い、変形、損傷、劣化等の異常が見られた場合は、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検
 - 変形、損傷、腐食、劣化等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
 - 使用後は、汚物を除去し、感染防止のため洗浄・消毒・滅菌すること。
2. 洗浄・消毒・滅菌
 - 使用後は、精製水を用いて速やかに洗浄する。
 - 高圧蒸気滅菌(134℃/6分、あるいは121℃/30分)を実施する。

[保守・点検に関する注意事項]

1. 消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
2. 薬液消毒を行うときは、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6866-7272
製造業者 : オームコ社(Ormco Corporation)
国名 : アメリカ(U.S.A.)