

デimon3

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状:



スライド(閉)



スライド(開)

スロット幅: 0.56mm (.022 1/16)

上顎	トルク	アンギュレーション	ローテーション	識別	スライド ID
中切歯	+17°	+5°	0°	ブルー	レッド
	+12°	+5°	0°		—
	+7°	+5°	0°		グリーン
側切歯	+10°	+9°	0°	マゼンタ	レッド
	+8°	+9°	0°		—
	+3°	+9°	0°		グリーン
犬歯	+7°	+6°	0°	グリーン	レッド
	0°	+6°	0°		—
小白歯	-7°	+2°	0°	パープル	—
下顎	トルク	アンギュレーション	ローテーション	識別	スライド ID
前歯	-1°	+2°	0°	イエロー	—
	-6°	+2°	0°		グリーン
	+7°	+5°	0°		レッド
犬歯	+0°	+5°	0°	ライトブルー	—
第1小白歯	-12°	+2°	0°	ホワイト	—
第2小白歯	-17°	+2°	0°	レッド	—

原材料:


- ・ブラケット: ポリカーボネート
- ・スロット部: ステンレス鋼
Cr 15.5~17.5%, Ni 3.0~5.0%, Cu 3.0~5.0%,
その他(C, Mn, P, S, Si, Nb+Ta)5% 以下, Fe 残余
- ・フック: ステンレス鋼
Cr 17.0~19.0%, Ni 8.0~10.0%,
その他(C, Mn, P, S, Si, Se)5% 以下, Fe 残余
- ・スプリング: NiTi 合金
Ni 56%, Ti 44%, その他(C, O, H)0.1%以下

【使用目的又は効果】


歯科矯正治療において、歯に接着し、矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

1. 患者に合ったブラケットを選択する。
2. 歯面の前処理を行う(清掃・脱灰・洗浄・乾燥し、前処理材(オームコ社オーソソロ等)を薄く塗布する)。
3. ペーストの柔らかいタイプの接着材(オームコ社エンライト等)をブラケットのベース面に押し付ける。ペーストの硬いタイプの接着材を使用する場合、ブラケットのベース面に前処理材を薄く塗布した後、接着材を押し付ける。
4. 前処理のすんだ歯にブラケットを位置づけ、余分な接着材を取り除き、使用する接着材の添付文書に従い、指定する時間、光照射する。
5. 接着材が硬化した後、スロット部にワイヤーを通し、ピンセットあるいは手でスライドを閉じる。

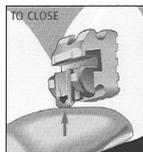

6. スライドを開ける時には、デimon3/MX オープニングインストルメント(届出番号 27B1X00039200300)をブラケット表面に対して90°の角度でスライドの穴に入れ、スライドを弱い力で開く。

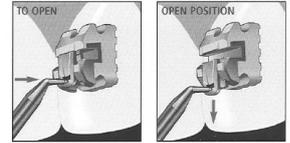

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 油脂等により、適切な接着力が得られなくなるので、ボンディングベースを直接手でさわらないこと。
2. 接着材が十分に硬化してからワイヤーを装着すること。
3. 加熱タイプの接着材は使用しないこと。90℃以上に加熱すると品質が低下します。
4. デイボンディングの際にプライヤーでブラケットを保持したまま過剰な力をかけると、歯質に損傷を与えるので注意すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 使用されるダレクトボンディング用接着材の種類、接着手順の不備等によっては装着中に脱落することや、デイボンディングを困難にし、歯質に損傷を与えることがあるので、注意すること。脱落した場合は、直ちに医師の診断を受けさせること。
- 3) デイモンシステムは、メインワイヤーを結さつしないので、ワイヤーが破断した場合は、破断したワイヤーが口腔内を傷つけることや、それを患者が飲み込むことがあるので注意すること。

【不具合・有害事象】

有害事象
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【耐用期間】

製造から5年間[自己認証(製造元データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズジャパン株式会社
連絡先 : 03-6859-0065
製造業者 : オームコ社(Ormco Corporation)
国名 : アメリカ(U.S.A.)