

機械器具 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用ワイヤ 16204000

リンガル リテーナー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・ 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：

ボンダブル リンガル リテーナー

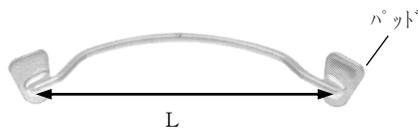

アジャスタブル リンガル リテーナー



原材料：ステンレス鋼、銀ろう

- ・ ワイヤ：Cr 17.0～19.0%，Ni 8.0～10.0%，  
その他（C，Mn，P，S，Si）5%以下，Fe 残余
- ・ パッド：Cr 16.0～18.0%，Ni 10.0～14.0%，Mo 2.0～3.0%，  
その他（C，Mn，P，S，Si，Cu）5%以下，Fe 残余
- ・ ストップ：Cr 17.0～19.0%，Ni 10.5～13.0%，  
その他（C，Mn，P，S，Si）5%以下，Fe 残余
- ・ リング：Ag 55.0～57.0%，Co 21.0～23.0%，Tin 4.5～5.5%，  
Zn 15.0～19.0%

製品名	L (mm)	種類	サイズ	製品コード
ボンダブル リンガル リテーナー	21	犬歯用 (3x3)	0	204-0010
	22		1	204-0011
	23		2	204-0012
	24		3	204-0013
	25		4	204-0014
	26		5	204-0015
	27		6	204-0016
アジャスタブル リンガル リテーナー	-	-	-	204-0000

種類：

原理：ワイヤーから歯牙にかかる力を利用し、歯牙を正しい位置に移動する。

【使用目的又は効果】

歯の移動又は維持のために歯に力を加える。

【使用方法等】

両端のパッドを左右の犬歯舌側に接着し、使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 装置作成及び調整時の曲げ伸ばし等による、疵や破断に注意すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 金属疲労等により破断することがあるので、装着後、ガムや硬いものを噛まないように患者に指示すること。また破断した場合は直ちに医師の診断を受けさせること。

【不具合・有害事象】

有害事象  
掌蹼膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【耐用期間】

製造から5年間[自己認証（製造元データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズジャパン株式会社  
連絡先：03-6859-0065  
製造業者：オームコ社(Ormco Corporation)  
国名：アメリカ (U.S.A.)