


機械器具 58 整形用機械器具  
 一般医療機器 歯列矯正用位置測定器具 70733000  
**ETM ポジティブ ポジショナー**

**【禁忌・禁止】**

ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】**

本品は、バレル、スライド、ノーズガイド、ベントフット、ストレートフットから構成される歯科手術器具である。スライドを動かしてストレートフットを開き、歯列矯正用アタッチメント等を挟んで保持する。

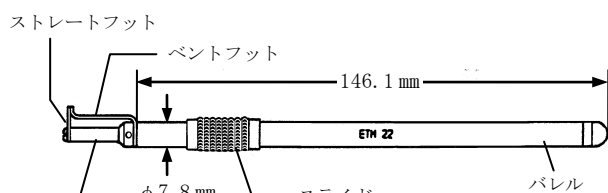

P/N 800-2222

**材質**

バレル	アルミニウム
スライド	アルミニウム
ノーズガイド	アルミニウム
ベントフット	ステンレス鋼
ストレートフット	ステンレス鋼

**【使用目的、効能又は効果】**

歯面に対して歯列矯正アタッチメント等を正しく位置決めするために用いる。

**【操作方法又は使用方法等】**

スライドを動かして先端のストレートフットを開く。歯列矯正用アタッチメント等を挟んで保持し、歯面に対して適切な位置に固定する。

**【使用上の注意】**

1. 本製品は【使用目的、効能又は効果】記載以外の用途には使用しないこと。
2. 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【保守・点検に係る事項】**

1. 使用前・使用後の点検  
破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
2. 消毒  
使用後は消毒用アルコールを含ませた布等で清拭すること。

**[保守・点検に関する注意事項]**

1. 加熱滅菌は行わないこと。
2. 液体に浸漬しないこと。

**【包装】**

1 個入

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズジャパン株式会社  
 住所：〒581-0067 大阪府八尾市神武町2番24号  
 日本通運株式会社 天王寺支店  
 メディカルセンター内  
 電話番号：072-947-2022  
 製造業者：オームコ社 (Ormco Corporation)  
 国名：アメリカ (U. S. A.)