

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用スプリング 31797000
コイルスプリング

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・ 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


形状:

- ・ オープン: 長さ 609mm (2フィート)

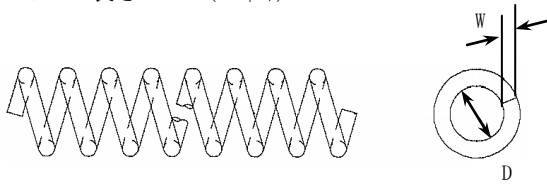

製品番号	W:線径 (インチ)	D:コイル内径 (インチ)
221-0830	0.20 mm (0.008)	0.76mm (0.030)
221-0930	0.23 mm (0.009)	
221-1030	0.25 mm (0.010)	

- ・ クローズ: 長さ 609mm (2フィート)

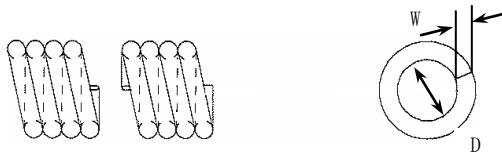

製品番号	W:線径 (インチ)	D:コイル内径 (インチ)
222-0830	0.20 mm (0.008)	0.76mm (0.030)
222-0930	0.23 mm (0.009)	
222-1030	0.25 mm (0.010)	

原材料: ステンレス鋼

Cr 17.0~19.0%, Ni 8.0~10.0%,
その他(C, Mn, P, S, Si)5% 以下, Fe 残余

原理:

スプリングの復元力により矯正力を部分的に付加する。

【使用目的又は効果】

バネ状で矯正力を発生するために用いる。

【使用方法等】

- ・ 拡大; オープン コイルスプリングをアーチワイヤーに通し、アーチワイヤーを装着する。
- ・ 縮小; クローズ コイルスプリングを縮小したい歯間の両側のブラケットまたはチューブのフック等に装着する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

[不具合・有害事象]

有害事象

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

[耐用期間]

製造から5年間[自己認証(製造元データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズジャパン株式会社

連絡先 : 03-6859-0065

製造業者 : オームコ社(Ormco Corporation)

国名 : アメリカ(U.S.A.)