


機械器具 (65) 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 16195000  
**トランスペアレント アダプトストリップス**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

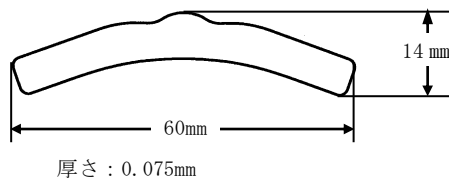

材質: ポリエチレンテレフタレート (PET)

**【使用目的又は効果】**

修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込める。

**【使用方法等】**


1. ストリップを適切な隣接する歯間に通し、適切な方法で固定する。
2. 修復材を窩洞に充填し、圧接形成する。
3. 歯科重合用光照射器で光照射し、修復材を硬化する。
4. ストリップを取り外す。

**【保管方法及び有効期間等】**

[有効期間]

- ・60ヶ月 [自己認証(製造元データ)による]

使用期限は、包装に記載。

(例  2016-11 は使用期限 2016年11月 を示す。)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズジャパン株式会社

連絡先 : 03-6866-7272

製造業者 : カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)

国名 : スイス (Switzerland)