



オプチビュー リップアンドチーク リトラクター

口唇、口角をやさしく押し開き、安定した開口状態を保ちます。



LIP AND CHEEK RETRACTOR



スタンダード、スモールの
2タイプをご用意しました。

- 大きく安定した開口状態を保つ事ができるため、広い視野での診療を行うことができます。
- 柔軟性に優れた3次元フレームデザインで、非常に着脱が容易です。
- 手やインスツルメントでサポートせずに安定した開口状態を保てます。
- 口唇のクッションが、やさしい装着感を長時間キープします。
- ひとつで口唇と口角の両方を一度に開口することが可能です。

オプチビュー リップアンドチーク リトラクター

OptiView™


従来の多くの開口器（リトラクター）は口唇か口角だけを開口するため、構造的に高い緊張状態になることがあります。

オプチビューは、ご使用の際、口唇と口角を均一に押し広げるように開口させます。

フレームは、開口時の自然な解剖学的形態に合わせているので、口腔内の緊張を最小限に留め、快適に長時間で使用いただけます。

適応： 診断・予防・歯の治療・矯正の処置、例えば口腔内写真・歯面の準備・印象取得
ブリーチング・咬合面の分析等、多目的にご使用になれます。

口唇、口角をやさしく押し開き、安定した開口状態を保ちます。

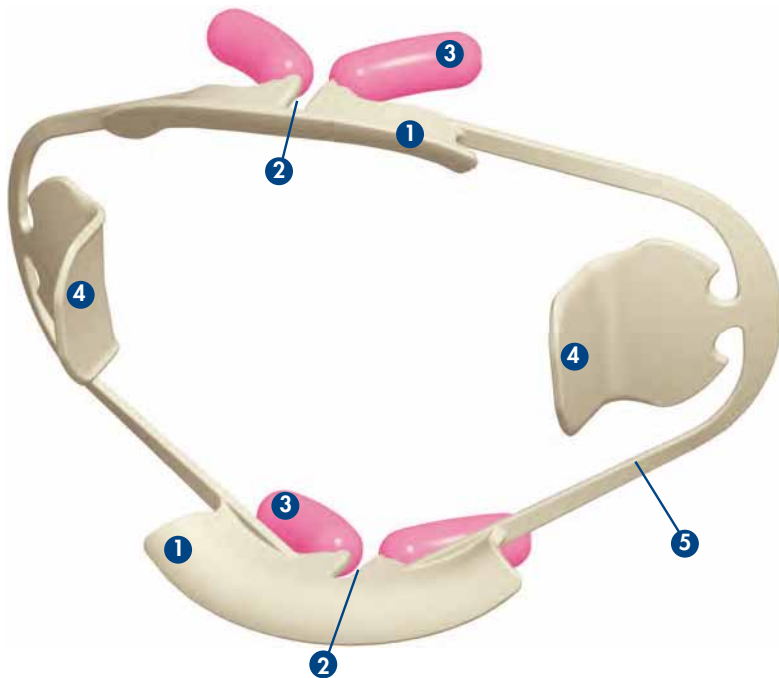

1. 解剖学的に形づくられた上下顎のフレームは、頬側と歯茎側に広く口唇を押さえます。
2. 口唇フレームは快適にフィットするよう、小帯部分に当たりにくい設計がなされています。
3. 口唇を支える上下のクッションにより、前歯と歯茎からの距離を十分に保ちます。
4. 素材にはラテックスが含まれていないため、オートクレーブ（加圧滅菌：134℃（3分））が可能です。
5. 口唇のクッションもオートクレーブが可能で、清掃のため、フレームから取り外すことができます。



スタンダード

スモール

外形 73mm×104mm 外形 70mm×97mm

ご注文番号

716-0050	オプチビュー リップアンドチーク	リトラクター	スタンダード	2 個入
716-0051	オプチビュー リップアンドチーク	リトラクター	スモール	2 個入
716-0052	オプチビュー リップアンドチーク	リトラクター	リフィール クッション	10 個入



左写真のように簡単に装着でき、広い視野での治療を行う事ができます。



一般医療機器 歯科用開口器 オプチビュー リップアンドチーク リトラクター 医療機器製造販売届出番号：13B1X00014001049