

これが感染予防対策のスタートです。

ステイティム 900Jは院内感染リスクから、先生やスタッフ、患者さまをお守りします。

ステイティム 900J

- 超スピード型オートクレーブ
- 作業時間の短縮を考えた滅菌後の自然乾燥機能
- 器具を痛めない安全滅菌機能
- 見やすい制御パネルで安心操作
- 静音・省スペース設計

滅菌時間 約10分!*

短時間での滅菌を可能にした「ステイティム 900J」。毎日の滅菌作業を大幅に軽減し、患者さまとのコミュニケーションを深めることができます。また、ハンドピースの回転率を高め、効率性を向上させます。ステイティム 900Jは交差感染リスクから患者さまをお守りします。

※滅菌バックモードで使用情况

パッキンの
耐久性がUP!

ボイラーの
安定性がUP!



〈技術データ〉

- ・本体の寸法 384×293×280mm (奥行き×幅×高さ)
- ・チャンバーの寸法 90×190×53mm (奥行き×幅×高さ)
- ・重量 13kg
- ・蒸留水タンク容量 約3リットル(蒸留水)
滅菌サイクル 25～30回分
- ・3種のプログラム
 1. ハンドインスツルメント(裸の状態)
134℃ 2.3バー (33psi)
3.5分間(全行程:約6分間)
 2. 滅菌バックしたインスツルメント
134℃ 2.3バー (33psi)
5分間(全行程:約10分間)
 3. プラスチック、ゴム製品
121℃ 2.0バー (29psi)
15分間(全行程:約20分間)

■パッキンの交換は弊社サービスにて行います。

販売名:ステイティム900J/ 認証番号:222AABZ100071000/ 一般的名称:小型包装品用高圧蒸気滅菌器 38671020 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器40547020

管理医療機器(クラスII)

特定保守管理医療機器

スマートな衛生管理システムをカボと一緒に作りませんか?

感染リスクの少ない診療環境がわずか20分で

「患者さまを診察している間に洗浄・滅菌が完了する」洗浄・滅菌サイクルづくりをカボはバックアップします。

Washing-Time

流水下洗浄



まずは流水下で約1分間
洗浄してください。

QUATTRO-Time

内部洗浄・注油



2分間で、内部のクリーニング
とケアは終了します。内部の
洗浄及び注油が完了します。

Steri-Time

滅菌洗浄



滅菌バックに入れて約10分間*
で蒸気滅菌は終了します。
※滅菌バックモードで使用情况

Ready-Time

保存



インスツルメントは新たに
安心して使える状態になりました。
滅菌バックに入れた状態で次の
診療まで保管します。

00:00:00 - - - - - HYGIENE CYCLE - - - - - 00:20:00



STOP

STOP!! 使いまわし

インスツルメントの使いまわしは感染リスク
を高め、故障の原因ともなります。カボは
安全な診療空間づくりをサポートします。



カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481
大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
札幌支店 ● Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ・ 仙台支店 ● Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376
名古屋支店 ● Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ・ 福岡支店 ● Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

VICPJ81506V2 INS-020

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。
※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。
選任製造販売業者:AJMD株式会社
外国指定管理医療機器製造等事業者:サイキャン社(カナダ)

インスツルメントのメンテナンス より簡単で確実に行きませんか？

最大4本のインスツルメントを同時に注油・洗浄できる自動ケアシステム

カボクアトロケアプラス 2124A は、簡単な操作で感染や故障の原因となるタンパク質などの汚れをすみずみまで確実に洗浄し、注油します。

カボクアトロケアプラス 2124A

●手では除去しにくい7カ所の汚れを強力洗浄

構造上汚れが付着しやすく、手では決して洗浄できない7カ所の汚れを、クアトロケアプラスは強力な洗浄力で完全に除去します。

●わずか2分で強力・確実な洗浄 院内感染のリスクを低減


短時間で効果的に汚れを落とせるのは、オイルがインスツルメント内部で泡状となり、高圧エアですみずみに行き渡るからです。一度に4本同時の洗浄・ケアがたった2分で行うことができます。

●省スペースで安全設計 小規模な診療室でも簡単設置

クアトロケアプラスを設置するのに大きなスペースは必要ありません。

●定期的なケアがインスツルメントを 長持ちさせランニングコストを低減

製品寿命はその製品自体の品質だけではなく、メンテナンスの習慣によって決まります。定期的に洗浄と注油を行うことで、インスツルメントが故障を起こしにくくなり、修理・買い替えなどのランニングコストを低減でき、経済的です。

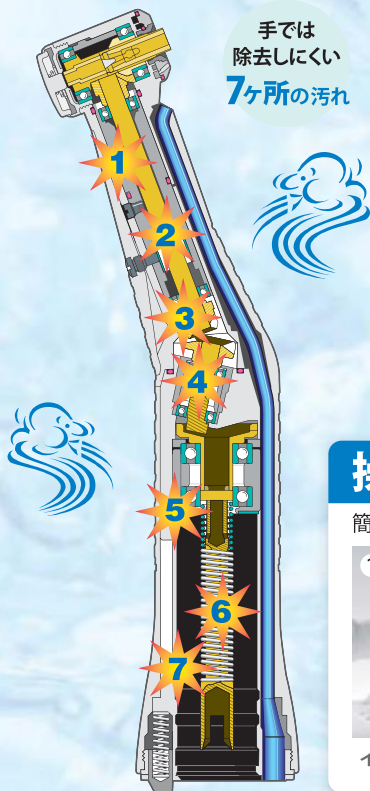

ハンドピース自動注油機器

販売名：クアトロケアプラス 2124A

- 標準販売価格／260,000円(税別) ●重量／10kg
- 製品番号／1.008.3085 W350×D280×H380mm(突起部含まず)
- 付属品／イントラマチックカプリング(3本)・マルチフレックスカプリング(1本)・クアトロケアスプレープラス(1本)

操作はたったの4ステップ

簡単に扱える4ステップのシンプルな操作。特別に研修の必要がなく、簡単に操作ができます。



インスツルメントをセット しずかに蓋を開けて... スタートボタンを押すだけ これですべて完了です。

※写真は実際の使用例で、装着しているインスツルメントは含まれません。
※イントラヘッドケアカプリングはオプションとなります。
※別売ケアカプリングを装着すれば、他社タービンにもご使用になれます。

確実な手順で洗浄できていますか？

オイルによる洗浄・注油が不足すると、ローターが正常に回転なくなり、故障の原因となります。また、衛生面を考えると洗浄は必要不可欠です。



十分なオイルが行き届いているローター



オイル不足でローターが黒く焦げ付きチャック部分も破損している



クアトロケアスプレープラス

クアトロケア用メンテナンススプレー／環境にやさしいガス／内容量：500ml／6本セット
製品番号：1.005.4525

※クアトロケアプラス 2124A はKaVo 製のバーコード表示のあるクアトロケアスプレープラスのみ使用できます。



KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481
大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
札幌支店 ● Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ● 仙台支店 ● Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376
名古屋支店 ● Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ● 福岡支店 ● Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

VICPJ81506V2 INS-020