
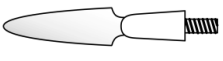

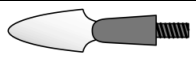
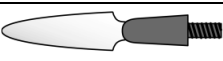
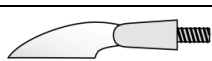


機械器具 70 歯科用鑄造器
 一般医療機器 歯科技工用形成器具 70760000
ポーセレン インストルメント

【形状・構造及び原理等】

1. ブレード

種類	ブレード 厚さ	ホルダー 色調	形状
スタンダード ジンジバル	0.25mm	黒	
スタンダード インサイナル		白	
スタンダード プローブ ^{注1)}		赤	
ウルトラシン ジンジバル	0.13mm	緑	
ウルトラシン インサイナル		茶	
ウルトラシン ナイフ		黄	

注1)：デプスゲージ付き

2. ハンドル

全長：133mm



(原材料)

ブレード：クロム鋼

ホルダー：プラスチック

ハンドル：アルミニウム

【使用目的、効能又は効果】

陶材を築盛あるいは彫刻形成するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

- 適切な種類のブレードを選択し、専用ハンドルに装着する。
- 陶材を築盛あるいは彫刻形成する。

【使用上の注意】

- 使用前に破損、ヒビ、傷がないことを確認すること。
- 無理な角度、過度の負荷での使用は避けること。
- 折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改造）を絶対行わないこと。
- 〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以外には使用しないこと。
- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 洗浄後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後の点検
破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- 洗浄
使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて速やかに洗浄する。

〔保守・点検に関する注意事項〕

- 洗浄は、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。

【包装】

- P/N 001-111 4本セット
スタンダード ジンジバル(黒)、スタンダード インサイナル(白)、スタンダード プローブ(赤)、ウルトラシン ナイフ(黄) 各ハンドル付き 1本
- P/N 001-010 ハンドル 1本
- P/N 001-001 スタンダードジンジバル(黒) 1個
- P/N 001-002 スタンダードインサイナル(白) 1個
- P/N 001-003 スタンダードプローブ(赤) 1個
- P/N 001-005 ウルトラシン ジンジバル(緑) 1個
- P/N 001-006 ウルトラシン インサイナル(茶) 1個
- P/N 001-007 ウルトラシン ナイフ(黄) 1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズジャパン株式会社
 住所：〒581-0067 大阪府八尾市神武町2番24号
 日本通運株式会社 天王寺支店
 メディカルセンター内
 電話番号：072-947-2028
 製造業者：カー社(Kerr Corporation)
 国名：アメリカ (U.S.A.)