


Cleanic®

The one step Prophy Paste

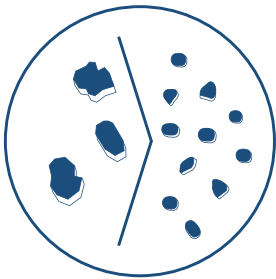

弊社特許の Perlite技術

天然ガラスを主成分とする
真珠岩粒子(Perlite)配合



オールインワン

大きな粒子が仕上げに適した粒子に変化
ステイン除去から仕上げまで1本で可能



チェアタイム短縮

数種類のペーストの
使い分け不要



高い研磨効率

研磨効率に優れ、
研磨傷のつきにくい設計
RDA:27, REA:3.4



クリニック チューブのラインアップに

ベリーフレーバーが新登場

フルーティで清涼感のあるフレーバーは、
ミント系の刺激が苦手な患者さんにもご使用いただけます。

選べる5つのラインアップ

フルーティな
風味溢れるフレーバー

クールなテイストの
スタンダードタイプ

甘酸っぱく
爽やかなフレーバー

セメントリングや
矯正ブラケット装着、
ホワイトニング前に

香料や顔料が苦手、
アレルギーが心配な
患者さんに



NEW

ベリー

ペパーミント

グリーンアップル

ペパーミント フッ素無し

ライト

品目コード	3186
伝票記載コード	0.808.2986
フレーバー	ベリー
フッ素 1,000ppm	含有
標準価格 100g入	3,900円

品目コード	3180
伝票記載コード	0.808.0990
フレーバー	ペパーミント
フッ素 1,000ppm	含有
標準価格 100g入	3,900円

品目コード	3182
伝票記載コード	0.808.0992
フレーバー	グリーンアップル
フッ素 1,000ppm	含有
標準価格 100g入	3,900円

品目コード	3183
伝票記載コード	0.808.2340
フレーバー	ペパーミント
フッ素 1,000ppm	非含有
標準価格 100g入	3,900円

品目コード	3184
伝票記載コード	0.808.2341
フレーバー	無味無着色
フッ素 1,000ppm	含有
標準価格 100g入	3,900円

一般医療機器 歯面研磨材 医療機器製造販売届出番号:27B1X00039103600

状況に合わせた ポリッシングペーストの選択

Customer's Voice

ポリッシングペーストは、粗研磨、仕上げ研磨、つや出しと段階別に分かれた製品が多く見られますが、クリニークチューブは1本で完了できるオールインワンタイプです。これはカーの特許技術である真珠岩粒子を配合し、粒子が細かく変化するためです。研磨開始からおよそ15秒で仕上げに適した粒子に変化するので2~3歯あたり15秒で仕上げると、全顎6分ほどで研磨が完了します。注意点として、発熱と飛散を防ぐために低回転(3,000回転/分以下)で使用します。根面が露出している患者さんにはエナメル質から研磨を始め、粒子が細くなった頃に根面を研磨します。また、状況に合わせて成分やフレーバーを選択できる豊富なラインアップとなっています。フッ素入りは通常のクリーニングに適し、フレーバーは5種類から選べます。定期的なメインテナンスでは爽快感のあるペパーミントを使用し、メンソールが苦手な方にはベリーやグリーンアップルを使用します。無味無着色のライトはペーストが無色でステインの落ち具合が確認しやすく、施術後に食事の予定がある方には味覚を阻害せずに食事を楽しんでいただけます。フッ素非含有タイプもありますので補綴物の装着前や、インプラントが入った方にも使用できます。



Customer Information
神奈川県小池歯科医院
歯科衛生士
吉久保 典子 さん



クリニークチューブのペーストは、歯面にしっかり作用する。



ペーストは柔らかすぎず、巻き上がってくるのがほとんどない。



歯列不正でもカーのプロカップは、側面での研磨が可能。

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

Kerr

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社
〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F
カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273
<http://www.kavo.jp>



KKSEJB1703V1 KR-0073