

KaVoで見た新しい世界



佐伯歯科クリニック 院長 佐伯 剛

開業以来「患者様に自分の考えるベストの治療を提供する」ということをコンセプトに6年以上ぶれることなく診療を続けています。開業時は予算のこともあったのですが、「ユニットなんてどれも大差ない」という考えでしたので、5年以上国産のユニットだけを使用してきました。しかしKaVoのトリートメントユニットを導入することで、今までこれが限界と思っていたことが簡単にクリアでき、驚くほど自分の診療が変わってきました。

約1年前、患者数の増加によりユニットを増設することを決めました。色々お話を聞くと皆さんKaVoのトリートメントユニットを勧めるのです。理由はモーターが違うと言います。よくわからないままショールームの展示品でモーターを触らせてもらったのですが、明らかに国産と比べると静かで軸が全くぶれないのです。その後、色々な経緯もありエステチカ E70 Visionを導入しました。導入後、使用すればするほど、新たな使い方を発見でき、診療のレベルの進化が実感できます。



ハンドピースの使い分けで思い通りの治療

我々歯科医師、特にGeneral Practitionerと言われる一般歯科医は補綴治療で治療を終えることが多いと思います。その補綴物の良し悪しを決めるのは形成の質であるのは言うまでもなく、回転切削器具の性能は形成の質を大きく左右します。エステチカ E70 Visionを導入して、タービン、コントラ、エアスケーラーを使い分けることで、思い描いた通りの形成ができるようになりました。



マスタートルク LUX M9000L



マスターマティック LUX M25L

元来、勤務医時代からエアタービンに慣れ親しんでいることもあり、エアタービンで大まかな荒形成を、最終形成を5倍速で行ってきました。しかしマスタートルク LUX M9000Lを使用することで、国産のタービンに比べトルクが強く軸ブレせず、ほぼ最終形成に近いところまで行えるようになりました。

狭小な隣接面やマージン部はマスターマティック LUX M25Lで行いますが、切削する際の感覚がとても柔らかく、歯に圧をかけることなく形成できます。

最後にマージン部でソニックフレックス プレップクラウンを使用することでJシェイブをなくし、スムーズなフィニッシュラインとなります。特にプレップクラウンフラットの形は他のメーカーに類似する形は見当たらず、縁上でも縁下でも滑らかなマージンを形成するという点に関しては絶大な力を発揮します。



ソニックフレックス チップ プレップクラウン

低速回転を活用 — 患者さんの負担を少なく

前述を基本に歯牙切削を行っていますが、それぞれのハンドピースで更に色々な使い方ができます。特に低速での使用は重宝しています。エアタービンで、低速回転で使用するなど想像もしませんでした。低速でも全くブレることなく使用できるのです。そのことにより、例えば前歯部のダイレクトボンディングの際、微妙な凹凸など高速回転ではまず出来ないような形を作ったりすることもできます。カリエス除去を行う際でも、等倍コントラを低速の数百回転で使用することにより感染歯質のみを選択的に除去することができます。これも軸ブレを全く起こさず、人によっては浸潤麻酔なしで行えます。

ソニックフレックスエアスケーラーも例外ではありません。プロビジョナルクラウンを外した際のセメント除去も無麻酔で行えます。これらはKaVo特有の微温水注水システムの恩恵も大きいのだらうと思います。

海外とのつながりを実感

エステチカ E70 Visionを導入したことで他にも衛生面やタッチパネルに集約された機能性など様々なメリットを感じています。国産に比べると高額なのかもしれませんが、現在の私の診療体制からするとKaVoのトリートメントユニット以外は考えられなかったのではないのでしょうか。朝から晩まで個室で完全に私専用のユニットとして使用しています。

また、最近海外のセミナーに参加する機会が多くなってきたのですが、海外の先生もKaVoユーザーが多く、同じトリートメントユニットを使用していると親近感も生まれ話も弾みます。今後も新しい使用方法などを発見した際には、ぜひ報告させて頂きたいと思っています。

Customer Information



佐伯 歯科 クリニック

SAEKI DENTAL CLINIC

福岡市城南区荒江1-32-16

TEL : 092-821-4182

URL : <http://www.saeki-dent.com/>

院長 佐伯 剛

K-project 会員
spear study club 会員
中洲土三会 会員
FCDC OB会 会員
福岡県歯科医師会 会員
福岡 SJCD 会員

Product Information

エステチカ E70 Vision 高い快適性と実用性

- 人間工学的サスペンド式チェア
- 6つの衛生機能を一括管理
(常時水消毒・集中水消毒・ハイドロクリーン・自動ブラッシング・リンス・アクアマット)
- チェアサイドコミュニケーション
(エルゴカムOne、ダイアグノカムを接続)
- 最大許容荷重180kg、余裕のチェアパワー

販売タイプ: テーブルタイプ (T) スwingアームタイプ (S) カートタイプ (C)
標準価格: テーブルタイプ/カートタイプ 6,800,000円 (税別)
スwingアームタイプ 6,900,000円 (税別)

販売名: エステチカ E70 / E80 ビジョン
管理医療機器・特定保守管理医療機器
認証番号: 227AIBZX00036000



きれいな水



reddot design award
winner2015

背中にやさしい機器として
歯科業界で初めて
「AGR認定」マークを
取得しています。



AGR認定マーク

Freunde (フロインデ) はドイツ語で友達を意味します。

KaVo Freundeであるユーザーの皆さまに長く弊社製品をご愛顧いただけますようサービス向上に努めています。

KAVO
Dental Excellence

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

VECPBF1711V1 EQU-077

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。

※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。