

メンテナンス時代のすぐれもの これでいいかな？

→これがないとやっていけない！

KaVo プロフィーフレックス ペリオチップ&プロフィーペリオパウダー

グリシンパウダーによる歯周ポケットの清掃
見えないポケット内のバイオフィルムを効果的に除去

今井歯科クリニック

院長

今井 美行



多くの患者さんが歯を維持するようになり、歯科医院では治療からメンテナンス優先の時代になってきました。

患者さんが歯を維持するためにはメンテナンスが大変重要になります。しかし、すべての歯が健全な状態ではない場合が臨床では多々あります。例えば、「深い歯周ポケット内の根面バイオフィルムはどのように取り除けばいいの?」「インプラント歯頸部の効率的な清掃はどうすればいいの?」 なんとなく「これでいいのかな?」のメンテナンスでは心配ですよね。私のクリニックでは、KaVo プロフィーフレックス ペリオチップとペリオパウダーを使用することにより良い結果が出ています。しかも短時間での処置で完了します。

KaVo プロフィーフレックスペリオチップ&ペリオパウダーの使い方はとても簡単です。

KaVo プロフィーフレックス3の先端をペリオチップに取り替え、パウダー側のノズルをノズル小に交換します。

そして専用ボトルにペリオパウダー(グリシン18~22 μ m)を入れます。私のクリニックでは使用の煩雑さとパウダーの誤使用を避けるためにペリオ専用のプロフィーフレックス3を用意しています。



KaVo プロフィーフレックス3にアダプタとペリオチップを装着します。



専用のパウダーコンテナのmaxラインまでペリオパウダーを入れます。



KaVo プロフィーフレックス3は2種類(ブラック・パープル)から選べます。

症例

歯肉ポケット内の歯根面のPMTc

メンテナンスを行う患者さんの中には深いポケットがある歯を維持している方もいます。従来であれば、超音波スケーラに専用のメタルチップを接続してポケット内の洗浄を行っていましたが、現在では、KaVo プロフィーフレックスペリオチップとペリオパウダーを使用した歯肉縁下の清掃を行っています。歯面に対して30°～60°の角度の範囲でペリオパウダーを吹き付けます。根面のバイオフィルムが簡単に取れ、使用後の歯根面と歯肉の接続部が密に接するように



プローブを用いてポケットの深さを確認し、プロフィーフレックスペリオチップを使用して、歯肉ポケット内をクリーニング

なります。また、グリシンパウダーは水溶性であるため、清掃後にポケット内にパウダーが残ってしまうこともありません。患者さんからも痛みがなく、今まで以上の歯肉の快適さが得られると大変喜ばれています。

インプラント周辺のクリーニング

インプラントと歯肉縁部のクリーニングにも大変有効です。歯肉縁下にプラークを押し込むことなく素早くクリーニングすることができます。



インプラント周辺のクリーニング



今井先生 使用上のアドバイス

- 十分な除石が行われていない歯や、歯肉に過度の炎症がある場合は使用を避ける。
- ペリオチップをまず歯肉縁下内に挿入し、痛みがないかを確認した後、プロフィーペリオパウダーを使用した歯根部の清掃を行う。
- ペリオチップを挿入した際に痛みを感じるようであれば、無理に挿入せずに、歯頸部からペリオパウダーを噴霧する。
- 噴霧は5～10秒以内で終了する。1か所に集中せず、スラロームを描くようなイメージ(ジグザグでも良いと思う)でポケット内の清掃を行う。

この使用方法で行っている限り、気腫などのリスクは軽減されます。



カボ プロフィーフレックス3 一般名称: 能動型機器接続歯面清掃用器具 認証番号: 21900BZX00151000 管理医療機器
プロフィーペリオパウダー 一般名称: 歯面研磨材 届出番号: 27B1X00039000073 一般医療機器

Customer Information

医療法人社団 今井歯科クリニック

〒368-0024 埼玉県秩父市上宮地町10-3
Tel: 0494-25-0255
<http://www.imaidc.jp>

理事長 今井 美行

- 略歴
 - 1984年 日本歯科大学歯学部卒業
同大学補綴学第2講座入局
 - 1987年 秩父市上宮地町にて開業
2012年までにフィンランドにおける予防歯科研修に12回参加
 - 現在 日本歯科大学臨床講師
- 所属
 - 日本フィンランドむし歯予防研究会専務理事
 - 日本顎咬合学会会員
 - IPSG包括歯科医療研究会会員
 - 日本母乳の会会員
- 著書
 - ママになる前に知っておきたいおっぱいとお口の話(メディカ出版)



KAVO
Dental Excellence

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel. 03-6866-7480 Fax. 03-6866-7481
札幌支店: Tel. 011-716-4694 Fax. 011-716-4692 仙台支店: Tel. 022-772-7375 Fax. 022-772-7376
東京支店: Tel. 03-6866-7480 Fax. 03-6866-7481 名古屋支店: Tel. 052-238-1146 Fax. 052-238-1567
大阪支店: Tel. 06-7711-0450 Fax. 06-7711-0451 福岡支店: Tel. 092-441-4516 Fax. 092-472-1844

<http://www.kavo.jp>
VIERJB1808V1 INS-084