

# クアトロケアプラス & ステイティム 900J キャンペーン

キャンペーン期間…2019年2月21日(木)～6月20日(木)まで

ハンドピース自動注油機器「KaVo クアトロケアプラス 2124A」  
小型高圧蒸気滅菌器「ステイティム900J」を  
キャンペーン期間中、

**数量限定・特別価格**にてご提供いたします。

※数量限定のため、各台数に達し次第、キャンペーン終了とさせていただきます。

消費税  
増税前に!!

現在お使いの  
滅菌器の  
買い替えに!!

タービン・コントラ類の  
メンテナンスに

より**確実に**

より**簡単に**

より**ハンドピースに優しい**

ハンドピース自動注油機器

KaVo クアトロケアプラス  
2124A

100台<sup>※</sup>  
限定

50台<sup>※</sup>  
限定

小型高圧蒸気滅菌器

ステイティム  
900J




○ わずか2分で一度に4本のハンドピースの  
オイル洗浄・注油

○ 省スペースで安全設計

○ 簡単な操作

○ 他社用カプリング有(別売)

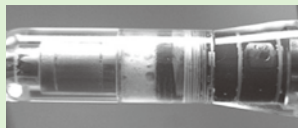

スプレーオイルがハンドピース内で約30倍に  
膨張し、汚れを吹き飛ばします。




○ 滅菌時間約10分!\*

※滅菌パックモードで使用した場合

○ パッキンの耐久性  
ボイラーの安定性が向上

○ 陽圧パルス脱気式による空気除去

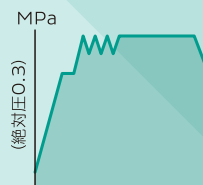

蒸気をパルス式にチャンバー内に断続注入して、残留空気を押し出してから滅菌行程へ移行します。  
(陽圧パルス脱気式) 所要の蒸気置換率を得るために大量の蒸気を導入して空気排除を行うので、  
空気除去率が高く、また滅菌速度を短縮します。

当キャンペーンについてのお問い合わせは、お取引先ディーラーまでお願いします。

ハンドピース自動注油機器

KaVo  
クアトロケアプラス  
2124A

標準価格 260,000円(税別)



小型高圧蒸気滅菌器

ステイティム  
900J

標準価格 650,000円(税別)



滅菌前に必要な内部オイル洗浄

ハンドピース内部に血液などのタンパク質や汚れが付着した状態で滅菌すると、それらにより焼き付くトラブルが生じます。

耐久性を高める注油

インスツルメント修理の約半分は不完全なメンテナンスが原因です。ボールベアリングは注油を怠ると殆ど瞬間的に焼け付けを起こします。一度焼け付けを起こしたベアリングはもはや交換するより他に方法がありません。

クアトロケアプラスで解決!!

ステイティム900Jはハンドピース(タービン・コントラ類)の滅菌が可能です。(インディアナ大学研究室)

インディアナ大学の研究において、ステリマスター(現在のモデルはステイティム900J)で、インスツルメント内部に塗布した多量のGeobacillus stearothermophilus(蒸気滅菌に対して最も耐性の高いバクテリア)の芽胞を滅菌することができるか試験した。

結果はステリマスター(ステイティム900J)の蒸気滅菌器はインスツルメント内に塗布した多量のGeobacillus stearothermophilusを死滅させることが認められた。

(引用: Sterilization of Dental Handpieces in the Sterimaster, White Paper Report study #07-07-03, SCIcon January 2004)

ご存知ですか?



詳細は弊社営業までお問い合わせください。

ステイティム 900J 保守契約 ゴールドプラン

●安心のフルサポートプラン ●年1回の定期点検の実施

当プランには、消耗品のパッキンや排気シール交換も含まれます。(年2回\*まで)

\*毎年消耗品が2個支給されるというわけではありません。

クアトロケアプラス 小型機器延長保証

標準付属品のKaVo用イントラマチックカプリング(コントラ用)・マルチフレックスカプリング(タービン用)を毎年ご契約更新時に各1個ご提供

短時間で作業効率を高めるKaVoメンテナンス・滅菌システム  
感染リスクの少ない診療環境がわずか20分

「患者さまを診療している間に洗浄・滅菌が完了する」メンテナンス・滅菌サイクルづくりをKaVoはサポートします。



Washing-Time  
外装部の洗浄

流水下で約1分間外装部を歯ブラシ等で洗浄します。60~70%のアルコール溶液に浸した柔らかい布で、外装部を拭き取ります。



QUATTRO-Time  
内部オイル洗浄・注油

内部のオイル洗浄及び注油が2分間で完了します。



クアトロケアプラス 2124A

Steri-Time  
滅菌

滅菌パックに入れて約10分間で滅菌は終了します。

\*滅菌パックモードで使用した場合



ステイティム 900J

Ready-Time  
保存

インスツルメントは新たに安心して使える状態になりました。

滅菌パックに入れた状態で次の診療まで保管します。



\*内部洗浄・消毒 (internal cleaning / internal disinfection) を行う場合は、ISO15883-1に準拠したMiele社の器具除染用消毒器 (ウォッシャー・ディスインフェクター) の使用を推奨しています。

00:00:00 - - - - - HYGIENE CYCLE - - - - - 00:20:00

販売名:ステイティム 900J 一般的名称:小型包装品高圧蒸気滅菌器/小型未包装高圧蒸気滅菌器 認証番号:222AABZI00071000 製造販売:AJMD株式会社 指定管理医療機器・特定保守管理医療機器



カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481  
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376  
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567  
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844

http://www.kavo.jp

VIERJB1902V1 INS-091