

ドイツの伝統とテクノロジーが育てたKaVoクオリティ
KaVo エルゴノミクス



肩・腰・眼の負担を軽減



3Dジョイントで角度を変え術野を確保します。

KaVo LUX 540 LED

チラつきがなく良質な光
 目に優しい色調

昼間の自然光に近い光から温かみのある目に優しい色調(色温度)の変更が可能です。光の侵入性が優れており、口腔内後部を細部まで明瞭に照らし、目の疲労を軽減します。範囲が正確に限定され患者さんも眩しくありません。



2011年ドイツ・イノベーション賞受賞(4000人の歯科医師の投票で1位)



AGR認定マーク

エステチカ E70/E80 Vision、フィジオ エボは、背中に優しい機器としてドイツ歯科業界で始めてAGR(脊椎健康推進協会)認定を受けています。

フィジオ エボ

シート、座板、バックレストが身体や診療スタイルに合わせて個別に調整できます。

エステチカ E70/E80 Vision

販売名:カボ エステチカ E70/E80 ビジョン
 歯科用ユニット
 認証番号:227AIBZX00036000
 管理医療機器 特定保守管理医療機器

写真にはオプションが含まれています。

サスペンド式チェア

人間工学的なチェア設計で足下に十分なスペースがあり自然な姿勢で患者さんにアクセスできます。



高齢の患者さんでも乗り降りが楽な最低位、また長身の先生でも自然な姿勢で立位の治療が行える最高位です。



踏みしろが浅いスライド式フットペダル

フットコントローラ

足を左右にそと動かすことで速度を正確にコントロールできます。踏み込みの力加減の調整がなく、長時間にわたる筋肉の緊張を軽減します。



カボデンタルシステムズ株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
 札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
 東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
 大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844
<http://www.kavo.jp>
 VECPJB1903V1 EQU-087

お客さまの声 MOVIE



KaVo Treatment Unit Campaign 2019

Made in Germany

KaVoトリートメントユニット

ストレスFREE キャンペーン

キャンペーン期間: 2019年4月22日(月)~12月27日(金) (設置有効)

KaVoトリートメントユニットは、精度の高い治療、効率的な衛生管理、エルゴノミクスによる患者さんと先生の快適性の3つをコンセプトにしています。キャンペーンではこのコンセプトをより実現しやすくなるよう拡張機能をご用意しました。プリムス1058 Life・エステチカ E50 Lifeには2つのKaVo水消毒システム、エステチカ E70/E80 Visionには、追加回路とハンドピースをセットにしました。

KaVo エルゴノミクス



歯科業界初 AGR 認定
 「背中に優しい機器」

キャンペーン特別セット

Life
 セット

プリムス1058 Life・エステチカ E50 Life
2つのKaVo水消毒システム (常時・集中水消毒システム)

Vision
 セット

エステチカ E70 Vision/E80 Vision
追加回路 + ハンドピース 選択1 追加エアー回路 + エアースケーラー 選択2 追加モーター回路 + 5倍速コントラアングル

お見積はディーラー様にお問い合わせください。



Life
セット

2つのKaVo水消毒システム

綺麗がつづく 2つのKaVo水消毒システム

過酸化水素水を使用した常時水消毒と集中水消毒の2つの水消毒システムで給水ラインの水路管内を清潔に保ちます。



過酸化水素水が自動希釈され
水路管に自動充填

1 常時水消毒システム

インスツルメントとスピットンに低濃度の過酸化水素水を使用し、水路管を衛生的に保ちます。

2 集中水消毒システム

休院前に少し濃度の高い過酸化水素水を30分間水路管内に滞留させて、バクテリアの繁殖等を防ぎます。



KaVo 水消毒システム

KaVoは1986年よりユニットの衛生管理に取り組み水消毒システムを搭載しています。

2つの水消毒システム



オキシゲナル6
濃度6%の過酸化水素水を含む溶液

DVGW* 準拠の衛生管理

DVGW協会の衛生面に関する厳しい基準をすべて満たしています。ユニットに使用される水はウォーターブロック内で制御され、水路管への逆流を防止する機能を備えています。また、ウォーターブロック内で加圧してユニットに給水しているので、スプレー水等を安定した水圧で供給することができます。

*ドイツガス水道技術科学協会
(Deutsche Vereinigung des Gas-und Wasserfaches e.V.)



エステチカ E50 Life コンパクトチェア



販売名: エステチカ E50
歯科用ユニット
認証番号: 223AIBZX00015000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

写真にはオプションが含まれています。

プリムス 1058 Life

販売名: プリムス 1058 Life
歯科用ユニット
認証番号: 228AIBZX00014000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

水消毒システム

Vision
選択 1

追加エアー回路 ⊕ ソニックフレックス エアースケーラー

ソニックフレックス エアースケーラー

予防治療から形成まで効率的なバイブレーションシステム

インプラントメンテナンスからカリエス除去や形成まで、使用部位や用途に応じて3段階のパワーレベル調節が可能で、ソフトな刺激でかつ超音波スケーラーと同様のパワーが得られます。また、さまざまな症例に対応する豊富なチップを取り揃えています。



ハイパワーで
思い通りの仕上げ

A または B のどちらかをお選びください

A ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック

ライト付き・チップ No.5A/6A/7A付き

KaVo master
series



認証番号: 224AIBZX00059000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

B ソニックフレックス エアースケーラー 2003L

ライト付き・チップ No.5/6/7付き

KaVo expert
series



認証番号: 21500BZY00311000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

多彩なチップで幅広い応用

エンド

根管口の拡大形成や根管の拡大に使用します。また、根管内の歯質や充填剤などを効率的に除去します。



フレッククラウン

フィニッシュラインとマージンラインとの適合性を向上させ、短時間でも手用切削具のようなプレパレーションを可能にします。



Vision
選択 2

追加モーター回路 ⊕ KaVoマスターマティック LUX M25L

イントラLUX KLモーター 703LED

安定した高トルクモーター回路




高トルク小型軽量モーター
(当社従来比30%)

- 3年保証の高品質ブラシレスモーター
- 少ない振動で静かな高トルクのモーター回路により、インスツルメントが安定回転

スマートドライブテクノロジー搭載

100回転でフルトルク
低速でも安定した回転力とスムーズな立ち上がり

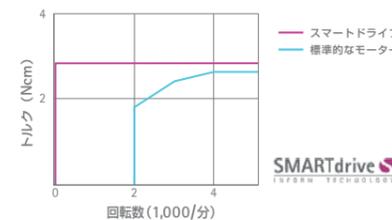

低速でも高トルクで
思い通りの切削

ヘッド
-20%*
小型化


KaVoマスターマティック LUX M25L

プレパレーションを高める優れたトルク伝達・静音・低振動でヘッドサイズ小型化を実現

- トリプルギアシステムの採用により振動を抑制、高トルクでハイパワー
- ヘッド内部でエアーと水を絶妙な圧力バランスで混合させ、良好なスプレーを供給
- 水づまりを防ぐ交換可能なスプレー水フィルターを採用

ヘッド角100°/グリップ角19°のコンビネーション

優れた可視性で、臼歯部へもスムーズ

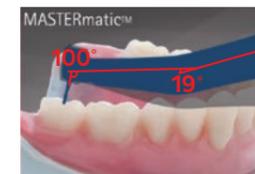

トリプルギアシステム

(※当社従来比)

販売名: マスターマティック
ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 227AIBZX00026000
管理医療機器 特定保守管理医療機器