

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ 16370000
ルーシーウェッジ クラシックソフト

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止


【保管方法及び有効期間等】

[有効期間]

- ・60 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【形状・構造及び原理等】

本製品は、先端が細くなっている方を歯頸部の歯間に差し込むことにより、歯にわずかな隙間を作る歯科用器具で、以下に示す 3 種類の寸法がある。

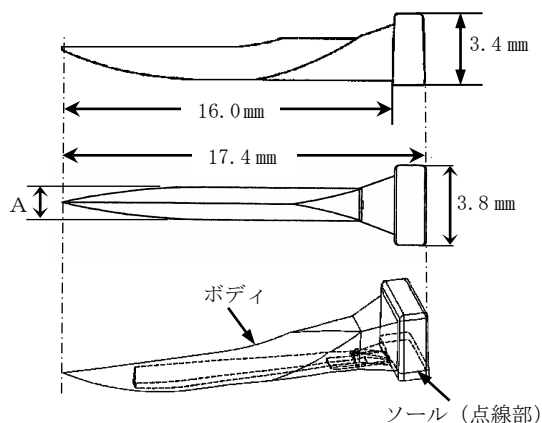

種類	ウルTRASリム	スモール	ミディアム
A	1.0 mm	1.2 mm	1.6 mm

材質

ボディ：ポリアミド（PA）

ソール：熱可塑性エラストマー（TPE）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社

連絡先：03-6866-7272

製造業者：カー・ハーヴェ社（Kerr Hawe SA）


国名：スイス（Switzerland）

【使用目的又は効果】

歯牙窩洞を充填修復する際に、歯頸部の歯間に差し込み、歯をわずかに分離させる。

【使用方法等】

1. 歯科用マトリックスバンド等を、修復する歯に装着する。
2. 適切な種類のルーシーウェッジ クラシックソフトを歯頸部の歯間にマトリックスを押さえるようにして差し込む。

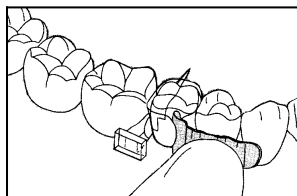

3. 使用する修復充填材を、その使用方法に従って窩洞に充填し、圧接形成する。
4. 使用する歯科重合用光照射器の使用方法に従って光照射し、修復充填材を硬化させる。
5. 修復充填材の硬化後、ルーシーウェッジ クラシックソフト及びマトリックスを抜き取る。