

機械器具 65 歯科用充填器  
 一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ 16370000

### インターデンタルウェッジ

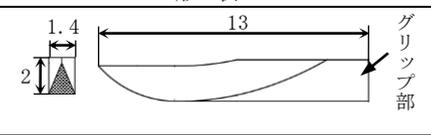
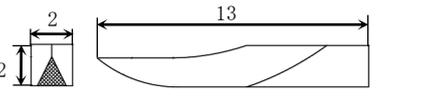
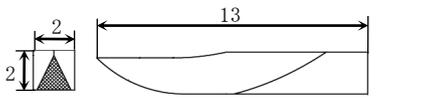
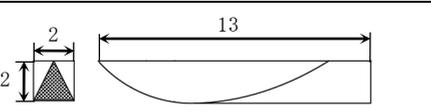
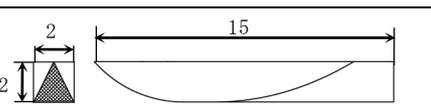
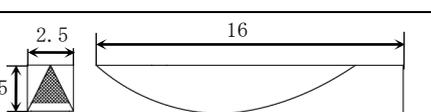
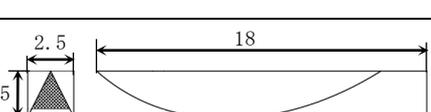
再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- ・ 再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

本製品は、7種類の形状のものから構成され、色で識別できる。グリップ部から先端に向かって細くなっており、先端を歯頸部の歯間に差し込むことにより、歯にわずかな隙間を作る。グリップ部は断面が正方形、又は正方形に近い四角形で、ホルダー（別届出品）で保持して歯間に設置する。

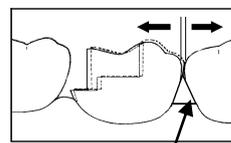
色	形状
オレンジ	
ホワイト	
グリーン	
イエロー	
ブルー	
レッド	
ホワイト レージ	

単位：mm

材質：木材

**【使用方法等】**

1. 歯科用マトリックスバンド等を、修復する歯に装着する。
2. ホルダー（別届出品）でインターデンタルウェッジを保持する。
3. コンタクトポイントのきつい歯間に、インターデンタルウェッジを差し込む。
4. 使用する修復充填材を、その使用方法に従って窩洞に充填し、圧接形成する。
5. 使用する歯科重合用光照射器の使用方法に従って光照射し、修復充填材を硬化させる。
6. 修復充填材の硬化後、インターデンタルウェッジおよびマトリックスを抜き取る。



インターデンタルウェッジ

**【保管方法及び有効期間等】**

- [有効期間]  
 ・ 60ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]  
 使用期限は、包装に記載。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社  
 連絡先：03-6866-7272  
 製造業者：カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)  
 国名：スイス (Switzerland)

**【使用目的又は効果】**

歯牙窩洞を充填修復する際に、歯頸部の歯間に差し込み設置し、歯をわずかに分離させる。