

歯科材料（9）歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000
クリーンポリッシュ

【禁忌・禁止】

本品の成分に対し、過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

チューブ型の容器に入った薄いピンク色のペーストで、研磨材を含有する。

原材料：水、メチルパラベン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ソルビトール、バミス、炭酸カルシウム、酸化アルミニウム、ベントナイト、エタノール、香料、その他

【使用目的又は効果】

歯科衛生士、歯科医師等が予防治療ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 歯科予防治療用ブラシ、歯磨カップ等を用いて、歯面を清掃、研磨する。
2. 清掃及び研磨後は十分に水洗する。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・高温多湿を避けて保管すること。

[有効期間]

- ・36ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先：03-6866-7272
製造業者：カー・ハーヴェ社（KerrHawe SA）
国名：スイス（Switzerland）