
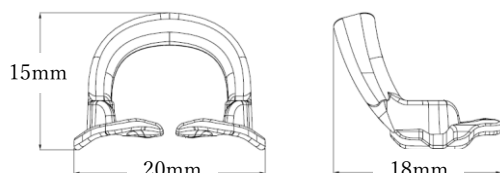


機械器具 67 歯科用防湿器  
一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ 15712000

## ソフトクランプ

### 【形状・構造及び原理等】

ウィングにはアプリケーション フォーセップ (別届出品) の先端を差し込む穴があり、ウィングの内側の突起部には滑り止め加工がされている。

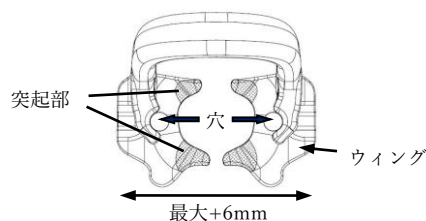

原材料: ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)、その他

### 【使用目的又は効果】

露出させた歯の歯頸部にラバーダムを押しさえつめるために用いる。簡易防湿材の保持のために用いることもある。

### 【使用方法等】

1. アプリケーション フォーセップの先端を、ソフトクランプの穴に差し込む。
2. ソフトクランプを保持した状態で口腔内に挿入し、ラバーダムが正しく装着された歯牙の歯頸部を、頬側と舌側からウィングで挟み、ラバーダムを押しさえる。



### 【使用上の注意】

- ・ 使用前に必ず消毒・滅菌 (保守点検に係わる事項参照) を行うこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### [保管方法]

- ・ 洗浄、消毒、滅菌後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。

#### [有効期間]

- ・ 60ヶ月 [自己認証 (製造元データ) による]  
使用期限は、包装に記載。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検
  - ・ 使用後は、感染防止のため洗浄・消毒又は滅菌すること。
2. 洗浄
  - 1) 使用後は、目視で確認できる汚れ、血液や唾液等を器具からブラシ等を用いて温水や洗剤で取り除く。
  - 2) 確認して、まだ汚れが残っていれば、1) を繰り返し洗浄する。
  - 3) あるいは超音波洗浄器で洗浄する。
3. 消毒
  - 1) 汚れが除去されていることを確認後、プラスチック用の消毒剤を用いて薬液消毒を行う。
  - 2) 温水ですすぎ、乾かす。
4. 滅菌
 

高圧蒸気滅菌 (134°C、3分間) を実施する。

#### [保守・点検に関する注意事項]

- ・ 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
- ・ 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。
- ・ 滅菌中は、高圧蒸気滅菌器の金属部分に接触しないように注意すること。
- ・ 高温 (134°C以上) での乾燥は、器具の材質に影響を与えるので、乾燥工程は高温で行わないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社  
 連絡先 : 03-6866-7272  
 製造業者 : カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)  
 国名 : スイス (Switzerland)