

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

オプチシャイン


【禁忌・禁止】

ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

本製品は、ブラシの長さが中心に向かって短くなっており、ブラシは研磨粒子を含有している。使用の際には、歯科用ハンドピース等に装着して、回転させて使用する。

最大使用回転数: 5,000 回転/分

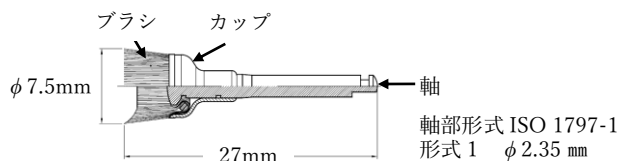

原材料 ブラシ: アラミド繊維 (シリコンカーバイド含有)
カップ、軸: 真鍮 (ニッケルメッキ)

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研磨材を使用せずに研削、研磨する。



隣接歯間



咬合面

【使用方法に関する使用上の注意】

- 1) 最大使用回転数5,000回転/分を超えた使用の場合には、破損してけがをするおそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 3) 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- 4) 頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ・ 安全のために、保護めがねなどを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・ 水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【有効期間】

- ・ 60ヶ月 [自己認証(製造元データ)による]
使用期限は、包装に記載。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検

- ・ 破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- ・ 使用後は、ハンドピースから取りはずして感染防止のため洗浄・消毒又は滅菌すること。

2. 洗浄・消毒

- 1) 使用後は、目視で確認できる汚れ、血液や唾液等を器具からブラシ等を用いて温水や洗剤で取り除く。
- 2) 確認して、まだ汚れが残っていれば、1)を繰り返し洗浄する。
- 3) あるいは超音波洗浄器で洗浄する。
- 4) 汚れが除去されていることを確認後、プラスチック用の消毒剤を用いて薬液消毒を行う。
- 5) 温水ですすぎ、乾かす。
- 6) あるいは1)~5)の代わりに器具除染用洗浄器(ウォッシュャー・イスソフエクター)で洗浄及び熱消毒(93°C)を実施する。

3. 滅菌

高圧蒸気滅菌(134°C、3分間)を実施する。

【保守・点検に関する注意事項】

1. 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
2. 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、材質に影響を及ぼす事がある。
3. ケミクレーブは行わないこと。
4. 超音波洗浄器及び器具除染用洗浄器を使用する際には、洗浄器の取扱説明書及び注意書きをよく読み、使用すること。
5. 滅菌中は、高圧蒸気滅菌器の金属部分に接触しないように注意すること。
6. 高温(134°C以上)での乾燥は、器具の材質に影響を与えるので、乾燥工程は高温で行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6866-7272
製造業者 : カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)
国名 : スイス(Switzerland)