

メタフィックス


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

厚さ 0.038 mm のバンドにはリングが取り付けられており、3種類のサイズがある。サイズは、サイズコードウィンドの数で識別できる。

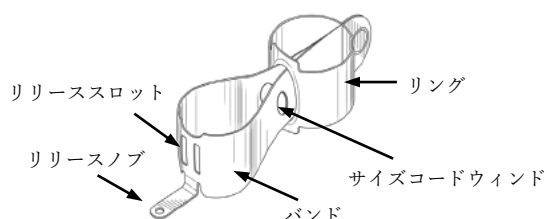

製品番号	3601	3602	3603
サイズコードウィンドの数	無し	1個	2個
サイズ	スモール (小白歯用)	ミディアム (大白歯用)	ラージ (大白歯用)
バンド装着部周長	最長(1): 28mm 最短(2): 20mm	最長: 35mm 最短: 27mm	最長: 42mm 最短: 34mm

- (1) リングがオープンの状態
(2) リングを潰した状態

材質：ステンレス鋼



【使用目的又は効果】

修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込める。

【使用方法等】

1. 装着方法

- 適切なサイズのマトリックスバンドを選択し、必要な場合はリングを調節する。
- バンドを歯に合わせて歯茎部方向にスライドさせる。
- バンドが歯の周囲にきつく締まるようにリングを潰す。
- バンドを正しい位置に装着し、歯科用マトリックスウェッジ等で固定する。

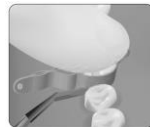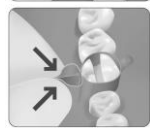

2. 取外し方法

- プローブ又はインスツルメントの先端が歯や歯茎部に向かないように、リリースノブに水平方向に差し込む。
- バンドが外れないように指で押さえながら、リリースノブを引き上げ、リリーススロットに沿って切り取る。
- マトリックスバンドを歯牙から引き抜く。
- 歯科用マトリックスウェッジ等を外し、コンタクトポイントを確認する。



[使用方法に関連する使用上の注意]

本製品は、白歯に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[有効期間]

- ・ 60ヶ月 [自己認証(製造元データ)による]
- 使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
 連絡先 : 03-6866-7272
 製造業者 : カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)
 国名 : スイス(Switzerland)