

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント 70838002

テンプボンド NE

再使用禁止（ミキシングチップ）

【禁忌・禁止】

- ・ 本材あるいは類似の成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ オートミックスシリンジ用ミキシングチップは再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

構成品	性状	成分
ベース	白色のペースト	酸化亜鉛、流動パラフィン、その他
アクセレーター	褐色のペースト	ロジン、メチル安息香酸、その他

容器：チューブ、シリンジ

付属品：ミキシングチップ（シリンジのみ）

【使用目的又は効果】

暫間歯冠やブリッジの仮着に使用する。

【使用方法等】

操作時間及び硬化時間（常温、練和開始後）

種類	操作時間	硬化時間
チューブ	1 分 30 秒以上	7 分以内
シリンジ	1 分以上	7 分以内

時間は保管状態、温度、湿度及び製造後の経過時間により変化する。

チューブ

- 1) 練和紙上にベースとアクセレーターを等長押出す。仮着する補綴物の大きさにより、量を加減する。
- 2) 約30秒間、練和紙上の各ペーストを練和する。
- 3) 形成歯面及び仮着する補綴物の内側を乾燥する。
- 4) セメントを補綴物の内面全体に薄く塗布する。
- 5) 補綴物を口腔内に挿入し、形成歯に確実に装着する。
- 6) セメントが硬化後（口腔内で約2分）、余剰部分を除去する。

シリンジ

- 1) シリンジからキャップを取り外す。
- 2) ミキシングチップを装着する前に、少量のペーストを押し出し、ベースとアクセレーターが出ることを確認する。
- 3) ミキシングチップを装着し、90° 回転させ、ロックする。
- 4) セメントを補綴物の内面全体に薄く塗布する。
- 5) 補綴物を口腔内に挿入し、形成歯に確実に装着する。
- 6) セメントが硬化後（口腔内で約2分）、余剰部分を除去する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 大きな仮着物、あるいは嵌合性の高い仮着物の場合には除去できないことがあるので、ペーストに白色ワセリンを加え練和し、硬化後のセメントの硬さを調整すること。（ペーストの25%容量を上限とする）
- 2) アルミ製チューブ容器は、繰り返し曲げると破れることがあるので、ペーストはチューブ後端から順次軽く押し出すこと。

- 3) キャップをする前にチューブのノズル部分をよく拭き、ベースとアクセレーターのキャップを取り間違えないよう注意すること。
- 4) シリンジにミキシングチップを装着する前には、必ず試し出しを行うこと。
- 5) ベースとアクセレーターは、購入時の組合せ通りに使用し、どちらかが残った場合は使用せずに廃棄すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ① 本材の使用により発疹等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 練和物は口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合は、すぐに大量の水で洗浄すること。万一目に入った場合は、大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 本材は高温多湿を避けて保存すること。

〔有効期間〕

- ・ 24ヶ月：〔自己認証（製造元データ）による〕
使用期限は、包装に記載。

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先：03-6866-7272
製造業者：カー社(Kerr Corporation)
国名：アメリカ(U.S.A.)