

## ライフ

### 【禁忌・禁止】

本品の成分に対し、過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

構成名	性状	成分
ベース	ペースト	水酸化カルシウム、パ <sup>®</sup> ラトルエンスルホニアミド <sup>®</sup> 、酸化亜鉛、その他
キャタリスト	ペースト	硫酸パ <sup>®</sup> リウム、サリチル酸メチル、その他

### 【使用目的又は効果】

覆罩、裏装に使用する。

### 【使用方法等】

- 1) ベースとキャタリストを等長練和紙に出す。
- 2) 小さめのスパチュラで約10秒間縞模様がなくなる迄練和する。
- 3) 直ちにアプリケーションターで窩洞に塗布する。

作業時間 : 6分以上 (24℃、50%RH)  
硬化時間 : 7分以下 (37℃、100%RH)

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) ベースとキャタリストは使用直前に出すこと。
- 2) 湿気を避けるために、ペーストを出したら直ちにキャップをすること。チューブ内で硬化したり、硬化が早くなる場合があります。
- 3) 作業時間及び硬化時間は温度と湿度により変化します。
- 4) キャップをする前にチューブのノズル部分をよく拭き、ベースとキャタリストのキャップを取り違えないよう注意すること。
- 5) 連続塗布を行う場合は、ペーストを取る前に、その都度アプリケーションターのチップ部分を拭うこと。
- 6) ラバーダム防湿材等を用いて酸エッチング等を行う際、窩洞が乾燥し過ぎてライフの硬化が遅い場合、硬化を早めるにはライフペースト上に少量の水を落とすこと。
- 7) 過酸化ベンゾイルを多く含有する化学重合、光重合型のボデイング材はライフを変色させることがあるので、練和紙上の硬化したライフにそのようなボンディング材を滴下し適合性をチェックすること。
- 8) 冷蔵庫に保管していた場合は、室温に戻してから使用すること。
- 9) ベースとキャタリストは、購入時の組合せ通りに使用し、どちらかが残った場合は使用せずに廃棄すること。

### 【使用上の注意】

#### 〔重要な基本的注意〕

- ① 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ② 本材の使用により発疹等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ③ 練和物は口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合は、すぐに大量の水で洗浄すること。万一目に入った場合は、大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

- ・ 高温多湿を避けて保存すること。

#### 〔有効期間〕

- ・ 21ヶ月 [自己認証 (製造元データ) による]  
使用期限は、包装に記載。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先 : 03-6866-7272  
製造業者 : カー社 (Kerr Corporation)  
国名 : アメリカ (U. S. A.)