

Product Information

KaVo プロフィーフレックス 4

先端のノズルを取り替えるだけで歯肉縁上および歯肉縁下の両方のクリーニングができる歯面清掃用器具です。人間工学に基づき、軽量かつ最適なバランス性を備えており、効率的で患者さまへの負担も少なくなるよう設計されています。



■ さまざまな用途に自在

- 先端のノズルを交換するだけで、歯肉縁上および歯肉縁下両方のクリーニングが可能
- 360°の回転式のグリップスリーブで、アクセスしづらい困難な部位にも容易に操作

■ カラフルなハンドピースボディ

- フラミンゴ・ウェーブ・ライムの3色のカラーバリエーション

■ 簡単接続

- KaVoマルチフレックスカップリングまたは、シロナカップリングに接続するだけで、すぐに処置が可能

■ 歯周ポケットのメンテナンス

- ペリオチップ&ペリオパウダー (別売)

※プロフィーフレックス4専用のペリオチップが必要です。ご使用にあたっては、使用上の注意をご確認ください。

■ 患者さまや術者の負担を軽減し、快適な治療を実現

- 水とパウダーの混合噴霧システムを採用、パウダーの飛散を抑制
- 均一なパウダー噴霧で、歯面に優しいクリーニング
- グリップスリーブの長さの変更が可能
術者ひとりひとりの手にフィットし、ストレスがなく快適な治療
- パウダーの噴霧レベルの調節
歯肉縁上用・歯肉縁下用・メンテナンス用の3段階でパウダーの噴霧レベルを手元で調節
- パウダーノズルの交換が不要

販売名:プロフィーフレックス4 一般的名称:能動型機器接続歯面清掃用器具 認証番号:230AIBZX00026000 管理医療機器

Customer Information



〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-11-17
TEL:052-251-8282
<http://e-ha.ne.jp/>



理事長・院長 今井 健二 先生

略歴

1994年 朝日大学 歯学部 卒業
1994年 朝日大学 歯周病学講座
1995年 朝日大学大学院 歯学研究科
1999年 朝日大学 歯学部歯周病学講座 非常勤講師
1999年 医療法人 修愛会 上前津歯科医院
2002年 医療法人 修愛会 上前津歯科医院 理事長就任
2009年 ナゴヤセラミックファクトリー 開設
ニューヨーク大学 歯周&インプラントコース 修了
ハーバード大学 審美&インプラントコース 修了
ペンシルバニア大学 審美&インプラントコース 修了

所属

日本歯周病学会 認定医
日本口腔インプラント学会 会員
日本歯科審美学会 会員
IPPC 主宰
ノーベルガイド プランニング教室(名古屋) 塾長


KAVO
Dental Excellence

カボデンタルシステムズ株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844
<http://www.kavo.jp>
VITFJB1909V1 INS-097

KaVo PROPHYflex 4 Customer's Voice

Made in Germany

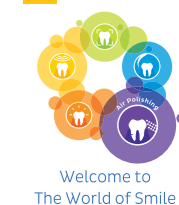


予防歯科のマストアイテム KaVo プロフィーフレックス 4

医療法人 修愛会 上前津歯科医院

理事長・院長

今井 健二 先生

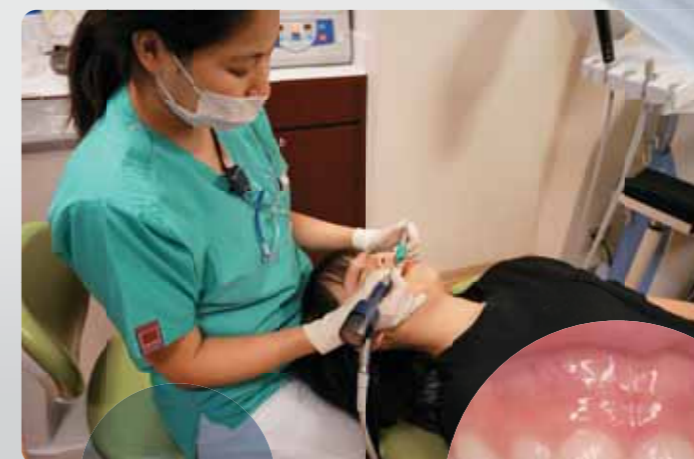

KAVO
Dental Excellence

手によりフィットし、操作性が向上

KaVo プロフィーフレックス4は、従来品のプロフィーフレックス3よりも若干重みは増したということでしたが、実際に使用してみるとバランスが良くなっていることから重さの変化はあまり感じませんでした。また、大きさについても、女性術者には大きくて操作性が良くないという部分の不満が解消されたと思います。それに加えて、グリップスリーブは2種類から選択ができるようになり、長さも短くなったのでより手へのフィット感が増し操作性が高くなったと感じました。



ストレスや痛みがないクリーニング

実際に当医院の小児患者さまで下顎前歯にステインが付着していたため、KaVo プロフィーフレックス4を使用したところ、少し怖がってはいましたが「痛くない」と言ってくれて、無事綺麗にクリーニングすることができました。痛みは患者さまにとって大変なストレスになります。痛みがなくクリーニングできるということは、大きな利点だと思います。



クリーニング前



クリーニング後

パウダーが舞い散らかりにくい・施術時間を短縮・歯面への損傷も抑制

著しく向上された改良点の1つが、噴射方式が変更されたことです。従来品のプロフィーフレックス3は水が外側、パウダーが内側から別々に口腔内へ噴射する方式でしたが、パウダーと水がノズル内で混合して噴射する構造に改良されたことで、噴霧が集中され、パウダーが舞い散らかりにくくなりました。現場での懸念材料でもあった患者さまの顔にパウダーが飛び散るといことがなくなり、患者さまへの負担が軽減されました。また、術者にとっても施術中の視界が良くなるため、施術が以前より格段に容易に行え、時間短縮にも繋がりました。これは患者さまにとっても、術者にとっても大変嬉しいことです。また、パウダーと水が混合して噴霧されることで歯面への損傷も抑制されました。その結果、歯面を塑像してしまうリスクを減らしてくれます。患者さまの口腔内の状態によって、パウダー量を3段階（ゼロから最大まで）調節することができますし、溝の深い汚れや着色も、簡単に落とすことができます。パウダーの噴霧も安定しています。



ビタミンカラーのハンドピースボディ

KaVo プロフィーフレックス4のハンドピースのボディカラーはとてもカラフルで、フラミンゴ・ウェーブ・ライムの3色から選ぶことができます。ビタミンカラーは元気、活気を与えてくれますし、医院のイメージカラーとマッチングすることができます。当医院は、グリーンとブラウンを基調にした医院作りをしていますが、どのカラーも綺麗なため全色購入しました。



豊富なフレーバーのパウダー コンテナを取り替えるだけですぐにクリーニング

パウダーはプロフィーパール（ミント／ピーチ／オレンジ／カシス／ニュートラル[無味]）、プロフィーフレックスパウダー（オレンジ／ベリー／チェリー／ミント）、プロフィーフレックスペリオパウダーの3種類から症状に合わせて選択できます。フレーバーも数種類ありますので、患者さまのお好みの香りでも心地よくクリーニングを受けていただければと思います。パウダーコンテナは、密閉可能なコンテナ用キャップがあるので扱いやすく、コンテナを本体に取り付けるだけですぐにクリーニングが始められます。



歯周病はもちろん、補綴装着前の支台歯のクリーニングなど 幅広く活用できるペリオチップ・ペリオパウダー

KaVo プロフィーフレックス4は、オプション品のペリオチップを使用することで5mm以下のポケット内の清掃が可能のため、歯肉縁上縁下両方に使用することができます。ペリオチップはペリオパウダーと使用することで、ブリッジ周辺やクラウンのクリーニング、中程度の歯周病や、初期段階のペリインプランタイトイスの消炎処置にも有効的に使用できます。WHO基準の目盛りがあるため、ポケット内の深さをしっかりと確認しながら、安心して処置ができます。また、補綴装着前の支台歯の歯面清掃にも活用しています。歯面の汚染物を確実に除去し、感染物の封入するリスクを防ぐことにより、精確な接着操作に結びつけることができます。

メンテナンスについても、洗浄や滅菌も簡単に行えて、安心して患者さまに使用することができます。予防歯科にも力を入れていきたいと考えている医院にとっては、きっと後押ししてくれるマストアイテムになるのではと思います。