

ネクサス ユニバーサル


プライマー併用型レジンセメント

KAVO  Kerr

シンプル操作と高い接着強度を兼ね備えた

オープンシステム型レジンセメント

ご使用中のボンディング材と併用可能

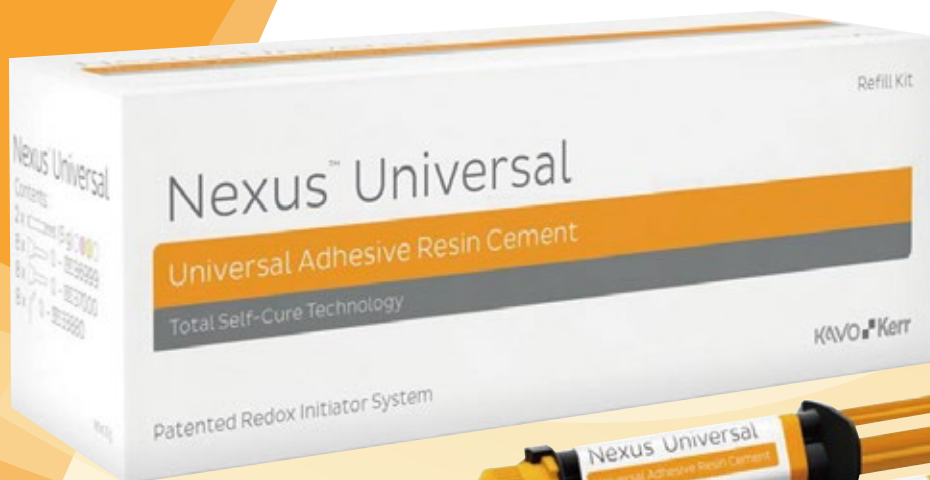

Nexus™ Universal

Universal Adhesive Resin Cement

シンプルで優れた操作性、余剰セメント除去性能、接着強度、審美性を兼ね備えたプライマー併用型レジンセメントです。ご使用中のボンディング材はそのまま、間接法の臨床結果向上に貢献します。ファイバーポスト応用によるコア築盛用材料としてもご使用ください。

■ 各社ボンディング材と併用可能なオープンシステム

ボンディング材の使用方法は各製造メーカーの指示に従ってください。



■ マックスセム エリート クロマで大好評のカラーインジケーターを採用*

セット時のピンク色が硬化と共に色褪せ、完全硬化で本来のシェード色に戻ります。

余剰セメント除去の適切なタイミングを視覚的に確認でき、硬化までの時間や温度管理など、セメンティングのストレスがありません。余剰セメント除去によるリスクもなくします。

※カラーインジケーターを採用したシェードはクリアクロマのみとなります。

カラーインジケーターチャート



濃い
ピンク色



薄い
ピンク色

ごく僅かな
ピンク色

ピンク色
消失

↑
補綴物セット

スタート

ゲル化開始
余剰セメント除去

約1~2分経過 ※

完全硬化

約4分経過

※硬化時間は保存条件や期間、温度、湿度などによって異なります。

■ One-Peel™ クリーンアップ


カーのチクソトロピー技術により、一塊で容易に余剰セメントを除去できます。光照射器によるタックキュア(予備照射)も併用できます。



■ 審美性

カーオリジナルのレドックス重合開始剤を採用、色調の安定性と長期的な審美性をもたらします。

ネクサス ユニバーサル
(クリア)の色調変化

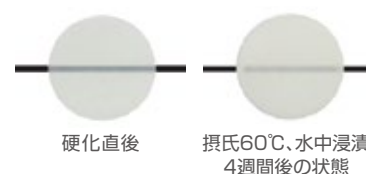

硬化直後

摂氏60℃、水中浸漬
4週間後の状態

■ お客様の声


約9割の先生より「大変良い+良い」とご評価いただきました。 出典:OralStudio Report 33号 対象:OralStudioプレミアムDr 28名

他社のボンディング材でもOKというのはいいです。 普段CR充填に使用しているボンディング材を使用できることはありがたいです。


ボンディング材のメーカーを問わないので新規に導入しやすく、ピンクのカラーインジケータで余剰セメント除去のタイミングがわかるのでテクニカルエラーが少なくなりそうです。

メタル、レジン、ジルコニアに使用してみましたが問題なく接着しました。ジルコニア等の接着しにくい物はこちらで、セルフアドヒーシブタイプと使い分けするとよいと思います。

余剰セメント除去性能は
いかがでしたか？

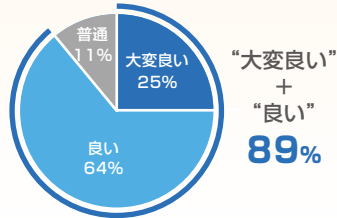

ネクサス ユニバーサルはKerr以外のボンディング材も併用可能。この特徴により先生の臨床に導入したいと感じられましたか？

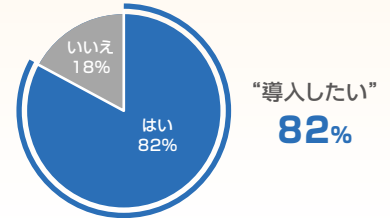

■ 保険CAD/CAM冠の接着

※クリアークロマ使用

写真提供: やまもと歯科医院 山本 司将 先生

※掲載にあたり、患者様承諾済み。写真の転用を禁じます。



1 形成後、オプチボンド ユニバーサルを塗布、乾燥、光照射



2 補綴物内面のサンドブラスト



3 ネクサス ユニバーサルの塗布



4 セット、余剰セメントはピンク色



5 ピンク色が薄くなったら余剰セメント除去



6 光照射後、研磨して完了

■ コア築造

写真提供: Dr Matthew Miller



1 根管内をボンディング処理後、ネクサス ユニバーサルを注入



2 ファイバーポスト植立後、ネクサス ユニバーサルの築造



3 光照射

ネクサス ユニバーサル トライアルキット

標準価格 **6,800円**

ボンディング材付きてお得な導入向けセットです。



セット内容

シリンジ5g (クリアー) 1本
 オプチボンド ユニバーサル ユニドース 0.18mL* 8個
 セメント用ミキシングチップ Dタイプ レギュラー 8本
 アプリケーターチップ 8本

※国内未発売

品目コード 36990

伝票記載コード 0.808.4995

ネクサス ユニバーサル リフィル

標準価格 **13,600円**



クリアー ホワイト ホワイトオベーク イエロー ブリーチ
 ※印刷のため、若干異なる場合があります

セット内容

シリンジ5g 2本
 セメント用ミキシングチップ Dタイプ レギュラー 8本
 セメント用ミキシングチップ Dタイプ ワイド 8本
 セメント用ミキシングチップ イントラオーラルチップ 8本

シェード	品目コード	伝票記載コード
クリアー	36991	0.808.4996
クリアークロマ※	36992	0.808.4997
ホワイト	36993	0.808.4998
ホワイトオベーク	36994	0.808.4999
イエロー	36995	0.808.5000
ブリーチ	36996	0.808.5001

※カラーインジケーター機能付
 管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号: 302ADBZX00089000

セメント用ミキシングチップ

商品名	デザイン	品目コード	伝票記載コード	人数(本)	標準価格
Dタイプ レギュラー	オートミックスで補綴物に塗布しやすい長さ先端形状です。	36999	0.808.5002	50	5,800円
Dタイプ ワイド	イントラオーラルチップ、ルートチャンネルチップと組み合わせて使用します。	37000	0.808.5003	50	5,800円
イントラオーラルチップ	先端外径 1.86mm 10mm 口腔内で使いやすい角度のチップです。	33880	0.808.0264	8	500円
ルートチャンネルチップ	先端外径 1.05mm 13mm 根管内への注入を容易にします。	33881	0.808.0265	8	500円

一般医療機器 歯科用練成器具 医療機器製造販売届出番号: 27B1X0014911200

オプチボンド ユニバーサル

1液性セルフエッチボンディング材です。
 CR充填などの直接法から、レジンセメント併用による間接法まで対応します。

オプチボンド ユニバーサル 管理医療機器 歯科用象牙質接着材
 医療機器認証番号: 230ADBZX00058000

商品名	セット内容	品目コード	伝票記載コード	標準価格
オプチボンド ユニバーサル ボトルキット	オプチボンド ユニバーサル ボトル5mL: 1本 アプリケーターチップ: 100本 分取皿: 25枚 ゲルエッチャント3g: 1本 ディスプレイチップ: 10本	36517	0.808.4883	13,000円
オプチボンド ユニバーサル ボトルリフィル	オプチボンド ユニバーサル ボトル5mL: 1本	36519	0.808.4884	10,000円

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。



カボウェブサイト

カボデンタルシステムズ株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F
 カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273
<http://www.kavo.jp>
 KKSAJB2103V2 KR-0234