

カボマルチLEDランプ

KaVo MULTI LED

この明るさで経済的[※]、しかも長寿命[※]。
このLEDで世界が変わる。

※当社製品比



KaVo. Dental Excellence.


お手持ちのライト付き インスツルメントをそのまま LED仕様に。

カプリングやモーターを
新たに購入する必要はありません。


術者にもやさしい (25,000LUX/5,500K)

LEDのやわらかな光が、術野をムラ無く明るく照らし出します。
太陽光に近い(5,500K)ライト色は目にも優しく眼精疲労を低減してくれます。


〈照射例〉

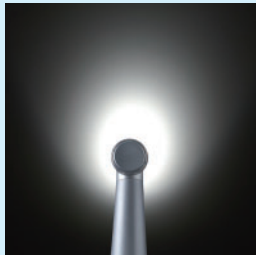

カボマルチLEDランプの理想的な照射は、患部に十分な明るさをもたらします。

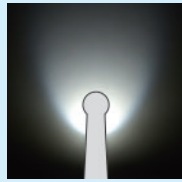

他社製ライトの照射例

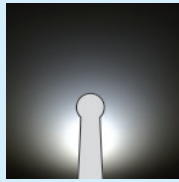

他社製ライトの照射例


交換もやさしい

お手持ちのカボ インスツルメントをそのままLEDライトにできます。カボマルチLEDランプはライトバルブを交換するだけで導入できますのでカプリングやモーター、インスツルメントを新たに購入する必要はありません。



ランニングコストもやさしい

家電製品などにおいてもLEDライトが注目されている最大の要因は、通常の光源に比べて消費電力が非常に少ないという点です。カボマルチLEDランプは既存のライトと比べ消費電力が減少します。

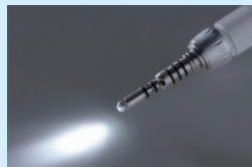

長寿命^{*}で環境にもやさしい

カボマルチLEDランプは、保護する樹脂や電極部分の劣化による寿命以外、発光素子自体はほとんど劣化しませんので、長寿命^{*}でご使用いただけます。



※当社製品比

※実物と写真が異なる場合があります。

カボマルチLEDランプ取付け時の注意

- ① カボのカプリング、モーターにご使用いただけます。(一部のユニット、カプリング、モーターを除く)
- ② 本製品を使用する場合は、電圧をDC(直流)3.3Vに調節する必要があります。
- ③ 電圧の調整は、弊社カボのサービスにご依頼ください。(有料)
- ④ 本製品には、プラスとマイナスの極性があります。(点灯しない場合は、カボマルチLEDランプの電極方向を差換えてください。)
- ⑤ キング工業社、GC社、タカラ Belmont社の各ユニットでもご使用になります。ユニットの電圧調整が必要となりますので各社へご確認願います。

・製品名:カボマルチLEDランプ ・REF:1.007.5372 ・標準販売価格 12,000円

