

KaVo クアトロケアプラス 2124A インスツルメントのメンテナンス より簡単で確実にいきませんか?

最大4本のインスツルメントを同時にオイル洗浄・注油できる自動ケアシステム

KaVo クアトロケアプラス 2124A は、簡単な操作で感染や故障の原因となるタンパク質などの汚れをすみずみまで確実にオイル洗浄し、注油します。



手では
除去しにくい
7ヶ所の汚れ

従来のスプレー



クアトロケアプラスでの注油



スプレーオイルがハンドピース
内で約30倍に膨張し、汚れを
吹き飛ばします。



- 手では除去しにくい7ヶ所の汚れを強力オイル洗浄

構造上汚れが付着しやすく、手では決して洗浄できない7ヶ所の汚れを、クアトロケアプラスは強力な洗浄力で除去します。

- わずか2分で強力・確実なオイル洗浄 院内感染のリスクを低減

短時間で効果的に汚れを落とせるのは、オイルがハンドピース内部で泡状となり、高圧エアですみずみに行き渡るからです。1度に4本同時のオイル洗浄・注油がたった2分で行うことができます。

- 省スペースで安全設計 小規模な診療室でも簡単設置

クアトロケアプラスを設置するのに大きなスペースは必要ありません。

- 日々のケアがインスツルメントを長持ちさせランニングコストを低減


製品寿命はその製品自体の品質だけではなく、日々のメンテナンスによって決まります。適切なオイル洗浄と注油を行うことで、ハンドピースが故障を起こしにくくなり、修理・買い替えなどのランニングコストを低減し、経済的です。

- 操作ボタンは1つのみ

2分間で1度に4本同時にオイル洗浄・注油します。誰が操作してもメンテナンスを確実に行うことができます。

操作はたったの4ステップ

4ステップのシンプルな操作。特別なトレーニングの必要がなく、簡単に操作することができます。

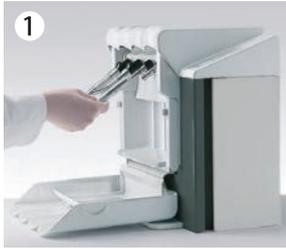


1 インストゥルメントをセット



2 しずかに蓋を開けて…



3 スタートボタンを押すだけ

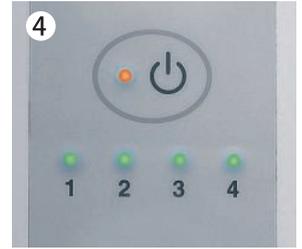

4 これですべて完了です。

※写真は実際の使用例で、装着しているハンドピースは含まれません。 ※イントラヘッドケア-カプリングはオプションとなります。
 ※別売の他社用ケア-カプリングを装着すると、他社のタービンもご使用いただくことができます。

CHECK

確実な手順で洗浄できていますか？

オイルによる洗浄・注油が不足すると、ローターが正常に回転しなくなり、故障の原因となります。



十分なオイルが行き届いているローター



オイル不足でローターが黒く焦げ付きチャック部分も破損している



クアトロケアスプレープラス 製品番号:1.005.4525

クアトロケア用メンテナンススプレー
 内容量:500ml (1本) ×6本セット

※クアトロケアプラス 2124A はKaVo 純製のバーコード表示のあるクアトロケアスプレープラスのみ使用できます。

製品仕様

- 重量 10kg
- 寸法 W350×D280×H380mm (突起部含まず)
- 付属品 イントラマチックケア-カプリング(3本)
 マルチフレックスケア-カプリング(1本)
 クアトロケアスプレープラス(1本)

短時間で作業効果を高める KaVo メンテナンスシステム

「患者さまを診察している間に洗浄・滅菌が完了する」洗浄・滅菌サイクルづくりをカボはサポートします。

Washing-Time

外装部の洗浄



流水下で約1分間外装部を歯ブラシ等で洗浄します。
 60~70%のアルコール溶液に浸した柔らかい布で外装部を拭き取ります。

QUATTRO-Time

内部オイル洗浄・注油



内部のオイル洗浄及び注油が2分間で完了します。

Steri-Time

滅菌



オートクレープ滅菌で確実に滅菌します。
 滅菌後すぐに使用せずに保管する場合は、滅菌バッグに入れて滅菌してください。

Ready-Time

保存



インストゥルメントは新たに安心して使える状態になりました。
 滅菌バッグに入れた状態で次の診療まで保管します。

※内部洗浄・消毒(internal cleaning / internal disinfection)を行う場合は、ISO15883-1に準拠したMiele社のウォッシャーディスインフェクターの使用を推奨しています。