

KaVo RONDOflex Plus 360

# Brilliant work in practice.

KaVo ロンドフレックス プラス360



## 注水機能

パウダーが飛び散りにくい  
ため、隣在歯や口腔粘膜が傷つきにくい

## 簡単操作


KaVoマルチフレックス  
カップリングに接続  
するだけで使用可能

## 軽量

本体はわずか200g

## サンドブラスト処理

CAD/CAM冠を  
確実に接着し、  
患者さんの満足度  
を向上させます。

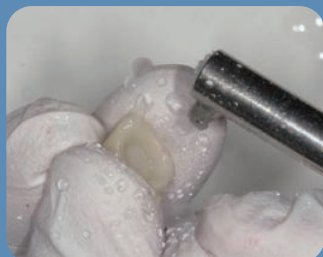

画像提供：内田歯科医院 内田昌徳先生

## エアアブレーションシステム

不快な音や  
振動が少なく、  
MIコンセプトによる  
窩洞形成が  
可能です。



Hard.  
Strong.


KaVo RONDOflex Plus 360




専用のパウダー粒子を高速(20m/秒)の空気流で  
歯面やCAD/CAM冠などの補綴物に吹き付け、  
すばやく処理します。

サンドブラスト処理を行うことで、CAD/CAM冠などの補綴物の接着力を強化し、  
脱離などのトラブルを軽減させます。また、タービン特有の音や切削時の振動がなく、  
MIコンセプトによる初期のう蝕の窩洞形成が可能です。

- ◎切削時の不快な音や振動がなく、快適な窩洞形成
- ◎チェアサイドでのCAD/CAM冠のサンドブラスト処理
- ◎KaVoマルチフレックスカプリングに接続するだけで使用が可能
- ◎注水機能により、パウダーが飛び散らず、隣在歯や口腔粘膜が傷つきにくい

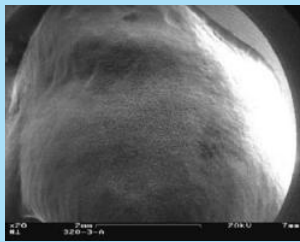

50µmのパウダーを60秒間吹き  
付けた後の歯面

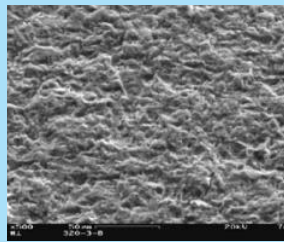

500倍に拡大された歯面  
全体にわたって均一な粗面に仕上がる。



27µmと50µmの酸化アルミナ



2種類のノズル径(0.46mm、0.64mm)  
と2種類の噴射口の角度(90°、110°)  
があり、臼歯部への困難な部位でも確実に  
アクセス

※90°のノズル(0.46mm、0.64mm)はオプション品です。

【本体・付属品】



Rondoflex Plus 360 本体	×1
ノズル110° 0.64mm	×1
ノズル110° 0.46mm	×1
キー	×1
クリーングドリル	×1
クリーングニードル	×1
アブラシパウダー 27µm 75g	×1
アブラシパウダー 50µm 75g	×1
パウダーコンテナ 27µm	×1
パウダーコンテナ 50µm	×1
パウダーコンテナ用カバー	×2
アルミケース入り	



本体まるごと熱消毒  
または、135℃までの  
オートクレーブ滅菌可能

※使用ユニットにより、規程空気圧にセットできない場合、  
規程の処理能力が得られない場合があります。

販売名: Rondoflex Plus 360 一般的名称: 歯科用噴射式切削器 歯科用研削器材 認証番号: 21500BZY00390000 管理医療機器・特定保守管理医療機器

**KAVO**  
Dental Excellence

**カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社**

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481  
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376  
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567  
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844

<http://www.kavo.jp>  
VICP JB 1808V2 INS-029