

KaVo QUATTROcare PLUS

優れたメンテナンスが 成果を生む

経済的で確実なケア
品質を維持する長期的なメンテナンス



KAVO
Dental Excellence

1度に最大4本のハンドピースのメンテナンスを短時間で快適に

ワークフローの改善

日々の診療において、ハンドピースのお手入れに十分に使える時間はほとんどなく、時間的な余裕はありません。そのため、確実でありながらも直感的で素早く簡単に操作できるメンテナンスシステムを導入することはとても重要です。

最大4本のハンドピースが約2分で

スタートボタンを押した後は全自動。KaVo クアトロケアプラスは、とても操作が簡単で、スタッフの負担を軽減します。4個のケアカプリングに最大4本のハンドピースをセットして、フロントパネルを開け、メンテナンスプログラムをスタートさせます。しかも、4本のハンドピースのメンテナンスにかかる所要時間は約2分です。終了後、KaVo クアトロケアプラスはすぐに次のメンテナンスにとりかかることができます。

簡単操作

確実なお手入れ、最大4本のハンドピースのオイル洗浄・注油:

KaVo クアトロケアプラスの使用手順

- 1 ハンドピースを接続します。マルチフレックス ケアカプリング×1個とイントラマティック ケアカプリング×3個が標準セットとして付属されています。
- 2 フロントパネルを閉めて準備は完了です。
- 3 スタートボタンを押します。全自動で最大4本のハンドピース内部のオイル洗浄と注油の所要時間は約2分程度です。
- 4 終了したらハンドピースを取り出します。



取り扱い方法とプログラム手順 主な特徴と利点:

- 簡単で安全な取り扱いで、操作ミスが少ない
- ハンドピースに合わせてプログラムが自動的に切り替えられ、適切なケアが可能
- サイクル時間が短く、約2分でオイル洗浄および注油が完了

KaVo クアトロケアプラス: 簡単、迅速、効率的



独自のパージ機能で たんぱく質などの汚れを除去

ハンドピースの品質を維持

KaVo クアトロケアスプレープラス（専用スプレー）がハンドピース内部で泡状に素早く広がり、ハンドピース内のたんぱく質などの汚れを圧縮されたエアで一気に吹き飛ばします。これがハンドピースの最適なケアとメンテナンスの基本になります。

KaVo クアトロケアプラスは日常の診療ワークフローを円滑にするだけでなく、ハンドピースの優れたケアも実現します。これにより、ハンドピースの製品寿命を長くすることができます。

自動定量注入システムにより、ハンドピースの種類に応じて適切な注油量のオイルでメンテナンスを行うことができます。オイルの浪費を適切にコントロールしながら、ハンドピースの性能を最大限に発揮させます。

KaVo クアトロケアプラスは幅広い互換性があります。KaVo クアトロケアプラスは、KaVo のハンドピースのケアだけでなく、他社メーカーのハンドピースのケアにも使用することができます。

効率的で信頼できるメンテナンス

製品寿命は製品の本来の品質だけでなく、定期的に適切なメンテナンスを実施したかどうかに影響を受けます。KaVo は KaVo クアトロケアプラスのメンテナンスシステムにより、ハンドピースの効率的なメンテナンスシステムを提案します。このメンテナンスシステムによって、他に類をみない確実性、経済性、使いやすさが得られます。日常の診療で使用するすべてのハンドピースのケアに最適です。

KaVo クアトロケアプラスは革新的なパージ機能を標準装備しています。ハンドピースのトランスミッションとスプレーチャンネルに圧縮されたエアが送られ、排出されることで残留するオイルやたんぱく質などの汚れを除去します。そのため、すべてのハンドピースの包括的なケアを行うことができます。

チャックケアプログラム搭載

ハンドピースのチャック部を週1回クリーニングとケアを行うことにより、チャックの保持力や信頼性、長い製品寿命をもたらすことができます。

1. チャックメンテナンス用アダプターをマルチフレックスケアカプリングに装着します。
2. チャック部をチャックメンテナンス用アダプターにセットします。
3. チャックケア用プログラムキーを押します。



KaVo クアトロケアプラスの効果
ハンドピース内で KaVo クアトロケアスプレープラスが泡状に広がり、たんぱく質などの汚れを溶解して除去します。

診療時の効率
KaVo クアトロケアメンテナンスシステムによるお手入れで7年間通常の診療で使用したパーツ - 常に適切なケアを行うことにより、より長くハンドピースを使用することができます。



EXCELLENT.



メンテナンスと効率性 主な特徴と利点：

- クアトロケアスプレープラス（専用スプレー）によるメンテナンス
- 日々の診療要件に応じた高い効率性

KaVo クアトロケアプラス：優れたメンテナンス、高い効率性

満足が得られる投資コスト



明らかな経済的メリット


最高品質のハンドピースに投資しますか？
KaVo クアトロケアプラスは、ハンドピースの精度と価値を維持します。衛生的で適切にメンテナンスされたハンドピースによって継続的なコスト削減と診療の最適なパフォーマンスが得られます。
KaVo クアトロケアプラスの自動定量注入機能とハンドピースの接続部の形状による自動ハンドピース検出システムにより、KaVo クアトロケアスプレープラスを適切かつ経済的に使用することができます。オイル量を最適化することで余剰なオイルやそれに伴う費用を軽減することができます。

経済的なメンテナンス 主な特徴と利点：

- 約 2 分間で最大 4 本のハンドピースのメンテナンス
- プログラム制御された自動メンテナンスプロセス
- ハンドピースの接続部の形状に合わせて自動定量注入による最適な注油量
- 操作が簡単で誤った操作の心配がない
- ハンドピースの余剰オイルを除去し、メンテナンス後の空回転の時間を軽減
- 標準セットとして 4 個のケアカプリングが付属
 - ・マルチフレックス用ケアカプリング× 1 個
 - ・イントラマティック用ケアカプリング× 3 個
- 他社タービンにも接続可能
 - ・他社タービン用メンテナンスアダプター（別売）
- 最新の間工学に基づくデザイン

KaVo クアトロケアプラス：簡単、広範囲な適合性、経済的

CLEANING
+
CARE
=

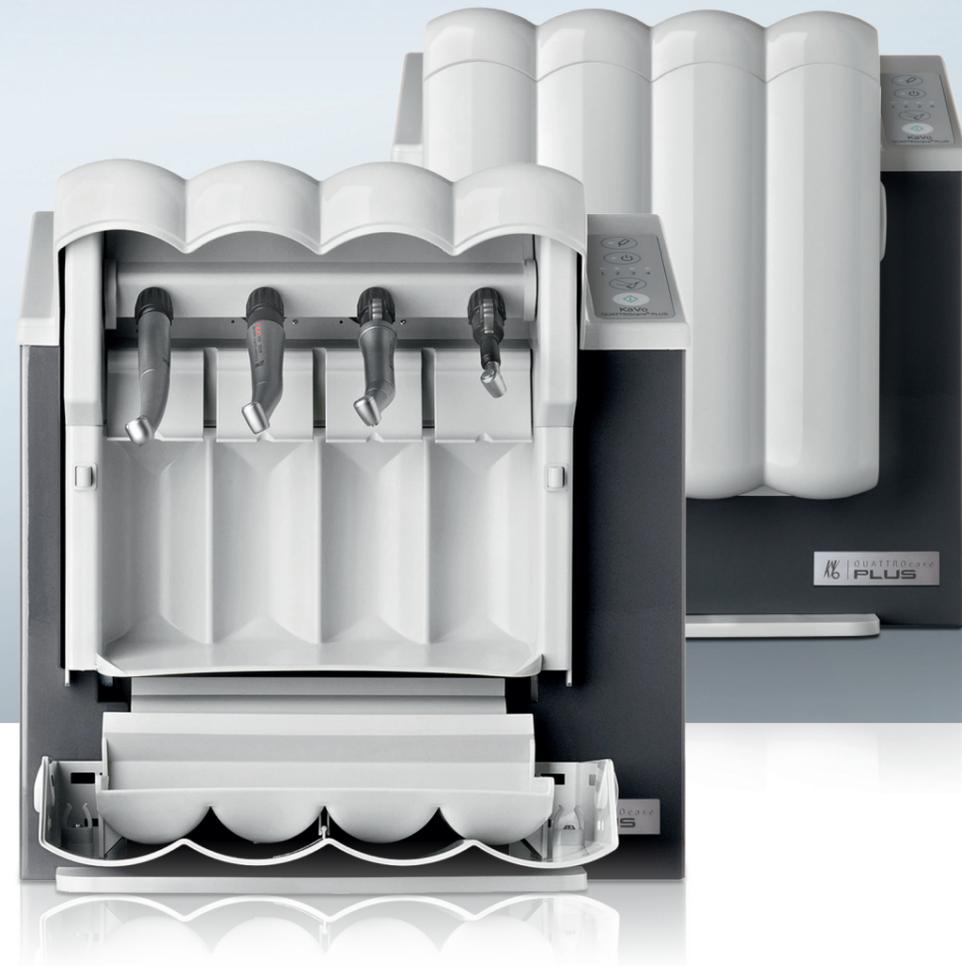

製品仕様

外形寸法：

幅	35 cm
奥行き	28 cm
高さ	38 cm

仕様：

重量	10 kg
電源	AC 100 - 240 V
電圧	50 - 60 Hz
消費電力	約 24 W
使用エア圧力	4 - 6 bar
消費エア流量	約 50 NI/分

設置要件：

- 室内換気が十分であること
- 直射日光が当たらないこと



アクセサリ

製品名	製品番号	製品名	製品番号
イントラマティック ケアーカプリング	1.011.7380	メンテナンスアダプター YO (ヨシダ用) (※在庫限り)	1.000.7585
マルチフレックス ケアーカプリング	1.009.6142	メンテナンスアダプター NK (ナカニシ用)	1.000.8786
イントラヘッド ケアーカプリング	0.411.7941	メンテナンスアダプター OS (オサダ用 GSIS) (※在庫限り)	1.000.8858
メンテナンスアダプター シロナ TE (モーター用)	1.000.1003	メンテナンスアダプター MO (モリタ用)	1.000.6063
メンテナンスアダプター シロナ (タービン用)	1.000.7156	クアトロケアスプレープラス (500ml × 6 本入)	1.005.4525
メンテナンスアダプター W&H	1.001.7888	スプレーノズルチェック クアトロケアスプレー用	1.003.1253
メンテナンスアダプター YO ライト付 (ヨシダ用)	1.000.7403		